

DrugDiag Saliva 5+

INNOVATION / PROFESYONEL TÜKÜRÜK TESTİ

Tek örnek. Beş madde.

Tükürükten eşzamanlı
uyuşturucu madde taraması


ALGILAMA SÜRESİ

30 saniye ile 3 dakika arası

Sonuçları 5. dakikada okuyunuz.

COC • AMP • OPI • MET • THC

Kolay örnekleme. Hızlı değerlendirme.

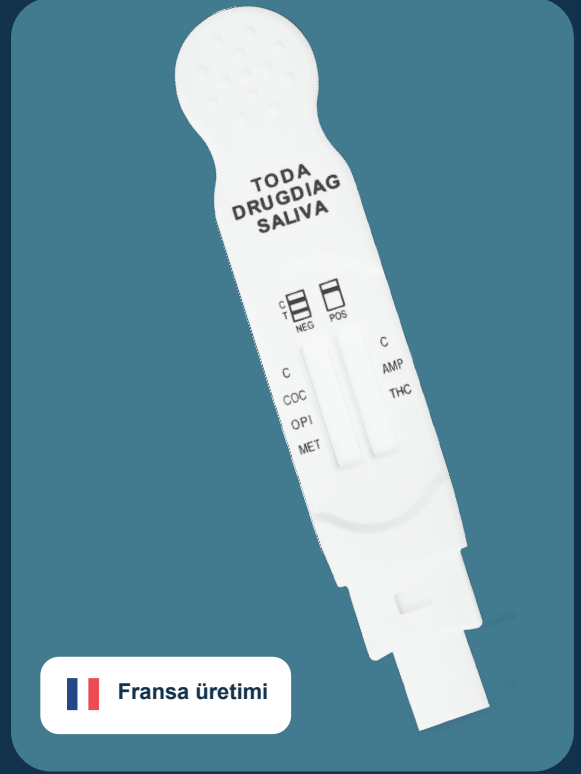

Fransa üretimi

Kolay tükürük örnekleme

Kapaklı, bağımsız örnekleme.

Renkli doygunluk göstergesi

Yeterli örneği renk değişimiyle izleyin.

Seyreltici gerektirmez

Ek işlem olmadan kullanıma hazır.

Gizlilik etiketi

Sonuç alanını gizlemeye yardımcı olur.

5 MADDE / EŞİK DEĞERLERİ

Birim: ng/mL

COC

Kokain

10**AMP**

Amfetamin

50**OPI**

Morfin / Opiatlar

10**MET**

Metamfetamin

50**THC**

Esrar (Δ^9 -THC)

15

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

C: Kontrol çizgisi / T: İlgili madde çizgisi

C**T**

NEGATİF

C ve T çizgileri var.
İlgili madde eşik altında.

C**T**

POZİTİF

C var, ilgili T çizgisi yok.
İlgili madde için ön pozitif.

C**T**

GEÇERSİZ

C kontrol çizgisi yok.
Yeni testle tekrarlayınız.

Şemalar her madde için ayrı değerlendirilir. Silik T çizgisi de negatif kabul edilir.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ürünün kullanım talimatını okuyunuz.

İntegra Medikal

Namık Kemal Mah. Tek Selvi Sok. No:14
Ümraniye / İstanbul

0216 355 72 37

info@integramedikal.com
e-ticaret@integramedikal.com

ONLINE SATIŞ

www.integramedikal.com/magaza