



# PR-888

Alüminyum Walker (Rollator)

## Kullanım Kılavuzu

### **OFİS**

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5  
D:28 Town Ofis Bahçelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

### **FABRİKA**

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB  
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Loco markamızla sunduğumuz PR-888 Alüminyum Walker Rollator ile engelli bireylerin, yaşlıların veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin mobilite ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, özel korumalı boya sistemiyle yağmur suyuna karşı dayanıklı alüminyum gövdesi, ayarlanabilir kol tutma alanları, elcik fren sistemi ve geniş taşıma sepetiyle pratik bir çözüm sunar. Büyük ebatlı silikon dolgu tekerlekleri ve pratik dinlenme modülü ile zorlu koşullarda bile kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

---

## 1. Ürün Tanıtımı

### Ürün Açıklaması

Loco PR-888 Alüminyum Walker Rollator, engelli bireyler, yaşlılar veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir tekerlekli yürüteçdir. Özel korumalı boya sistemiyle paslanmaya karşı dayanıklı alüminyum gövdesi, yaklaşık 8-9 kg ağırlığında ve 100 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Büyük ebatlı silikon dolgu tekerlekleri (genellikle 8" veya benzeri), ayarlanabilir kol tutma alanları ve geniş taşıma sepeti ile konfor ve pratiklik sunar. Katlanabilir yapısı, elcik fren sistemi ve pratik dinlenme modülü ile hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için idealdir.

### Kullanım Amacı

PR-888, kullanıcıların günlük yaşamda bağımsız hareket etmelerini kolaylaştırmak ve yorgunluk anlarında dinlenmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir kol tutma alanları ve elcik frenleri ile güvenlik ve kontrol sunar. Geniş taşıma sepeti ile eşya taşınabilir ve katlanabilir tasarımı, depolama ve taşıma kolaylığı sağlar.

## 2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	60 cm (yaklaşık)
Toplam Yükseklik	80-95 cm (ayarlanabilir)
Toplam Uzunluk	65 cm (yaklaşık)
Katlanır Genişlik	25 cm (yaklaşık)
Ön Tekerlekler	8" Silikon Dolgu
Arka Tekerlekler	8" Silikon Dolgu
Materyal	Alüminyum / Alüminyum
Ürün Ağırlığı	8-9 kg (yaklaşık)
Max. Taşıma Kapasitesi	100 kg
Koli Ölçüleri	70 x 30 x 85 cm (yaklaşık)
Parçaların Rengi	Özel Korunmalı Boya (Çeşitli)
Taşıma Sepeti	Geniş Tasarım

## 3. Kutunun İçindekiler

- PR-888 Alüminyum Walker Rollator (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Taşıma sepeti
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

#### 4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 100 kg yük kapasitesini aşmayın.
- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Elcik frenlerini her zaman kontrol edin; yanlış kullanım düşme riski yaratabilir.
- Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum gövdeyi kurulayın.
- Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
- Kol tutma yüksekliğini kullanıcının boyuna uygun şekilde ayarlayın; yanlış ayar dengesizliğe neden olabilir.
- Tekerleklerin kilit mekanizmasını kullanarak sabitleyin; kaymayı önleyici yapıya rağmen dikkatli olun.

---

#### 5. Kurulum Talimatları

##### Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin, tekerleklerin, sepetin ve fren mekanizmasının kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

##### Adım 2: Çerçeveyi Açma

Ürün katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı doğru hafifçe bastırın. Yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilittendiğini duyduğunuzda (genellikle bir "klik" sesi çıkar) ürün düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

### **Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme**

8" silikon dolgu ön ve arka tekerlekler çerçeveye takılıdır. Her bir tekerleğin 360° serbestçe döndüğünü ve kilitlenebilir olduğunu kontrol edin. Tekerlekleri kilitleyip serbest bırakarak sabitleme özelliğini test edin.

### **Adım 4: Kol Tutma Yüksekliğini Ayar Yapma**

Kol tutma alanları ayarlanabilir. Kullanıcının boyuna uygun şekilde ayar mekanizmasını kullanarak istenen yüksekliği seçin ve sabitleyin.

### **Adım 5: Fren Sistemini Kontrol Etme**

Elcik frenlerini test edin. Frenleri sıkarak tekerleklerin hareket etmediğini doğrulayın; frenleri serbest bırakarak tekerleklerin döndüğünü kontrol edin.

### **Adım 6: Sepeti Yerleştirme**

Geniş taşıma sepetini çerçeveye takın. Sepetin sabit olduğunu ve düşmeyeceğini test edin.

### **Adım 7: Son Kontrol**

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Ürünü sallayarak sabitliği test edin. Tekerleklerin, frenlerin, kol tutma ayarı ve sepetin düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

## 6. Kullanım Talimatları

### Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Tekerleklerin kilit mekanizmasını ve elcik frenlerini kontrol edin. Kol tutma yüksekliğini kullanıcının boyuna göre ayarlayın. Sepeti yerleştirin.

### Adım 2: Yürüme Desteği Kullanımı

Tekerleklerin kilit mekanizmasını serbest bırakın. Kullanıcı, kol tutma alanlarına tutunarak ürünü yürüteç olarak kullanarak destek alsın. Elcik frenlerini gerektiğinde kullanarak durun veya yavaşlayın.

### Adım 3: Dinlenme Kullanımı

Tekerlekleri kilitleyin ve elcik frenlerini güvenli kitleme pozisyonuna getirin. Kullanıcı, pratik dinlenme modülünde oturarak dinlenebilir. Sepeti eşya taşımak için kullanın.

### Adım 4: Katlama ve Taşıma

Ürünü katlamak için oturma kısmını yukarı çekin (katlanır genişlik yaklaşık 25 cm). Katlanmış ürünü (8-9 kg) kolayca taşıyın veya depolama alanına yerleştirin.

---

## 7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum gövdeyi kurulaştırın.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Kilit mekanizmasını kontrol edin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; gerekirse elde yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.

- **Sepet:** Kirlenirse ılık su ve sabunla nazikçe yıkayın; tamamen kurumasını bekleyin.

## 8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-888 Alüminyum Walker Rollator ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönüyor	Kilit mekanizması veya fren kapalı	Tekerlek kilidini ve elcik frenlerini serbest bırakın.
Frenler çalışmıyor	Fren mekanizması aşınmış veya kirlenmiş	Frenleri temizleyin; aşınma varsa servise başvurun.
Kol tutma ayarı değişmiyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazikçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Ürün sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Sepet düşüyor	Sepet sabit değil	Sepeti yeniden yerleştirin ve bağlantıları kontrol edin.
Alüminyum gövdede korozyon	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulayın ve etkilenen bölgeleri temizleyin; servise danışın.

## 9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Katlanabilir tasarım sayesinde ürünü araç bagajına kolayca yerleştirin (katlanır genişlik yaklaşık 25 cm). Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi korozyona karşı koruyun. Büyük ebatlı silikon dolgu tekerlekler, zorlu yollarda manevra kolaylığı sağlar.

- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Elcik frenlerini ve tekerlek kilidini her kullanımda kontrol edin. Kol tutma yüksekliğini kullanıcıya uygun şekilde ayarlayın. Yorgunluk anlarında dinlenme modülünü güvenli bir şekilde kullanın.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum gövdeyi nemden koruyarak korozyonu önleyin. Tekerleklerin, frenlerin ve ayar mekanizmalarının düzenli bakımını yapın.

## 10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
  - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
  - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
  - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
  - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, kumaş).

### İletişim Bilgileri:

#### Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com) | [export@karadenizmed.com](mailto:export@karadenizmed.com)

#### Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com)