



PR-681

Alüminyum Katlanabilir Kanedyen

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal Loco markasıyla sunduğumuz PR-681 Katlanır Kanedyen, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış hafif, dayanıklı ve taşınabilir bir mobilite yardımcısıdır. Bu ürün, 1.04 kg ağırlığında alüminyum gövdesi ile taşınabilir bir yapı sunar. Gümüş renkli şık gövdesi, siyah kauçuk tutma yeri ve kol desteği ile modern bir görünüm sağlar. Toplam genişlik 12 cm, toplam uzunluk 19 cm, katlanır genişlik 19 cm ve toplam yükseklik 96-119 cm aralığında ayarlanabilir, böylece farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır. Ergonomik tutma yeri, dolgulu kol desteği, kaymaz kauçuk ucu ve katlanabilir yapısı ile güvenli ve konforlu bir kullanım sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-681 Katlanır Kanedyen, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, hafif, dayanıklı ve katlanabilir bir koltuk değneğidir. 1.04 kg ağırlığında alüminyum gövdesi, taşınabilir bir yapı sunar; gümüş renkli şık tasarımı ve siyah kauçuk tutma yeri ile modern bir görünüm sağlar. Toplam genişlik 12 cm, toplam uzunluk 19 cm, katlanır genişlik 19 cm ve toplam yükseklik 96-119 cm aralığında ayarlanabilir, böylece farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır. Ergonomik tutma yeri ve dolgulu kol desteği, uzun süreli kullanımda konfor sağlar. Kaymaz kauçuk ucu, zeminde güvenli tutuş sunar ve değiştirilebilir bir yapıdadır. Katlanabilir özelliği, cihazın kolayca taşınmasını ve saklanmasını sağlar. PR-681, hem günlük kullanım hem de geçici sakatlık durumlarında güvenilir bir destek sunar.

Kullanım Amacı

PR-681 Katlanır Kanedyen, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin (örneğin, yaşlılar, engelliler, geçici sakatlık yaşayanlar) yürüme ve ayakta durma sırasında destek almasını sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif yapısı (1.04 kg), katlanabilir özelliği (katlanır genişlik 19 cm) ve ayarlanabilir yüksekliği (96-119 cm), cihazın farklı kullanıcılar tarafından kolayca

kullanılmasını ve taşınmasını sağlar. Ergonomik tasarımı, koltuk altına ve ele baskıyı azaltarak uzun süreli kullanımda konfor sunar. Kaymaz kauçuk ucu, farklı zeminlerde güvenli hareket imkanı sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	12 cm
Toplam Yükseklik	96-119 cm (ayarlanabilir)
Toplam Uzunluk	19 cm
Katlanır Genişlik	19 cm
Materyal	Alüminyum / Aluminium
Ürün Ağırlığı	1.04 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg
Koli Ölçüleri	57x52x38 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC 2450 - 40'DC 6000
Tilt	-
Karton Adedi	10
Renk	Gümüş (gövde), Siyah (tutma yeri ve kol desteği)
Tutma Yeri ve Kol Desteği	Kauçuk / Yumuşak Plastik (tahmini)
Alt Uç	Kaymaz Kauçuk Uç (gri, değiştirilebilir)

Not: Ayarlanabilir yükseklik, katlanabilir yapı, ergonomik tutma yeri, dolgulu kol desteği ve kaymaz kauçuk uç içerir.

3. Kutunun İçindekiler

- Loco PR-681 Katlanır Kanedyen (1 çift)
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

Not: Yedek kauçuk uç opsiyonel olarak dahil olabilir; kutu içeriğini kontrol edin.

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (136 kg) uyun; aşımı kanedyenin zarar görmesine veya kırılmasına yol açabilir.
- Kanedyeni yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya kaygan zeminlerde kayma riski vardır.
- Kauçuk ucu düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değiştirin, aksi takdirde kayma riski artar.
- Kanedyeni kullanırken her iki elinizi de tutma yerlerinde tutun; tek elle kullanmak denge kaybına neden olabilir.
- İlk kullanımda bir refakatçi gözetiminde kullanın; özellikle yükseklik ayarını, katlama mekanizmasını ve kullanım pozisyonunu öğrenmek için.
- Kanedyeni düşürmekten veya sert darbelere maruz bırakmaktan kaçının; alüminyum gövde zarar görebilir.
- Çocukların kanedyeni oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin; yaralanma riski vardır.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Kanedyen (1 çift), kullanım kılavuzu ve garanti belgesi gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Kanedyeni hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, bükülme veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Kanedyeni Açma

1. Kanedyeni katlanmış durumdan açın; ortasındaki menteşe mekanizmasını düzleştirin.
2. Mekanizmanın kilitletiğinden emin olun; kanedyenin sabit bir şekilde durduğunu kontrol edin.

Adım 3: Yükseklik Ayarı

1. Kanedyeni düz bir zemine yerleştirin.
2. Gövde üzerindeki ayar deliklerini ve pimi/düğmeyi bulun.
3. Pimi/düğmeyi serbest bırakın ve kanedyeni kullanıcının boyuna göre 96–119 cm aralığında ayarlayın. Tutma yeri, kullanıcının kalça hizasında olmalı; kol desteği ise koltuk altına hafifçe temas etmeli (çok sıkı olmamalı).
4. Ayar tamamlandıktan sonra pimi/düğmeyi sıkıca kilitleyin ve kanedyenin sabit olduğundan emin olun.

Adım 4: Kauçuk Uç Kontrolü

Kanedyenin alt kısmındaki gri kauçuk ucu kontrol edin; düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve aşınma olmadığından emin olun. Gerekirse yedek kauçuk uç ile değiştirin.

Adım 5: Son Kontrol

Kanedyeni elinizde tutarak stabiliteyi kontrol edin. Tutma yeri ve kol desteğinin rahat olduğundan, yükseklik ayarının doğru yapıldığından ve katlama mekanizmasının düzgün çalıştığından emin olun. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Kanedyeni düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Yükseklik ayarının doğru yapıldığından (96-119 cm aralığında) ve kauçuk ucun zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Kanedyeni Kullanma

1. Kanedyenleri her iki elinizle tutma yerlerinden kavrayın.
2. Kol desteklerini koltuk altına yerleştirin; ancak koltuk altına aşırı baskı yapmaktan kaçının (ağırlığınızı tamamen kol desteklerine vermeyin).
3. Yavaş ve dengeli adımlarla yürüyün; kanedyenleri vücudunuzun biraz önünde tutarak destek alın.
4. Dönüşlerde veya dar alanlarda dikkatli olun; ani hareketlerden kaçının.

Adım 3: Katlama ve Taşıma

1. Kullanım sonrası kanedyeni katlamak için menteşe mekanizmasını serbest bırakın.
2. Kanedyeni katlayın (katlanır genişlik 19 cm); bu şekilde kolayca taşıyabilir veya saklayabilirsiniz.

Adım 4: Temizlik ve Saklama

- Kullanım sonrası kanedyeni nemli bir bezle silin ve kurulayın.
- Kanedyeni kullanmadığınızda katlanmış halde kuru bir yerde saklayın; nemli ortamlardan uzak tutun.

7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Alüminyum gövdeyi nemli bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Tutma Yeri ve Kol Desteği:** Tutma yerini ve kol desteğini nemli bir bezle temizleyin; kauçuk yüzeyin aşınmadığından emin olun.
- **Kauçuk Uç:** Kauçuk ucu haftalık olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değiştirin.
- **Katlama Mekanizması:** Katlama mekanizmasını düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya sıkışma varsa yetkili servise başvurun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Kanedyen kayıyor	Kauçuk uç aşınmış	Kauçuk ucu değiştirin.
Yükseklik ayarı yapılamıyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Katlama mekanizması çalışmıyor	Mekanizma sıkışmış veya hasarlı	Mekanizmayı kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Tutma yeri rahatsız	Yanlış yükseklik ayarı	Yüksekliği yeniden ayarlayın (96-119 cm aralığında).
Gövde bükülmüş	Sert darbe veya aşırı yük	Kanedyeni kullanmayı bırakın ve servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Kanedyeni katlanabilir yapısı (katlanır genişlik 19 cm) ve hafifliği (1.04 kg) sayesinde kolayca taşıyın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi nemden koruyun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Kanedyeni düzenli aralıklarla kontrol edin. Kaymaz zeminlerde kullanın ve kauçuk ucun aşınmadığından emin olun.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi sert darbelere karşı koruyun. Kauçuk ucu düzenli olarak değiştirerek güvenli kullanımı sürdürün.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk uç aşınması).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com