



G120

Klozetli Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G120 Klozetli Standart Manuel Tekerlekli Sandalye ile hareket özgürlüğünüzü ve günlük ihtiyaçlarınızı destekliyoruz. Bu kılavuz, ürünün teknik özelliklerini, kurulumunu ve güvenli kullanımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

G120 Klozetli Standart Manuel Tekerlekli Sandalye, engelli bireyler için konfor, güvenlik ve dayanıklılık sunan ekonomik bir mobilite çözümüdür. Çelik şasisi ve katlanabilir tasarımıyla uzun ömürlü kullanım sağlar. 46 cm koltuk genişliği ve 120 kg taşıma kapasitesi ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. 24" silikon dolgu arka tekerlekler ve 8" PVC ön tekerleklerle donatılmıştır. Klozet özelliği tuvalet ihtiyaçlarını kolaylaştırırken, çıkarılabilir ayaklıkları ile esneklik sunar.

Kullanım Amacı

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için iç mekân ve düz dış mekânlarda bireysel veya refakatçi kontrollü kullanım için tasarlanmıştır. Klozet fonksiyonu ve çıkarılabilir ayaklıklarla tuvalet ve transfer ihtiyaçlarına pratik çözümler sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Model	G120
Çerçeve Malzemesi	Çelik (1.2 mm kalınlık)
Yüzey Kaplama	Elektrostatik toz boya
Koltuk Geniřlięi	46 cm
Koltuk Derinlięi	40 cm
Koltuk Yükseklięi	50 cm (yerden)
Toplam Geniřlik	65 cm
Toplam Uzunluk	105 cm (ayak paletleriyle)
Toplam Yükseklik	90 cm
Tařıma Kapasitesi	120 kg
Net Aęırlık	19 kg
Arka Tekerlek	24" silikon dolgu, 5 cm geniřlik
Ön Tekerlek	8" PVC, 360° döner
Fren Sistemi	Manuel el freni (çift taraflı)
Katlanabilirlik	Evet, yan çerçeve menteřeli
Ayak Paleti	Çıkarılabilir, mandal mekanizmalı
Klozet Özellięi	Çıkarılabilir plastik klozet, kapaklı
Garanti Süresi	2 yıl

3. Kutunun İçindekiler

- G120 Klozetli Standart Manuel Tekerlekli Sandalye
 - Çıkarılabilir plastik klozet (kapaklı)
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum için alyan anahtar (varsa)
-

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 120 kg yük kapasitesini aşmayın.
 - 10°'den fazla eğimli zeminlerde refakatçi desteği alın.
 - Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; kuru tutun.
 - Frenler kilitlenmeden oturmayın veya kalkmayın.
 - Klozet kullanılırken sandalyenin düz ve sabit bir zeminde olduğundan emin olun.
 - Klozet kapağını kullanmadığınızda kapatın ve klozeti düzenli olarak temizleyin.
 - Ayaklıkları çıkarırken mandalları tamamen açtığınızdan emin olun.
-

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

- Kutuyu düz bir zeminde açın ve sandalyeyi çıkarın.
- Çerçeveyi, tekerlekleri, takılı ayak paletlerini, klozet parçasını ve mandalları hasar açısından kontrol edin.

Adım 2: Sandalyeyi Açma

- Katlanmış sandalyeyi oturma kısmından tutarak aşağı bastırın.
- Yan çerçeveleri tam açılana kadar iki yana çekin; "klik" sesini duyduğunuzda sandalye hazırdır.



Adım 3: Klozet Parçasını Takma

- Koltuk minderi altında bulunan klozet yuvasını kontrol edin.
- Çıkarılabilir plastik klozeti yuvaya yerleştirin ve sabitlendiğinden emin olun.



Adım 4: Ayaklık Ayarı ve Çıkarma

- Ayak paletlerinin yanındaki mandalları kontrol edin.
- Kullanıcı boyuna göre ayak paletlerinin yüksekliğini ayarlayın; mandalları gevşetip istediğiniz yüksekliğe getirin ve mandalları sıkın.
- Ayaklıkları çıkarmak için mandalları tamamen açın ve ayak koyma yerini sandalyeden nazikçe ayırın.



Adım 5: Tekerlek ve Fren Kontrolü

- Arka tekerleklerin akslarının çerçeveye tam oturduğunu kontrol edin.
- Ön tekerleklerin 360° döndüğünden emin olun.
- Fren kollarını sıkarak tekerleklerin kilitlendiğini test edin.

Adım 6: Son Kontrol

- Tüm vidaları sıkılaştırın (gerekirse alyan anahtar kullanın).
- Sandalyeyi hafifçe sallayarak gevşeklik olup olmadığını kontrol edin.
- Klozetin ve kalan ayaklıkların yerinde sabit olduğundan emin olun.

6. Kullanım Talimatları

Kullanıcı Tarafından Kullanım

1. Frenleri kilitleyin (kollar aşağıda).
2. Yan tarafınızdan yaklaşarak yavaşça oturun.
3. Ayaklarınızı paletlere yerleştirin (veya ayaklıkları çıkardıysanız serbest bırakın).
4. Frenleri serbest bırakın (kollar yukarı).
5. Arka tekerlek çemberlerini kullanarak hareket edin.

Refakatçi Tarafından Kullanım

1. Kullanıcı oturmadan frenleri kilitleyin.
2. Kullanıcı oturduktan sonra frenleri serbest bırakın.
3. Arka tutma kollarından sandalyeyi itin.
4. Durmak için frenleri kilitleyin.

Klozet Kullanımı

1. Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin ve frenleri kilitleyin.
2. Koltuk minderini kaldırın (varsa çıkarılabilir minder).
3. Klozet kapağını açın ve klozeti kullanın.
4. Kullanımdan sonra klozet kapağını kapatın.
5. Klozeti çıkararak içini boşaltın ve temizleyin (detaylar için Bakım ve Temizlik bölümüne bakın).

Ayaklık Çıkarma ve Transfer

1. Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin ve frenleri kilitleyin.
2. Ayaklıkların yanındaki mandalları tamamen açın.
3. Ayak koyma yerini sandalyeden nazikçe ayırın.
4. Kullanıcıyı başka bir yüzeye (örneğin tuvalet koltuğuna) transfer edin.

Katlama

1. Frenleri kilitleyin.
2. Klozeti çıkarın ve koltuk minderini yerine yerleştirin.
3. Ayak paletlerini çıkarın (mandalları açarak).
4. Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi kapatın.
5. Katlanmış halde saklayın veya taşıyın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin.
- **Klozet:** Her kullanımdan sonra klozeti çıkarın, ılık su ve nötr sabunla yıkayın, ardından iyice durulayın ve kurulayın. Aşındırıcı kimyasal kullanmayın.
- **Ayaklık Mandalları:** Aylık olarak mandalları kontrol edin, gevşeme varsa sıkılaştırın; kirlenirse nemli bezle temizleyin.
- **Tekerlekler:** Haftalık kir kontrolü yapın; silikon yağ ile aksları yağlayın.
- **Frenler:** Aylık mekanizma kontrolü yapın.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler zor dönüyor	Akslarda kir birikimi	Tekerlekleri temizleyin, yağlayın
Frenler tutmuyor	Fren teli gevşemiş	Servise başvurun
Sandalye açılmıyor	Menteşe sıkışması	Zorlamayın, teknik destek alın
Klozet sabit durmuyor	Klozet yuvası gevşemiş	Yuvası kontrol edin, gerekirse sıkılaştırın
Ayaklık çıkmıyor	Mandallar sıkışmış	Mandalları nazikçe gevşetin, gerekirse yağlayın

9. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, çarpma, aşırı yükleme).
 - Uygunsuz bakım (suya maruz bırakma, aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlek yüzeyi, koltuk kumaşı, klozet, ayaklık mandalları vb.).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com