



CE

G750

Rigid Aktif Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / ISTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G750 Rigid Aktif Tekerlekli Sandalye ile aktif yaşam tarzına sahip bireylerin hareket kabiliyetini maksimum konfor ve bağımsızlıkla desteklemeyi hedefliyoruz. Hafif alüminyum alaşımlı şasesi ve ergonomik tasarımı ile bu sandalye, kullanıcıların günlük yaşamda özgürce hareket etmesini sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

G750 Rigid Aktif Tekerlekli Sandalye, aktif kullanıcılar için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir manuel tekerlekli sandalyedir. 10 kg ağırlığındaki alüminyum alaşımlı şase, 100 kg taşıma kapasitesi ile üstün performans sunar. 24" PNU arka tekerlekler ve 4" PU ön tekerlekler, iç ve dış mekanlarda mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. Ayarlanabilir oturma yeri genişliği (38-40-42 cm), sabit kolçaklar ve ayak koyma yerleri ile 40 cm sırtlık yüksekliği, kullanıcıya özel bir deneyim sunar. Refakatçi freni bulunmaz; sandalye, kullanıcının kendi gücüyle hareket etmesi için optimize edilmiştir. Emniyet kemeri, güvenliği artırır. G750, aktif bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek için ideal bir seçenektir.

Kullanım Amacı

G750, hareket kabiliyeti sınırlı ancak aktif bir yaşam tarzı sürdüren bireylerin manuel olarak hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif ve sağlam yapısıyla, günlük aktivitelerde bağımsızlık sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	38-40-42 cm
Oturma Yeri Derinliği	40 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	- (belirtilmemiş)
Oturma Yeri Açısı	-
Sırtlık Yüksekliği	40 cm
Kolçak Yüksekliği	-
Toplam Genişlik	57 cm
Toplam Yükseklik	73 cm
Toplam Uzunluk	81 cm
Katlanır Genişlik	-
Arka Tekerlekler	24" PNU
Ön Tekerlekler	4" PU
Materyal	Alüminyum Alaşım
Ürün Ağırlığı	10 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	100 kg
Koli Ölçüleri	81 x 61.5 x 75.5 cm
Konteyner Yük Adedi	20' DC: 88 / 40' DC: 180

3. Kutunun İindekiler

- G750 Rigit Aktif Tekerlekli Sandalye
 - Emniyet kemeri
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum iin alyan anahtar veya tornavida (varsa)
-

4. Gvenlik Uyarıları

- Maksimum tařıma kapasitesini (100 kg) ařmayın.
 - Sandalyeyi dz zeminlerde kullanın; eęimli alanlarda devrilme riski vardır.
 - Refakati freni bulunmadığından, sandalye yalnızca kullanıcının kontrolyle hareket eder; refakati varsa dikkatli olunmalıdır.
 - Emniyet kemerini her zaman doęru řekilde baęlayın; gevřek veya yanlış baęlanmış kemer dřme riski yaratır.
 - Hasta transferi sırasında bir refakati bulunmalıdır.
 - Kullanmadan nce tm vidaların sıkı olduęunu kontrol edin.
-

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan ıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu dz bir zeminde aın. Sandalyeyi dikkatle ıkarın ve tm paraları kontrol edin. ere ve, tekerlekler ve emniyet kemerinin kutuda olduęundan emin olun. Hasar varsa yetkili servise bařvurun.

Adım 2: Oturma Genişliğini Ayarlama

Oturma yeri genişliğini (38-40-42 cm) kullanıcının bedenine uygun şekilde ayarlayın. Ayar mekanizmasını kullanarak sabitleyin ve vidaları sıkılaştırın.

Adım 3: Emniyet Kemerini Takma

Emniyet kemerini sandalyenin bağlantı noktalarına sabitleyin ve kontrol edin.

Adım 4: Tekerlekleri Kontrol Etme

Arka (24" PNU) ve ön (4" PU) tekerleklerin 360° döndüğünü doğrulayın. Refakatçi freni olmadığından, tekerleklerin serbest hareket ettiğinden emin olun.

Adım 5: Son Kontrol

Tüm vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerlekler, emniyet kemeri, kolçaklar ve ayak koyma yerlerinin düzgün çalıştığını doğrulayın.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin. Oturma genişliğini (38-40-42 cm) kullanıcıya uygun şekilde ayarlayın. Sabit ayak koyma yerlerinin temiz ve sağlam olduğundan emin olun.

Adım 2: Hasta Transferi

Kullanıcıyı sandalyeye yerleştirin. Sabit kolçaklar arasında rahatça oturduğunu kontrol edin. Emniyet kemerini bağlayın ve sıkılığını ayarlayın. Ayakların sabit ayak koyma yerlerine düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Adım 3: Kullanım

- **Manuel Kullanım:** Kullanıcı, 24" PNU arka tekerlekleri elleriyle döndürerek sandalyeyi hareket ettirebilir. Aktif kullanıcılar için optimize edilmiştir.
- **Refakatçi ile Taşıma:** Refakatçi, arka tutma kollarıyla sandalyeyi itebilir. Fren olmadığından, sürekli kontrol gereklidir.

Adım 4: Depolama

Sandalye katlanabilir değildir. Kullanım sonrası kuru bir alanda saklayın. 10 kg ağırlığı ile kolayca taşınabilir ancak geniş bir depolama alanı gerekebilir.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; alüminyum alaşımlı şaseyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.
- **Ayak Koyma Yerleri:** Nemli bezle silin; sabit olduklarından emin olun.
- **Emniyet Kemer:** Nemli bezle silin; aşınma varsa değiştirin.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servise danışın.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Vidaları sıkılaştırın.
Emniyet kemeri gevşiyor	Bağlantı zayıf	Kemeri yeniden sabitleyin; arızalıysa değiştirin.

9. Ek Bilgiler

- **Depolama İpuçları:** Katlanabilir olmadığı için geniş bir alanda saklayın. Kuru bir ortamda muhafaza edin.
- **Güvenli Kullanım:** Refakatçi freni olmadığından, kullanıcı veya refakatçi her zaman dikkatli olmalı; dar alanlarda yavaş hareket edin.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (sandalye gövdesi için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım, yetkisiz tamir.

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com