



G540

Alüminyum Klozetli Banyo Sandalyesi

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G540 Alüminyum Klozetli Banyo Sandalyesi ile engelli, hasta ve yaşlı bireylerin banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Hafif alüminyum şasesi ve çıkarılabilir klozet kovası ile bu sandalye, hijyen ve kullanım kolaylığı sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

G540 Alüminyum Klozetli Banyo Sandalyesi, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir çözümdür. 6.90 kg ağırlığındaki alüminyum şase, 136 kg taşıma kapasitesi ile güvenli kullanım sağlar. 6" PVC arka tekerlekler ve 4" döner ön tekerlekler, iç mekanlarda kolay hareket kabiliyeti sunar. Sabit kolçaklar (20 cm yükseklik) ve sabit ayak koyma yerleri, kullanıcıyı destekler. Çıkarılabilir klozet kovası, tuvalet ve banyo kullanımı için pratiklik ve hijyen sağlar. G540, evde bakım ve kısa süreli sağlık ihtiyaçları için ideal bir seçenektir.

Kullanım Amacı

G540, engelli, hasta ve yaşlı bireylerin banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını refakatçi yardımıyla veya sınırlı bağımsızlıkla karşılamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif yapısı ve tekerlekli tasarımı, iç mekanlarda kolay taşıma ve kullanım sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	42.5 cm
Oturma Yeri Derinliği	37.5 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	50 cm
Sırtlık Yüksekliği	38 cm
Kolçak Yüksekliği	20 cm (sabit)
Toplam Genişlik	54 cm
Toplam Yükseklik	75 cm
Toplam Uzunluk	89-96 cm
Arka Tekerlekler	6" PVC
Ön Tekerlekler	4" Döner (Swivel)
Materyal	Alüminyum
Ürün Ağırlığı	6.90 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg
Koli Ölçüleri	55 x 23 x 88 cm
Konteyner Yük Adedi	20' DC: 166 / 40' DC: 400

3. Kutunun İçindekiler

- G540 Alüminyum Klozetli Banyo Sandalyesi (montaj gerektirebilir)
- Çıkarılabilir klozet kovası
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesini (136 kg) aşmayın.
- Sandalyeyi yalnızca düz zeminlerde kullanın; eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Fren sistemi bulunmadığından, sandalye hareket halindeyken refakatçi tarafından sabit tutulmalıdır.
- Sandalyeyi suya tamamen batırmayın; alüminyum şaseyi kuru tutun.
- Klozet kovasını takıp çıkarırken dikkatli olun; ellerinizi sıkıştırmaktan kaçının.
- Kullanıcıların sandalyeyi kendi başlarına kullanmasına izin vermeyin; refakatçi denetimi gereklidir.
- Hasta transferi sırasında mutlaka bir refakatçi bulunmalıdır.
- Tekerleklerin serbest hareket ettiğini her kullanımdan önce kontrol edin.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve, tekerlekler ve klozet kovasının kutuda olduğundan emin olun. Hasar varsa yetkili servise başvurun.

Adım 2: Tekerlekleri Kontrol Etme

Arka (6" PVC) ve ön (4" döner) tekerleklerin 360° döndüğünü doğrulayın. Tekerleklerin düzgün çalıştığından emin olun.

Adım 3: Klozet Kovasını Takma

Klozet kovasını oturma yerinin altındaki yuvalara yerleştirin. Sabitlendiğinden emin olun. Kullanılmadığında kovayı çıkararak sandalyeyi banyo koltuğu olarak kullanabilirsiniz.

Adım 4: Son Kontrol

Tüm vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerlekler, kolçaklar ve ayak koyma yerlerinin düzgün çalıştığını doğrulayın.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin. Klozet kovasını takın (tuvalet kullanımı için) veya çıkarın (banyo kullanımı için). Sabit ayak koyma yerlerinin temiz ve sağlam olduğundan emin olun.

Adım 2: Hasta Transferi

Refakatçi, kullanıcıyı sandalyeye yerleştirsin. Sabit kolçaklar arasında kullanıcının rahatça oturduğunu kontrol edin. Ayakların sabit ayak koyma yerlerine düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Adım 3: Taşıma

Refakatçi, sandalyeyi arka tutma kollarıyla yavaşça hareket ettirsin. Fren sistemi olmadığından, sandalye durdurulduğunda refakatçi tarafından sabit tutulmalıdır.

Adım 4: Klozet Kullanımı ve Temizlik

Tuvalet ihtiyacı için klozet kovasını kullanın. İşlem bittikten sonra kovayı çıkarın, boşaltın ve temizleyin. Kovayı tekrar yerine takmadan önce kuru olduğundan emin olun.

Adım 5: Depolama

Sandalye katlanabilir değildir. Kullanım sonrası kuru bir alanda saklayın. 6.90 kg ağırlığı ile kolayca taşınabilir.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; alüminyum şaseyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.
- **Klozet Kovası:** Her kullanımdan sonra boşaltın, sabunlu suyla yıkayın ve kurulayın.
- **Ayak Koyma Yerleri:** Nemli bezle silin; sabit olduklarından emin olun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönüyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servise danışın.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Vidaları sıkılaştırın.
Klozet kovası sabit durmuyor	Yuva hizası bozuk	Kovayı doğru yerleştirin; arızalıysa servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Depolama İpuçları:** Katlanabilir olmadığı için geniş bir alanda saklayın. Kuru bir ortamda muhafaza edin.
- **Güvenli Kullanım:** Refakatçi denetimiyle hareket ettirin; dar alanlarda yavaş hareket edin.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (sandalye gövdesi için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım, yetkisiz tamir.

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com