



PR-451

Diz Walkerı

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / ISTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Loco markamızla sunduğumuz PR-451 Diz Walkeri ile bacak yaralanması geçiren bireylerin, ameliyat sonrası hastaların veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin mobilite ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, hafif alüminyum gövdesi, 10" PU ön tekerlekler, 8" PU arka tekerlekler ve ayarlanabilir diz pedi ile pratik bir çözüm sunar. Dayanıklı yapısı ve fren sistemi ile kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-451 Diz Walkeri, bacak yaralanması geçiren bireyler, ameliyat sonrası hastalar veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir mobilite cihazıdır. 8.3 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, 10" PU ön tekerlekler ve 8" PU arka tekerlekler ile kolay manevra kabiliyeti sunar. Ayarlanabilir diz pedi, kullanıcının konforunu artırırken, elcik fren sistemi güvenli duruş ve kontrol sağlar. Katlanabilir tasarımı sayesinde taşınabilir ve depolanabilir. PR-451, iç mekan ve dış mekan kullanımı için uygundur ve genellikle yetişkinler için tasarlanmıştır (pediatrik kullanım için ek bilgi gerekebilir).

Kullanım Amacı

PR-451, kullanıcıların bacaklarını kullanmadan diz üzerinde hareket etmesini kolaylaştırmak ve günlük yaşamda bağımsızlıklarını artırmak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diz pedi ve yükseklik ayarı ile farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Tekerlekli tasarımı, kaymaz PU tekerleklerle zeminde stabilite sunar ve katlanabilir yapısı, taşıma ve depolama kolaylığı sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Arka Tekerlekler	8" PU
Ön Tekerlekler	10" PU
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	8.3 kg
Koli Ölçüleri	51.5 x 22 x 42.5 cm
Karton Adedi	1 Adet / Piece

3. Kutunun İçindekiler

- PR-451 Diz Walkeri (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Ayarlanabilir diz pedi
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum gövdeyi kurulaşın.
- Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
- Diz pedi ve yükseklik ayarını kullanıcının boyuna ve rahatlığına uygun şekilde yapın; yanlış ayar dengesizliğe neden olabilir.
- Elcik frenlerini her zaman kontrol edin; yanlış kullanım düşme riski yaratabilir.

- Maksimum ağırlık kapasitesine dikkat edin (tahmini 100 kg; kesin bilgi için ek kontrol yapın).
 - Kullanıcıyı desteklerken refakatçi dikkatli olmalıdır.
-

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin, tekerleklerin ve diz pedinin kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Ürün katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilitlendiğini duyduğunuzda (genellikle bir “klik” sesi çıkar) ürün düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

Adım 3: Yükseklik ve Diz Padi Ayarı Yapma

Yükseklik (tahmini 70–90 cm arasında) ve diz pedi pozisyonu kullanıcının boyuna ve rahatlığına uygun şekilde ayarlanabilir. Ayar mekanizmasını kullanarak istenen yüksekliği ve pedi sabitleyin. Ayar sırasında tüm bacakların ve pedin dengeli olduğundan emin olun.

Adım 4: Tekerlekleri Kontrol Etme

10" PU ön tekerlekler ve 8" PU arka tekerleklerin düzgün bir şekilde yerleştirildiğini ve aşınma olmadığını kontrol edin. Tekerleklerin zeminde kolayca hareket ettiğini ve kaymadığını test edin.

Adım 5: Fren Sistemini Kontrol Etme

Elcik frenlerini test edin. Frenleri sıkarak tekerleklerin hareket etmediğini doğrulayın; frenleri serbest bırakarak tekerleklerin döndüğünü kontrol edin.

Adım 6: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Ürünü sallayarak sabitliği test edin. Yükseklik ayarı, diz pedi, tekerlekler ve frenlerin düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Yükseklik ayarını (tahmini 70–90 cm) ve diz pedi pozisyonunu kullanıcının boyuna ve rahatlığına göre yapın. Tekerleklerin zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Yürüme Desteği Kullanımı

Kullanıcı, sağlıklı bacağına yere koyarak ve yaralı bacağına diz pedi üzerine yerleştirerek ürünü kullanmaya başlasın. Elciklere tutunarak ürünü ileri doğru hareket ettirin. Yürürken yavaş ve dengeli adımlar atın. Elcik frenlerini gerektiğinde kullanarak durun veya yavaşlayın.

Adım 3: Katlama ve Taşıma

Ürünü katlamak için yan çerçeveleri içe doğru kapatın. Katlanmış ürünü (8.3 kg) kolayca taşıyın veya depolama alanına yerleştirin.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum gövdeyi kurulaşın.
- **Diz Padi:** Diz pedini nemli bezle silin; gerekirse elde yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Aşınma varsa değiştirin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-451 Diz Walkeri ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler kayıyor	Tekerlekler aşınmış	Tekerlekleri kontrol edin; aşınma varsa yenisiyle değiştirin.
Diz pedi rahatsız	Ayar yanlış veya ped aşınmış	Diz pedini kontrol edin; ayarını düzeltin veya aşınma varsa değiştirin.
Yükseklik ayarı değişmiyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazikçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Ürün sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Frenler çalışmıyor	Fren mekanizması aşınmış veya kirlenmiş	Frenleri temizleyin; aşınma varsa servise başvurun.
Alüminyum gövdede korozyon	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulaşın ve etkilenen bölgeleri temizleyin; servise danışın.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Katlanabilir tasarım sayesinde ürünü kolayca taşıyın ve depolayın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi korozyona karşı koruyun. 10" ön ve 8" arka PU tekerlekler, iç ve dış mekanlarda manevra kolaylığı sağlar.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Diz pedi ve yükseklik ayarını kullanıcıya uygun şekilde yapın. Elcik frenlerini her kullanımda kontrol edin. Refakatçi desteğiyle ilk kullanımları yapın.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum gövdeyi nemden koruyarak korozyonu önleyin. Tekerleklerin, frenlerin ve diz pedinin düzenli bakımını yapın.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, diz pedi).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com