



CE

G124E

Multi-fonksiyonel Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G124E Multi-Fonksiyonel Tekerlekli Sandalye ile engelli bireylerin hareket özgürlüğünü ve konforunu artırmayı hedefliyoruz. Çelik şasesi, katlanabilir tasarımı ve çok yönlü kullanım özellikleriyle bu ürün, pratik bir mobilite çözümü sunar. Ayarlanabilir sırtlık yüksekliği ve dayanıklı yapısı, farklı ihtiyaçlara uyum sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

G124E Multi-Fonksiyonel Tekerlekli Sandalye, engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış, dayanıklı ve çok amaçlı bir mobilite çözümüdür. 21.70 kg ağırlığındaki çelik şase, 120 kg taşıma kapasitesi ile güvenli kullanım sağlar. Katlanabilir tasarımı (katlanır genişlik 27.5 cm), 24" PU arka tekerlekler ve 8" PU ön tekerlekler sayesinde dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sunar. 45 cm oturma yeri genişliği ve derinliği ile 44-73 cm ayarlanabilir sırtlık yüksekliği, ergonomik bir oturma pozisyonu sağlar. Hastaneler, evler veya rehabilitasyon merkezleri için ideal bir seçenektir.

Kullanım Amacı

G124E, engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin günlük yaşamda bağımsız hareket etmelerini veya bir refakatçi yardımıyla güvenli ve rahat bir şekilde taşınmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir sırtlık yüksekliği, farklı oturma pozisyonlarına uyum sağlar; katlanabilir yapısı ise seyahat ve depolama kolaylığı sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	45 cm
Oturma Yeri Derinliği	45 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	52.5 cm
Sırtlık Yüksekliği	44-73 cm
Kolçak Yüksekliği	23 cm (sabit)
Toplam Genişlik	62.5 cm
Toplam Yükseklik	119 cm
Toplam Uzunluk	130 cm
Katlanır Genişlik	27.5 cm
Arka Tekerlekler	24" PU
Ön Tekerlekler	8" PU
Materyal	Çelik
Ürün Ağırlığı	21.70 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	120 kg
Koli Ölçüleri	96.5 x 31 x 87 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC: 108 / 40'DC: 250

3. Kutunun İçindekiler

- G124E Multi-Fonksiyonel Tekerlekli Sandalye (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Çıkarılabilir ayak paletleri (varsa)
- Ayarlanabilir sırtlık mekanizması
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 120 kg yük kapasitesini aşmayın.
 - Sandalyeyi yalnızca düz zeminlerde kullanın; eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
 - Refakatçi freni kontrol edilmeden sandalyeyi hareket ettirmeyin.
 - Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; çelik şaseyi kuru tutun.
 - Çıkarılabilir ayak paletlerini takarken dikkatli olun; parmakları sıkıştırmaktan kaçının.
 - Kullanıcıların sandalyeyi kendi başlarına kullanmadan önce refakatçi yardımı alması önerilir.
 - Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
 - Sandalyeyi kullanıcının fiziksel ölçülerine uygun şekilde ayarlayın; yanlış ayarlar rahatsızlığa neden olabilir.
-

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve, tekerlekler, ayak paletleri ve sırtlık mekanizmasının kutuda olduğundan emin olun. Hasarlı parça varsa yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye katlanmış halde gelir (katlanır genişlik 27.5 cm). Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı bastırın. Yan çerçeveleri dışa çekin; "klik" sesiyle çerçevenin kilitlendiğini kontrol edin.

Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme

Arka (24" PU) ve ön (8" PU) tekerleklerin 360° döndüğünü ve refakatçi freninin çalıştığını doğrulayın. Freni sıkarak tekerleklerin kilitlendiğinden emin olun.

Adım 4: Ayak Paletlerini Takma (Varsa)

Ayak paletlerini ön yuvalara hizalayın ve itin; "klik" sesiyle sabitlendiğini kontrol edin. Kullanıcıya uygun ayar yapın; çıkarmak için paletleri çekerek ayırın.

Adım 5: Sırtlık Yüksekliğini Ayar Yapma

Sırtlık yüksekliği 44-73 cm arasında ayarlanabilir. Mekanizmayı kullanarak istenen seviyeye getirin ve sabitleyin.

Adım 6: Son Kontrol

Tüm vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerlekler, frenler, sırtlık ayarı ve ayak paletlerinin düzgün çalıştığını doğrulayın.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin. Refakatçi frenini kontrol edin. Ayak paletlerini ve sırtlık yüksekliğini (44-73 cm) kullanıcının konforuna göre ayarlayın.

Adım 2: Kullanıcıyı Sandalyeye Yerleştirme

Ayak paletlerini çıkarın (gerekirse). Refakatçi, kullanıcıyı sandalyeye yerleştirsin. Paletleri takın ve pozisyonu kontrol edin.

Adım 3: Refakatçi ile Taşıma

Freni serbest bırakın. Arka tutma kollarıyla sandalyeyi yavaşça itin. Durmak için freni kilitleyin.

Adım 4: Katlama ve Taşıma

Ayak paletlerini çıkarın. Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın (katlanır genişlik 27.5 cm). Katlanmış sandalyeyi taşıyın veya araç bagajına yerleştirin.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; çelik şaseyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin, frenleri kontrol edin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönmüyor	Fren kilitli	Freni serbest bırakın.
Sandalye katlanmıyor	Çerçeve kilitlenmış	Kilidi kontrol edin ve tekrar deneyin.
Ayak paletleri sabit değil	Yuva hizası bozuk	Paletleri çıkarın, yuvayı temizleyin, tekrar takın.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Vidaları sıkılaştırın.
Sırtlık ayarı değişmiyor	Mekanizma arızalı	Mekanizmayı kontrol edin; arızalıysa servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama:** Katlanır tasarımıyla (27.5 cm) araç bagajına kolayca sığar. Kuru bir alanda saklayın.
- **Güvenli Kullanım:** Refakatçi freni her zaman kullanılabilir olmalı; dar alanlarda yavaş hareket edin.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (sandalye gövdesi için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım, yetkisiz tamir.

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com