



Golfi

CE

G125

Katlanır Klozetli Banyo Sandalyesi

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G125 Katlanır Klozetli Banyo Sandalyesi ile engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Çelik şasesi, katlanabilir tasarımı ve klozet uyumluluğuyla bu ürün, pratik bir çözüm sunar. Dayanıklı yapısı ve ergonomik tasarımı, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun kullanım sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

G125 Katlanır Klozetli Banyo Sandalyesi, engelli bireyler veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, dayanıklı ve işlevsel bir banyo yardımcısıdır. 11.98 kg ağırlığındaki çelik şase, 100 kg taşıma kapasitesi ile güvenli kullanım sağlar. Katlanabilir tasarımı (katlanır genişlik 20.5 cm) ve 5" PU tekerlekler, banyo gibi dar alanlarda manevra kolaylığı sunar. 45 cm oturma yeri genişliği, 43 cm derinliği, 37 cm sırtlık yüksekliği ve 23 cm sabit kolçak yüksekliği ile kullanıcı konforu ön plandadır. G125, klozetle uyumlu yapısıyla banyo ve tuvalet kullanımı için idealdir.

Kullanım Amacı

G125, engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde veya refakatçi yardımıyla karşılamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Katlanabilir yapısı, hem ev hem de sağlık kuruluşlarında pratiklik ve depolama kolaylığı sunar. Çelik şase, dayanıklılık ve güvenlik sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	45 cm
Oturma Yeri Derinliği	43 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	51 cm
Sırtlık Yüksekliği	37 cm
Kolçak Yüksekliği	23 cm (sabit)
Toplam Genişlik	60 cm
Toplam Yükseklik	89 cm
Toplam Uzunluk	87 cm
Katlanır Genişlik	20.5 cm
Arka Tekerlekler	5" PU
Ön Tekerlekler	5" PU
Materyal	Çelik / Steel
Ürün Ağırlığı	11.98 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	100 kg
Koli Ölçüleri	56 x 32 x 52 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC: 300 / 40'DC: 698

3. Kutunun İçindekiler

- G125 Katlanır Klozetli Banyo Sandalyesi (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 100 kg yük kapasitesini aşmayın.
 - Sandalyeyi yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
 - Refakatçi freni kontrol edilmeden sandalyeyi hareket ettirmeyin.
 - Sandalyeyi suya uzun süre maruz bırakmayın; çelik şaseyi kurulaşın.
 - Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
 - Kullanıcıların sandalyeyi kendi başlarına kullanmadan önce refakatçi yardımı alması önerilir.
 - Sandalyeyi klozetle uyumlu şekilde yerleştirin; yanlış kullanım düşme riski yaratabilir.
-

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve ve tekerleklerin kutuda olduğundan emin olun. Hasarlı parça varsa yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye katlanmış halde gelir (katlanır genişlik 20.5 cm). Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı bastırın. Yan çerçeveleri dışa çekin; "klik" sesiyle çerçevenin kilitlendiğini kontrol edin.

Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme

Arka ve ön tekerleklerin (5" PU) 360° döndüğünü ve refakatçi freninin çalıştığını doğrulayın. Freni sıkarak tekerleklerin kilitlendiğinden emin olun.

Adım 4: Klozet Uyumu Kontrolü

Sandalyeyi klozet üzerine yerleştirin. Oturma yerinin (45 cm genişlik, 43 cm derinlik) klozetle hizalandığından ve sabit olduğundan emin olun. Tekerleklerin hareketi engellemediğini kontrol edin.

Adım 5: Son Kontrol

Tüm vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerlekler ve frenlerin düzgün çalıştığını doğrulayın.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalyeyi düz ve kaymaz bir zemine yerleştirin. Refakatçi frenini kontrol edin. Sandalyeyi klozet üzerine hizalayın.

Adım 2: Kullanıcıyı Sandalyeye Yerleştirme

Refakatçi, kullanıcıyı sandalyeye yerleştirsin. Kullanıcının rahatça oturduğunu kontrol edin.

Adım 3: Refakatçi ile Kullanım

Freni serbest bırakın. Arka tutma kollarıyla sandalyeyi yavaşça hareket ettirin. Kullanım bittikten sonra freni kilitleyin.

Adım 4: Katlama ve Depolama

Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın (katlanır genişlik 20.5 cm). Katlanmış sandalyeyi (11.98 kg) taşıyın veya kuru bir alanda depolayın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; çelik şaseyi kurulaşın.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin, frenleri kontrol edin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönüyor	Fren kilitli	Freni serbest bırakın.
Sandalye katlanmıyor	Çerçeve kilitlenmiş	Kilidi kontrol edin ve tekrar deneyin.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Vidaları sıkılaştırın.
Tekerlekler gıcırıyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servise danışın.
Klozetle uyumsuzluk	Yanlış hizalama	Sandalyeyi klozetle yeniden hizalayın.

9. Ek Bilgiler

- **Depolama İpuçları:** Katlanır tasarımıyla (20.5 cm) küçük alanlara kolayca sığar. Kuru bir alanda saklayın.
- **Güvenli Kullanım:** Refakatçi freni her zaman kullanılabilir olmalı; kaygan zeminlerde yavaş hareket edin.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (sandalye gövdesi için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım, yetkisiz tamir.

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com