



CE

G105

Transfer Sandalyesi

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



G105 Transfer Sandalyesi, engelli, hasta ve yaşlı bireyler için tasarlanmış, dayanıklı ve işlevsel bir mobilite çözümdür. 13.50 kg ağırlığındaki çelik şase, 120 kg taşıma kapasitesi ile güvenli kullanım sağlar. Katlanabilir gövde yapısı (katlanır genişlik 28 cm), 16" PU arka tekerlekler ve 8" PVC ön tekerlekler ile transfer ve depolama işlemlerini kolaylaştırır. Refakatçi freni ve çıkarılabilir ayak koyma yerleri ile donatılmış bu sandalye, yalnızca refakatçi tarafından kullanım için uygundur. Hareketli kolçaklar (sabit 26 cm yükseklik) transferi kolaylaştırırken, baldır kısmındaki kumaş destek kullanıcı konforunu artırır. G105, hastaneler, evler ve kısa süreli seyahat senaryolarında ideal bir taşıma çözümü sunar.

Kullanım Amacı

G105, hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin bir noktadan diğerine (örneğin yatak, araba veya banyo) refakatçi yardımıyla güvenli ve rahat bir şekilde taşınmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Katlanabilir yapısı, iç ve dış mekanlarda pratik bir mobilite çözümü sunarken, refakatçi kontrolüyle güvenliği ön planda tutar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	45 cm
Oturma Yeri Derinliği	39 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	44 cm
Sırtlık Yüksekliği	42 cm
Kolçak Yüksekliği	26 cm (sabit)
Toplam Genişlik	58 cm
Toplam Yükseklik	88 cm
Toplam Uzunluk	89 cm
Katlanır Genişlik	28 cm
Arka Tekerlekler	16" PU

Özellik	Detay
Ön Tekerlekler	8" PVC
Materyal	Çelik / Steel
Ürün Ağırlığı	13.50 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	120 kg
Koli Ölçüleri	74 x 23 x 72 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC: 230 / 40'DC: 550

3. Kutunun İçindekiler

- G105 Transfer Sandalyesi (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Çıkarılabilir ayak koyma yerleri
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesini (120 kg) aşmayın.
- Sandalyeyi yalnızca düz zeminlerde kullanın; eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Refakatçi freni kontrol edilmeden sandalyeyi hareket ettirmeyin.
- Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; çelik şaseyi kuru tutun.
- Ayak koyma yerlerini takarken veya çıkarırken dikkatli olun; parmakları sıkıştırmaktan kaçının.
- Kullanıcıların sandalyeyi kendi başlarına kullanmasına izin vermeyin; yalnızca refakatçi tarafından kullanılmalıdır.
- Hasta transferi sırasında mutlaka bir refakatçi bulunmalıdır.
- Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.

- Baldır desteğinin temiz ve sağlam olduğundan emin olun; yırtık varsa kullanmadan önce onarın.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve, tekerlekler ve ayak koyma yerlerinin kutuda olduğundan emin olun. Baldır desteğindeki kumaş malzemeyi kontrol edin; hasar varsa yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye katlanmış halde gelir (katlanır genişlik 28 cm). Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı bastırın. Yan çerçeveleri dışa çekin; "klik" sesiyle çerçevenin kilitletiğini kontrol edin.

Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme

Arka (16" PU) ve ön (8" PVC) tekerleklerin 360° döndüğünü ve refakatçi freninin çalıştığını doğrulayın. Freni sıkarak tekerleklerin kilitletiğinden emin olun.

Adım 4: Ayak Koyma Yerlerini Takma

Ayak koyma yerlerini sandalyenin sabit ayak kısmındaki yuvalara hizalayın ve itin; "klik" sesiyle sabitlendiğini kontrol edin. Çıkarmak için hafifçe çekerek ayırın. Baldır desteğinin kumaşının gergin ve düzgün olduğundan emin olun.

Adım 5: Kolçakları Kontrol Etme

Hareketli kolçakların (sabit 26 cm yükseklik) yukarı kaldırılıp indirilebildiğini test edin; bu özellik transferi kolaylaştırır. Gevşeklik varsa vidaları sıkılaştırın.

Adım 6: Son Kontrol

Tüm vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerlekler, frenler, ayak koyma yerleri, baldır desteği ve kolçakların düzgün çalıştığını doğrulayın.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin. Refakatçi frenini kontrol edin. Ayak koyma yerlerini takın ve baldır desteğinin düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

Adım 2: Hasta Transferi

Hareketli kolçakları kaldırın ve ayak koyma yerlerini çıkarın (gerekirse). Refakatçi, kullanıcıyı sandalyeye yerleştirin. Kullanıcının baldırları kumaş desteğe yaslanacak şekilde oturmasını sağlayın. Kolçakları indirin ve ayak koyma yerlerini takın.

Adım 3: Refakatçi ile Taşıma

Freni serbest bırakın. Refakatçi, arka tutma kollarıyla sandalyeyi yavaşça hareket ettirsin. Durmak için freni kilitleyin.

Adım 4: Katlama ve Depolama

Ayak koyma yerlerini çıkarın. Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın (katlanır genişlik 28 cm). Katlanmış sandalyeyi (13.50 kg) taşıyın veya kuru bir alanda depolayın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; çelik şaseyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin, frenleri kontrol edin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.
- **Ayak Koyma Yerleri:** Nemli bezle silin; çıkarılabilir mekanizmayı kontrol edin.
- **Baldır Desteği:** Kumaş yüzeyi nemli bezle temizleyin; yırtık varsa onarın veya değiştirin.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönmüyor	Fren kilitli	Freni serbest bırakın.
Sandalye katlanmıyor	Çerçeve kilitlenmiş	Kilidi kontrol edin ve tekrar deneyin.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Vidaları sıkılaştırın.
Tekerlekler gıcırdıyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servise danışın.
Kolçaklar hareket etmiyor	Mekanizma sıkışmış	Mekanizmayı temizleyin; arızalıysa servise başvurun.
Baldır desteği yırtılıyor	Aşırı yük veya aşınma	Kumaşı onarın veya servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama:** Katlanır tasarımıyla (28 cm) küçük alanlara kolayca sığar. Kuru bir alanda saklayın.
- **Güvenli Kullanım:** Refakatçi freni her zaman kullanılabilir olmalı; dar alanlarda yavaş hareket edin. Baldır desteğinin kullanıcıya uygun olduğundan emin olun.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (sandalye gövdesi için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım, yetkisiz tamir.

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com