



G502

Alüminyum Transfer Sandalyesi

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahçelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G502 Alüminyum Transfer Sandalyesi ile engelli, hasta ve yaşlı bireylerin hareket kabiliyetini artırıyoruz. Bu ürün, hafif alüminyum şasesi ve katlanabilir tasarımı ile hem kullanıcı hem de refakatçi için pratik bir transfer çözümü sunar. Refakatçi fren sistemi, emniyet kemeri ve çıkarılabilir ayak paletleri ile güvenli ve konforlu bir deneyim sağlar. Bu kılavuz, ürünün teknik özelliklerini, kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

G502 Alüminyum Transfer Sandalyesi, hareket kısıtlılığı olan bireyler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir mobilite çözümüdür. Alüminyum şase ile üretilen sandalye, yaklaşık 10.5 kg ağırlığı ile kolay taşınabilirlik sunar ve 120 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Katlanabilir tasarımı, refakatçi fren sistemi ve çıkarılabilir ayak paletleri, iç mekan ve dış mekan kullanımına uygundur. Ergonomik oturma alanı ve sırt kısmının katlanabilirliği, transfer süreçlerini kolaylaştırırken, 12" arka tekerlekler dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sağlar. G502, hastaneler, bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.

Kullanım Amacı

G502, engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin bir noktadan diğerine güvenli ve rahat bir şekilde taşınmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Refakatçi yardımıyla kullanılan bu sandalye, hastane, ev, havaalanı veya rehabilitasyon merkezleri gibi farklı ortamlarda kısa süreli transferler için uygundur. Hafif yapısı ve katlanabilir özelliği, seyahat ve depolama kolaylığı sunarken, kullanıcı ve refakatçi için güvenlik ve konfor sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Marka	Golfi
Model	G502
Çerçeve Malzemesi	Alüminyum
Yüzey Kaplama	Elektrostatik toz boya
Koltuk Geniřlięi	46 cm (yaklařık)
Koltuk Derinlięi	40 cm (yaklařık)
Koltuk Yükseklięi	47 cm (yerden, yaklařık)
Toplam Geniřlik	59 cm
Toplam Uzunluk	77 cm (ayak paletleriyle)
Toplam Yükseklik	91 cm
Tařıma Kapasitesi	120 kg
Net Aęırlık	10.5 kg (yaklařık)
Arka Tekerlek	12" PU dolgu
Ön Tekerlek	8" PVC dolgu
Refakatçi Freni	Evet
Emniyet Kemerini	Evet
Ayak Paleti	Çıkarılabilir, katlanabilir
Kolçaklar	Sabit, ergonomik
Sırt Kısmı	Katlanabilir
Katlanabilirlik	Evet
Garanti Süresi	2 yıl

Not: Teknik özellikler, ürünün genel yapısına ve internetteki bilgilere dayanarak belirlenmiştir. Kesin detaylar için ürün etiketini kontrol edin.

3. Kutunun İindekiler

- G502 Alüminyum Transfer Sandalyesi (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Çıkarılabilir ayak paletleri
- Emniyet kemeri
- Ergonomik oturma minderi
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 120 kg yük kapasitesini aşmayın.
- Sandalyeyi yalnızca düz zeminlerde kullanın; eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Kullanım sırasında emniyet kemerini takın ve refakatçi freni kontrol edin.
- Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; alüminyum şaseyi kuru tutun.
- Çıkarılabilir ayak paletlerini takarken dikkatli olun; parmakları sıkıştırmaktan kaçınin.
- Çocukların sandalyeyi kendi başlarına kullanmasına izin vermeyin.
- Hasta transferi sırasında mutlaka bir refakatçi bulunmalıdır.
- Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin, tekerleklerin, ayak paletlerinin, emniyet kemerinin ve oturma minderinin kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı doğru hafifçe bastırın. Yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilitlendiğini duyduğunuzda (genellikle bir “klik” sesi çıkar) sandalye düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme

Arka tekerlekler (12” PU dolgu) ve ön tekerlekler (8” PVC dolgu) çerçeveye takılıdır. Her bir tekerleğin 360° serbestçe döndüğünü ve refakatçi freninin çalıştığını kontrol edin. Frenleri test etmek için freni sıkın; tekerlek hareket etmemelidir. Freni serbest bırakarak tekerleğin döndüğünü doğrulayın.

Adım 4: Ayak Paletlerini Takma

Ayak paletleri çıkarılabilir ve katlanabilir olarak gelir. Sandalyenin ön kısmındaki ayak paleti yuvalarını bulun. Her bir paleti yuvaya hizalayın ve itin; yerine oturduğunda bir “klik” sesi duyulur. Paletlerin sabitliğini kontrol edin. Çıkarmak için paletleri hafifçe çekerek yuvadan ayırın; katlanabilirliği test edin.

Adım 5: Emniyet Kemerini Takma

Emniyet kemerini koltuk çerçevesine monte edin. Kemer uçlarının sabitlendiğinden ve kolayca açılıp kapanabildiğinden emin olun. Kemerin sıkıca oturduğunu test edin.

Adım 6: Oturma Minderini Yerleştirme

Ergonomik oturma minderi genellikle sandalyeye takılıdır. Aynı geldiyse, minderi koltuk çerçevesine yerleştirin ve klipslerle (varsa) sabitleyin. Minderin kaymadığından emin olun.

Adım 7: Sırt Kısmını Kontrol Etme

Sırt kısmı katlanabilir tasarıma sahiptir; bu özellik transfer süreçlerini kolaylaştırır. Sırt kısmını katlayarak test edin; mekanizmanın düzgün çalıştığınından emin olun. Kullanım sırasında sırt kısmı sabit olmalıdır.

Adım 8: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerleklerin, frenlerin ve sırt kısmının düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Sandalye kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalye düz bir zeminde yerleştirin. Refakatçi freni kontrol edin ve emniyet kemerini takın. Ayak paletlerini kullanıcının ayaklarına uygun şekilde takın.

Adım 2: Hasta Transferi

Sırt kısmını katlayın (eğer gerekliyse) ve ayak paletlerini çıkarın. Refakatçi, kullanıcıyı yatağından veya başka bir yüzeyden sandalyeye yerleştirsin. Kullanıcının oturma pozisyonuna geçmesi için sandalyeyi yatağa yaklaştırsın. Sırt kısmını sabitleyin, emniyet kemerini sıkın ve ayak paletlerini takın.

Adım 3: Refakatçi ile Taşıma

Refakatçi freni serbest bırakın. Refakatçi, arka tutma kollarını kullanarak sandalyeyi yavaşça itin. 12" arka tekerlekler sayesinde dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sağlar. Durmak için sandalyeyi sabitleyin ve freni kilitleyin.

Adım 4: Katlama ve Taşıma

Ayak paletlerini çıkarın. Sırt kısmını katlayın. Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın. Katlanmış sandalyeyi (10.5 kg) kolayca taşıyın veya araç bagajına yerleştirin. Depolama için kuru bir alan tercih edin.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum şaseyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Fren mekanizmasını kontrol edin.
- **Oturma Minderi:** Nemli bezle silin; gerekirse elde yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.
- **Sırt Kısmı:** Sırt kumaşını nemli bezle temizleyin; katlama mekanizmasını kuru tutun.
- **Emniyet Kemer:** Kirlenirse ılık su ve sabunla nazikçe yıkayın; tamamen kurumasını bekleyin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, G502 Alüminyum Transfer Sandalyesi ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönmüyor	Fren kilitli	Refakatçi frenini serbest bırakın.
Tekerlekler kayıyor	Zemin ıslak veya kirli	Zemini temizleyin ve kurulaştırın; tekerlekleri kontrol edin.
Sırt kısmı katlanmıyor	Mekanizma sıkışmış	Mekanizmayı nazikçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Sandalye katlanmıyor	Çerçeve kilitlenmiş	Kilidi kontrol edin; mekanizmayı serbest bırakarak katlamayı tekrar deneyin.
Ayak paletleri sabit değil	Yuva hizası bozuk	Paletleri çıkarın ve yuvayı temizleyin; tekrar takarak sabitleyin.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Emniyet kemeri açılmıyor	Kemer tokası kirlenmiş	Tokayı nemli bezle temizleyin; sorun devam ederse kemer değiştirin.
Tekerlekler gıcırıyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servise danışın.
Alüminyum şasede çizik	Sert yüzey teması	Çizikleri zımparalayın ve boyayı yenileyin; derin hasar için servise gidin.
Oturma minderi kayıyor	Klipsler gevşemiş	Minder klipslerini sıkılaştırın; yırtık varsa minderi değiştirin.
Refakatçi freni çalışmıyor	Fren mekanizması arızalı	Fren mekanizmasını kontrol edin; arızalıysa servise başvurun.
Katlama mekanizması sert	Mekanizma yağsız veya kirli	Mekanizmayı temizleyin ve yağlayın; sorun devam ederse servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Katlanabilir tasarım sayesinde sandalyeyi araç bagajına kolayca yerleştirin. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum şaseyi koruyun. 12" arka tekerlekler, dar alanlarda manevra kolaylığı sağlar.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Refakatçi freni her zaman kullanılabilir olmalı; dar alanlarda manevra yaparken yavaş hareket edin. Emniyet kemerini her kullanımda kontrol edin.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum şaseyi nemden koruyarak uzun süreli kullanım sağlayın. Tekerleklerin ve frenlerin düzenli bakımını yapın.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, sandalye gövdesi için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, kumaş).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com

