



CE

G570

Elektrikli Klozetli Transfer Sandalyesi

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G570 Elektrikli Klozetli Transfer Sandalyesi ile hareket kısıtlılığı olan bireylerin yaşamını kolaylaştırıyoruz. Bu ürün, elektrikli yükseklik ve eğim ayarı ile banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını güvenli, konforlu ve pratik bir şekilde karşılamayı hedefleyen yenilikçi bir modeldir. Bu kılavuz, ürünün teknik özelliklerini, kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

G570 Elektrikli Klozetli Transfer Sandalyesi, yatalak hastalar, yaşlılar veya hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, çok yönlü bir banyo ve tuvalet çözümdür. Paslanmaz çelik şasesi ile sağlam ve uzun ömürlü bir yapı sunar; 120 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Elektrikli yükseklik ve eğim ayarı, kullanıcıların sandalyeyi kolayca pozisyonlandırmasını sağlar. Çıkarılabilir klozet kovası, ergonomik oturma minderi, kilitlenebilir tekerlekler ve ayarlanabilir ayak paletleri ile donatılmıştır. İki yana açılabilir sırt kısmı, hasta transferini kolaylaştırırken, geniş oturma alanı ve konforlu kolçaklar uzun süreli kullanımlarda üst düzey konfor sağlar.

Kullanım Amacı

G570, hareket kısıtlılığı olan bireylerin banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde veya refakatçi yardımıyla karşılamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Elektrikli yükseklik ve eğim ayarı, hasta transferini kolaylaştırır ve klozet uyumluluğu ile tuvalet üzerinde veya yerinde kullanım imkanı sunar. Ayrıca, ergonomik tasarımı ile hem kullanıcıya hem de bakıcıya maksimum kolaylık sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Marka	Golfi
Model	G570
Çerçeve Malzemesi	Paslanmaz çelik şase
Yüzey Kaplama	Elektrostatik toz boya
Koltuk Geniřliđi	45-50 cm (yaklaşık)
Koltuk Derinliđi	40-45 cm (yaklaşık)
Koltuk Yüksekliđi	50-75 cm (elektrikli ayarlı)
Toplam Geniřlik	55-60 cm
Toplam Uzunluk	95-100 cm (ayak paletleriyle)
Toplam Yükseklik	90-100 cm
Tařıma Kapasitesi	120 kg
Net Ađırlık	20 kg (yaklaşık)
Tekerlekler	5" PVC, 360° döner, kilitlenebilir
Klozet Kovası	Çıkarılabilir, plastik
Ayak Paleti	Ayarlanabilir, katlanabilir
Sırt Kısmı	İki yana açılabilir, eğim ayarlı
Kollar	Ergonomik, sabit
Elektrikli Sistem	Yükseklik ve eğim ayarı, 24V batarya
Şarj Süresi	6-8 saat
Garanti Süresi	2 yıl (batarya hariç)

Not: Teknik özellikler, ürünün genel yapısına ve internetteki bilgilere dayanarak belirlenmiştir. Kesin detaylar için ürün etiketini kontrol edin.

3. Kutunun İindekiler

- G570 Elektrikli Klozetli Transfer Sandalyesi (montaj gerektirebilir)
 - ıkarılabilir klozet kovası (plastik)
 - Elektrikli kontrol paneli (kablolu, sađ yan kola monte)
 - 24V bataryaya (entegre, řarj cihazı ile)
 - řarj cihazı (100–240V giriř, 24V ıkıř)
 - Ayak paletleri (ayarlanabilir, katlanabilir)
 - Ergonomik oturma minderi
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum iin alyan anahtar veya tornavida (varsa)
-

4. Gvenlik Uyarıları

- Maksimum 120 kg yk kapasitesini ařmayın.
- Sandalyeyi yalnızca dz zeminlerde kullanın; eđimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Elektrikli sistemi kullanmadan nce bataryanın řarj seviyesini kontrol edin.
- Kullanım sırasında tm tekerleklerin kilitlerini kapatın.
- Klozet kovasındaki atıkları dzenli olarak bořaltın ve temizleyin; hijyenik kullanım sađlayın.
- Sandalyeyi suya tamamen batırmayın; nemli ortamlarda kullanıma uygun olsa da elektrikli bileřenleri kuru tutun.
- ocukların sandalyeyi kullanmasına izin vermeyin.
- Hasta transferi sırasında mutlaka bir refakati bulunmalıdır.
- řarj cihazını ve bataryayı nemden koruyun; řarj sırasında sandalyeyi kullanmayın.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin, tekerleklerin, klozet kovanının, elektrikli kontrol panelinin, bataryanın (entegre), ayak paletlerinin, oturma minderinin ve şarj cihazının kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye genellikle montajlı gelir. Ancak katlanmışsa, oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı doğru hafifçe bastırın. Yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilitletiğini duyduğunuzda (genellikle bir "klik" sesi çıkar) sandalye düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme

Tekerlekler (5" PVC, kilitlenebilir) çerçeveye takılıdır. Her bir tekerleğin 360° serbestçe döndüğünü ve kilitlerin çalıştığını kontrol edin. Kilitleri test etmek için tekerlek üzerindeki kilit mandalını aşağı bastırın; tekerlek hareket etmemelidir. Kilit mandalını yukarı kaldırdığınızda tekerlek serbestçe dönmelidir.

Adım 4: Ayak Paletlerini Takma ve Ayar Yapma

Ayak paletleri ayarlanabilir ve katlanabilir olarak gelir. Sandalyenin ön kısmındaki ayak paleti yuvalarını (genellikle iki metal boru) bulun. Her bir paleti yuvaya hizalayın ve itin; yerine oturduğunda bir "klik" sesi duyulur. Paletlerin sabitliğini kontrol edin. Kullanıcı boyuna göre yüksekliği ayarlamak için palet altındaki vidaları gevşetin, paleti kaydırarak uygun konuma getirin ve vidaları sıkın. Paletlerin katlanabilirliğini test edin.

Adım 5: Klozet Kovanını Takma

Çıkarılabilir klozet kovasını sandalyenin alt kısmındaki yuvaya hizalayın. Kovanın oturma minderinin hemen altına yerleştirildiğinden emin olun. Kovanın sabitlendiğini kontrol edin; kayma veya oynama olmamalıdır. Klozet kovasını çıkarmak için iki yandan hafifçe çekerek yuvadan ayırın.

Adım 6: Oturma Minderini Yerleştirme

Ergonomik oturma minderi genellikle sandalyeye takılıdır. Aynı geldiye, minderi koltuk çerçevesine yerleştirin ve klipslerle (varsa) sabitleyin. Minderin kaymadığından ve klozet kovasının üzerine düzgün oturduğundan emin olun.

Adım 7: Sırt Kısmını Kontrol Etme

Sırt kısmı iki yana açılabilir ve eğim ayarlıdır. Sırt kısmının iki yana açılıp kapanabildiğini test edin; açma/kapama mekanizmasının düzgün çalıştığından emin olun. Kapanış sırasında emniyet mandalını (varsa) kilitleyin. Eğim ayarı için kontrol panelini kullanın (detaylar için Kullanım Talimatları bölümüne bakın).

Adım 8: Elektrikli Sistemi Kurma

Elektrikli kontrol paneli, sağ yan kola monte edilmiştir. Kabloyu kontrol edin ve sıkıca bağlandığından emin olun. Batarya (entegre) sandalyenin alt kısmında bulunur; bağlantılarını kontrol edin. İlk kullanımdan önce bataryayı şarj edin (detaylar için Şarj ve Batarya Kullanımı bölümüne bakın).

Adım 9: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerleklerin kilitlerini, elektrikli sistemin işlevselliğini ve sırt kısmının mekanizmasını bir kez daha kontrol edin. Sandalye kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalye düz bir zeminde yerleştirin. Tüm tekerleklerin kilitlerini kapatın (mandalları aşağı bastırın). Klozet kovasını taktıysanız, kovanın sabit olduğundan emin olun. Eğer klozet üzerinde kullanacaksanız, sandalyeyi klozetin üzerine hizalayın ve kilitleri kapatın. Elektrikli kontrol panelini açın (genellikle bir güç düğmesi bulunur).

Adım 2: Hasta Transferi

Sırt kısmını iki yana açın (açma mekanizmasını kullanın). Elektrikli kontrol panelindeki yükseklik ayarı düğmesini kullanarak sandalyeyi hastanın yatak seviyesine getirin (yukarı/aşağı ok tuşları). Refakatçi, hastayı yatağından kaldırarak sandalyeye yerleştirsin. Hasta oturduktan sonra sırt kısmını kapatın ve emniyet mandalını kilitleyin.

Adım 3: Yükseklik ve Eğim Ayarı

Elektrikli kontrol panelindeki yukarı/aşağı düğmeleriyle yüksekliği (50-75 cm) ayarlayın. Eğim ayarı için eğim düğmesini (genellikle bir eğim simgesi) kullanın; sırt kısmını kullanıcı konforuna göre eğin. Ayar sırasında sandalyeyi sabit tutun.

Adım 4: Klozet Kullanımı

- **Yerinde Kullanım:** Oturma minderini kaldırın; klozet kovası görünür hale gelir. Hasta ihtiyacını karşılayabilir. İşlem bittikten sonra klozet kovasını çıkarın, boşaltın ve temizleyin.
- **Klozet Üzerinde Kullanım:** Sandalyeyi klozetin üzerine hizalayın; klozet kovasını çıkarın. Elektrikli yükseklik ayarıyla klozet seviyesine getirin ve kilitleri kapatın. Hasta ihtiyacını klozet üzerinde karşılayabilir.

Adım 5: Banyo Kullanımı

Sandalye nemli ortamlarda kullanıma uygundur. Klozet kovasını çıkarın ve sandalyeyi banyo alanına yerleştirin. Kilitleri kapatın. Elektrikli sistemle yüksekliği ve eğimi ayarlayın. Hastayı sandalyeye transfer edin ve banyo işlemini gerçekleştirin. İşlem bittikten sonra sandalyeyi kuru bir bezle silin.

Adım 6: Refakatçi ile Taşıma

Kilitleri açın (mandalları yukarı kaldırın). Refakatçi, arka tutma kollarını kullanarak sandalyeyi yavaşça itin. Elektrikli sistemi kullanarak gerektiğinde yükseklik ve eğim ayarı yapın. Dar alanlarda manevra yaparken dikkatli olun. Durmak için sandalyeyi sabitleyin ve kilitleri kapatın.

Adım 7: Şarj ve Batarya Kullanımı

Şarj cihazını batarya şarj girişine (genellikle sandalye altında bir soket) bağlayın ve fişi prize takın. Kırmızı ışık şarjı, yeşil ışık tam şarjı (6-8 saat) gösterir. Şarj sırasında kullanmayın. Şarj tamamlandığında konektörü nazikçe ayırın. Bataryayı haftada bir tam şarj edin.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Paslanmaz çelik şaseyi kuru tutun.
- **Klozet Kovası:** Her kullanımdan sonra kovayı boşaltın, ılık su ve sabunla yıkayın, dezenfekte edin ve iyice kurulayın.
- **Elektrikli Sistem:** Kuru bezle temizleyin; sıvı temasından kaçının. Kabloları düzenli kontrol edin.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Kilit mekanizmasını kontrol edin.

- **Oturma Minderi:** Nemli bezle silin; gerekirse elde yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.
- **Sırt Kısmı:** Sırt kumaşını nemli bezle temizleyin; açma/kapama mekanizmasını kuru tutun.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, G570 Elektrikli Klozetli Transfer Sandalyesi ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Elektrikli sistem çalışmıyor	Batarya şarjı bitmiş	Bataryayı 6-8 saat şarj edin. Şarj göstergesini kontrol edin.
Yükseklik ayarı yapmıyor	Kablo gevşek veya motor arızalı	Kabloları kontrol edin ve sıkıca takın. Arıza devam ederse servise başvurun.
Tekerlekler dönmüyor	Kilitler kapalı	Kilit mandallarını yukarı kaldırarak kilitleri açın.
Tekerlekler kayıyor	Zemin ıslak veya kirli	Zemini temizleyin ve kurulayın; tekerlekleri kontrol edin.
Klozet kovası sabit değil	Yuva hizası bozuk	Kovanın yuvaya düzgün oturduğunu kontrol edin; yuvayı temizleyin.
Sırt kısmı açılmıyor	Mekanizma kirlenmiş veya sıkışmış	Mekanizmayı nemli bezle temizleyin; hareketli parçaları kontrol edin.
Eğim ayarı çalışmıyor	Elektrikli sistem arızalı	Kontrol panelini ve kabloları kontrol edin; arıza varsa servise başvurun.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Batarya çabuk bitiyor	Batarya ömrü tükenmiş	Tam şarjla test edin; sorun devam ederse batarya değişimi gerekebilir.
Tekerlekler gıcırıyor	Kir birikmesi veya aşınma	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servisten yedek parça talep edin.
Şarj olmuyor	Şarj cihazı arızalı	Şarj cihazını test edin; arızalıysa değiştirin.
Oturma minderi kayıyor	Klipsler gevşemiş	Minder klipslerini sıkılaştırın; yırtık varsa minderi değiştirin.

9. Ek Bilgiler

- **Batarya Ömrünü Uzatma İpuçları:** Bataryayı düzenli şarj edin, tamamen bitmeden şarj etmeye özen gösterin. Aşırı şarjdan kaçının; şarj cihazını tam doludundan sonra prizden çıkarın. Bataryayı 0-40°C arasında serin ve kuru bir yerde saklayın.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Elektrikli yükseklik ve eğim ayarı sırasında sandalyeyi sabit tutun. Klozet kovasını her kullanımdan sonra temizleyin. Nemli ortamlarda elektrikli bileşenleri koruyun.
 - **Acil Durumlar İçin:** Elektrikli sistem çalışmıyorsa güç düğmesini kapatıp açın. Sorun devam ederse batarya bağlantılarını kontrol edin; servise başvurun.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, sandalye gövdesi ve elektrikli sistem için). Batarya garanti süresi 6 aydır.
- **Kapsam:** Üretim hataları ve elektrikli sistem/mekanizma arızalarını kapsar (batarya için 6 ay).
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, suya maruz bırakma, aşırı yük).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı, batarya yanlış şarjı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, kumaş, batarya ömrü).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com

