



CE

# G551

Alüminyum Klozetli Banyo Sandalyesi

## Kullanım Kılavuzu

### **OFİS**

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5  
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

### **FABRİKA**

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB  
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



**Karadeniz Medikal** olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G551 Alüminyum Klozetli Banyo Sandalyesi ile engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin banyo hijyenini güvenli ve konforlu bir şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Hafif alüminyum şasesi, katlanabilir tasarımı ve klozet uyumluluğuyla bu ürün, pratik bir çözüm sunar. Dayanıklı yapısı, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun kullanım sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

---

## 1. Ürün Tanıtımı

### Ürün Açıklaması

G551 Alüminyum Klozetli Banyo Sandalyesi, engelli bireyler veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için özel olarak tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir banyo yardımcısıdır. 9 kg ağırlığındaki alüminyum şase, 120 kg taşıma kapasitesi ile güvenli kullanım sağlar. Katlanabilir tasarımı (katlanır genişlik 30 cm), 10" PU arka tekerlekler ve 4" PVC ön tekerlekler sayesinde banyo gibi dar alanlarda kolay manevra imkanı sunar. 45 cm oturma yeri genişliği, 43 cm derinliği, 48 cm sırtlık yüksekliği ve 20 cm sabit kolçak yüksekliği ile kullanıcı konforu ön plandadır. G551, banyo hijyeni ve tuvalet kullanımı için ideal bir çözümdür.

### Kullanım Amacı

G551, engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin banyoda bağımsız hareket etmelerini veya bir refakatçi yardımıyla tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Klozet uyumluluğu ve katlanabilir yapısı, hem ev hem de sağlık kuruluşlarında pratiklik sunar. Hafif tasarımı ve tekerlekli yapısı, taşınabilirlik ve depolama kolaylığı sağlar.

## 2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	45 cm
Oturma Yeri Derinliği	43 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	50 cm
Sırtlık Yüksekliği	48 cm
Kolçak Yüksekliği	20 cm (sabit)
Toplam Genişlik	59 cm
Toplam Yükseklik	94 cm
Toplam Uzunluk	88 cm
Katlanır Genişlik	30 cm
Arka Tekerlekler	10" PU
Ön Tekerlekler	4" PVC
Materyal	Alüminyum
Ürün Ağırlığı	9 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	120 kg
Koli Ölçüleri	86 x 22.5 x 61.5 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC: 235 / 40'DC: 546

## 3. Kutunun İçindekiler

- G551 Alüminyum Klozetli Banyo Sandalyesi (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Çıkarılabilir ayak paletleri (varsa)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

#### 4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 120 kg yük kapasitesini aşmayın.
- Sandalyeyi yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Refakatçi freni kontrol edilmeden sandalyeyi hareket ettirmeyin.
- Sandalyeyi suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum şaseyi kurulayın.
- Ayak paletlerini (varsa) takarken dikkatli olun; parmakları sıkıştırmaktan kaçının.
- Kullanıcıların sandalyeyi kendi başlarına kullanmadan önce refakatçi yardımı alması önerilir.
- Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
- Sandalyeyi klozetle uyumlu şekilde yerleştirin; yanlış kullanım düşme riski yaratabilir.

---

#### 5. Kurulum Talimatları

##### Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve, tekerlekler ve ayak paletlerinin kutuda olduğundan emin olun. Hasarlı parça varsa yetkili servise başvurun.

##### Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye katlanmış halde gelir (katlanır genişlik 30 cm). Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı bastırın. Yan çerçeveleri dışa çekin; "klik" sesiyle çerçevenin kilitletiğini kontrol edin.

### **Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme**

Arka (10" PU) ve ön (4" PVC) tekerleklerin 360° döndüğünü ve refakatçi freninin çalıştığını doğrulayın. Freni sıkarak tekerleklerin kilitlendiğinden emin olun.

### **Adım 4: Ayak Paletlerini Takma (Varsa)**

Ayak paletlerini ön yuvalara hizalayın ve itin; "klik" sesiyle sabitlendiğini kontrol edin. Kullanıcıya uygun ayar yapın; çıkarmak için paletleri çekerek ayırın.

### **Adım 5: Klozet Uyumu Kontrolü**

Sandalyeyi klozet üzerine yerleştirin. Oturma yerinin (45 cm genişlik, 43 cm derinlik) klozetle hizalandığından ve sabit olduğundan emin olun. Tekerleklerin hareketi engellemediğini kontrol edin.

### **Adım 6: Son Kontrol**

Tüm vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerlekler, frenler ve ayak paletlerinin düzgün çalıştığını doğrulayın.

---

## **6. Kullanım Talimatları**

### **Adım 1: Hazırlık**

Sandalyeyi düz ve kaymaz bir zemine yerleştirin. Refakatçi frenini kontrol edin. Sandalyeyi klozet üzerine hizalayın.

### **Adım 2: Kullanıcıyı Sandalyeye Yerleştirme**

Refakatçi, kullanıcıyı sandalyeye yerleştirsin. Ayak paletlerini (varsa) takın ve pozisyonu kontrol edin.

### Adım 3: Refakatçi ile Kullanım

Freni serbest bırakın. Arka tutma kollarıyla sandalyeyi yavaşça hareket ettirin. Kullanım bittikten sonra freni kilitleyin.

### Adım 4: Katlama ve Taşıma

Ayak paletlerini (varsa) çıkarın. Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın (katlanın genişlik 30 cm). Katlanmış sandalyeyi (9 kg) taşıyın veya depolayın.

## 7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; alüminyum şaseyi kurulayın.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin, frenleri kontrol edin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.

## 8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönmüyor	Fren kilitli	Freni serbest bırakın.
Tekerlekler kayıyor	Zemin ıslak veya kirli	Zemini temizleyin ve kurulayın.
Sandalye katlanmıyor	Çerçeve kilitlenmış	Kilidi kontrol edin ve tekrar deneyin.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Vidaları sıkılaştırın.
Tekerlekler gıcırdayor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servise danışın.
Klozetle uyumsuzluk	Yanlış hizalama	Sandalyeyi klozetle yeniden hizalayın.

## 9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama:** Katlanır tasarımıyla (30 cm) araç bagajına kolayca sığar. Kuru bir alanda saklayın.
- **Güvenli Kullanım:** Refakatçi freni her zaman kullanılabilir olmalı; kaygan zeminlerde yavaş hareket edin.

---

## 10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (sandalye gövdesi için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım, yetkisiz tamir.

### İletişim Bilgileri:

#### Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com) | [export@karadenizmed.com](mailto:export@karadenizmed.com)

#### Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com)