



G561

Alüminyum Klozetli Banyo Sandalyesi

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahçelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81
info@karadenizmed.com
export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81
info@karadenizmed.com
export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G561 Banyo Tuvalet Sandalyesi ile engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Alüminyum şasesi, geniş oturma alanı ve tekerlekli yapısıyla bu ürün, pratik bir çözüm sunar. Dayanıklı yapısı ve ergonomik tasarımı, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun kullanım sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

G561 Banyo Tuvalet Sandalyesi, engelli bireyler veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, dayanıklı ve işlevsel bir banyo yardımcısıdır. 14 kg ağırlığındaki alüminyum şase, 110 kg taşıma kapasitesi ile güvenli kullanım sağlar. 24" PU arka tekerlekler ve 4" PVC ön tekerlekler, banyo gibi dar alanlarda manevra kabiliyeti sunar. 45 cm oturma yeri genişliği, 43 cm derinliği, 45 cm sırtlık yüksekliği ve 21 cm sabit kolçak yüksekliği ile kullanıcı konforunu artırır. G561, klozetle uyumlu yapısıyla banyo ve tuvalet kullanımı için idealdir.

Kullanım Amacı

G561, engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Tekerlekli yapısı, refakatçi yardımıyla hareket kolaylığı sunarken, klozet uyumluluğu pratik bir çözüm sağlar. Alüminyum şase, hafiflik ve dayanıklılık sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	45 cm
Oturma Yeri Derinliği	43 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	52 cm
Sırtlık Yüksekliği	45 cm
Kolçak Yüksekliği	21 cm (sabit)
Toplam Genişlik	69 cm
Toplam Yükseklik	99 cm
Toplam Uzunluk	105 cm
Arka Tekerlekler	24" PU
Ön Tekerlekler	4" PVC
Materyal	Alüminyum
Ürün Ağırlığı	14 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	110 kg
Koli Ölçüleri	72 x 58 x 40 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC: 168 / 40'DC: 389

3. Kutunun İçindekiler

- G561 Banyo Tuvalet Sandalyesi (montaj gerektirebilir)
- Çıkarılabilir ayak paletleri (varsa)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 110 kg yük kapasitesini aşmayın.
- Sandalyeyi yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Refakatçi freni kontrol edilmeden sandalyeyi hareket ettirmeyin.
- Sandalyeyi suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum şaseyi kurulayın.
- Ayak paletlerini (varsa) takarken dikkatli olun; parmakları sıkıştırmaktan kaçının.
- Kullanıcıların sandalyeyi kendi başlarına kullanmadan önce refakatçi yardımı alması önerilir.
- Sandalyeyi klozetle uyumlu şekilde yerleştirin; yanlış kullanım düşme riski yaratabilir.
- Sandalye katlanabilir değildir; sabit yapısını dikkate alarak kullanın.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve, tekerlekler ve ayak paletlerinin kutuda olduğundan emin olun. Hasarlı parça varsa yetkili servise başvurun.

Adım 2: Tekerlekleri Kontrol Etme

Arka (24" PU) ve ön (4" PVC) tekerleklerin 360° döndüğünü ve refakatçi freninin çalıştığını doğrulayın. Freni sıkarak tekerleklerin kilitlendiğinden emin olun.

Adım 3: Ayak Paletlerini Takma (Varsa)

Ayak paletlerini ön yuvalara hizalayın ve itin; "klik" sesiyle sabitlendiğini kontrol edin. Kullanıcıya uygun ayar yapın; çıkarmak için paletleri çekerek ayırın.

Adım 4: Klozet Uyumu Kontrolü

Sandalyeyi klozet üzerine yerleştirin. Oturma yerinin (45 cm genişlik, 43 cm derinlik) klozetle hizalandığından ve sabit olduğundan emin olun. Tekerleklerin hareketi engellemediğini kontrol edin.

Adım 5: Son Kontrol

Tüm vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerlekler, frenler ve ayak paletlerinin düzgün çalıştığını doğrulayın.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalyeyi düz ve kaymaz bir zemine yerleştirin. Refakatçi frenini kontrol edin. Sandalyeyi klozet üzerine hizalayın.

Adım 2: Kullanıcıyı Sandalyeye Yerleştirme

Refakatçi, kullanıcıyı sandalyeye yerleştirsin. Ayak paletlerini (varsa) takın ve pozisyonu kontrol edin.

Adım 3: Refakatçi ile Kullanım

Freni serbest bırakın. Arka tutma kollarıyla sandalyeyi yavaşça hareket ettirin. Kullanım bittikten sonra freni kilitleyin.

Adım 4: Depolama

Sandalye katlanabilir değildir. Kullanım sonrası kuru bir alanda saklayın. 14 kg ağırlığı ile taşınabilir ancak geniş bir depolama alanı gerekebilir.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; alüminyum şaseyi kurulayın.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin, frenleri kontrol edin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönüyor	Fren kilitli	Freni serbest bırakın.
Tekerlekler kayıyor	Zemin ıslak veya kirli	Zemini temizleyin ve kurulayın.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Vidaları sıkılaştırın.
Tekerlekler gıcırdayıyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servise danışın.
Klozetle uyumsuzluk	Yanlış hizalama	Sandalyeyi klozetle yeniden hizalayın.

9. Ek Bilgiler

- **Depolama İpuçları:** Kuru bir alanda saklayın. 24" arka tekerlekler dar alanlarda manevra kolaylığı sağlar.
- **Güvenli Kullanım:** Refakatçi freni her zaman kullanılabilir olmalı; kaygan zeminlerde yavaş hareket edin.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (sandalye gövdesi için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım, yetkisiz tamir.

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com