



CE

# G630

Alüminyum Multi-Fonk. Tekerlekli Sandalye

## Kullanım Kılavuzu

### **OFİS**

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5  
D:28 Town Ofis Bahçelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

### **FABRİKA**

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB  
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



**Karadeniz Medikal** olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G630 Standart Manuel Tekerlekli Sandalye ile engelli, hasta ve yaşlı bireylerin hareket kabiliyetini güvenli ve konforlu bir şekilde artırmayı hedefliyoruz. Hafif alüminyum şasesi ve katlanabilir yapısıyla bu sandalye, hem kullanıcı hem de refakatçi için pratik bir çözüm sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce kontrol edin.

---

## 1. Ürün Tanıtımı

### Ürün Açıklaması

G630 Standart Manuel Tekerlekli Sandalye, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, dayanıklı ve hafif bir mobilite çözümüdür. 16.6 kg ağırlığındaki alüminyum şase, 120 kg taşıma kapasitesi ile güvenli kullanım sağlar. Katlanabilir yapısı (katlanır genişlik 33 cm), 24" PU arka tekerlekler ve 8" PVC ön tekerlekler ile taşıma ve depolama kolaylığı sunar. Sabit kolçaklar (26 cm yükseklik) ve sabit ayak koyma yerleri kullanıcıyı destekler. G630, evde veya dış mekanlarda günlük kullanım için ideal bir seçenektir.

### Kullanım Amacı

G630, engelli, hasta ve yaşlı bireylerin manuel olarak veya refakatçi yardımıyla hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Katlanabilir tasarımı, iç ve dış mekanlarda pratik bir mobilite çözümü sunar.

## 2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	46 cm
Oturma Yeri Derinliği	42 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	49 cm
Sırtlık Yüksekliği	46 cm
Kolçak Yüksekliği	26 cm (sabit)
Toplam Genişlik	68 cm
Toplam Yükseklik	96 cm
Toplam Uzunluk	112 cm
Katlanır Genişlik	33 cm
Arka Tekerlekler	24" PU
Ön Tekerlekler	8" PVC
Materyal	Alüminyum
Ürün Ağırlığı	16.6 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	120 kg
Koli Ölçüleri	82 x 34 x 79 cm
Konteyner Yük Adedi	20' DC: 127 / 40' DC: 295

## 3. Kutunun İçindekiler

- G630 Standart Manuel Tekerlekli Sandalye (katlanmış halde)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

#### 4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesini (120 kg) aşmayın.
- Sandalyeyi düz zeminlerde kullanın; eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Frenleri kontrol edilmeden sandalyeyi hareket ettirmeyin.
- Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; alüminyum şaseyi kuru tutun.
- Kullanıcıların sandalyeyi yalnızca refakatçi olmadan kullanıyorsa dikkatli olmaları önerilir.
- Hasta transferi sırasında bir refakatçi bulunması tercih edilir.
- Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.

---

#### 5. Kurulum Talimatları

##### Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve ve tekerleklerin kutuda olduğundan emin olun. Hasar varsa yetkili servise başvurun.

##### Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye katlanmış halde gelir (katlanır genişlik 33 cm). Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı bastırın. Yan çerçeveleri dışa çekin; "klik" sesiyle çerçevenin kilitlendiğini kontrol edin.

##### Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme

Arka (24" PU) ve ön (8" PVC) tekerleklerin 360° döndüğünü doğrulayın. Frenleri test edin; arka tekerleklerin kilitlendiğinden emin olun.

#### **Adım 4: Son Kontrol**

Tüm vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerlekler, frenler, kolçaklar ve ayak koyma yerlerinin düzgün çalıştığını doğrulayın.

---

### **6. Kullanım Talimatları**

#### **Adım 1: Hazırlık**

Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin. Sabit ayak koyma yerlerinin temiz ve sağlam olduğundan emin olun.

#### **Adım 2: Hasta Transferi**

Refakatçi, kullanıcıyı sandalyeye yerleştirsin. Sabit kolçaklar arasında kullanıcının rahatça oturduğunu kontrol edin. Ayakların sabit ayak koyma yerlerine düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

#### **Adım 3: Kullanım**

- **Manuel Kullanım:** Kullanıcı, arka tekerlekleri elleriyle döndürerek sandalyeyi hareket ettirebilir.
- **Refakatçi ile Taşıma:** Refakatçi, arka tutma kollarıyla sandalyeyi yavaşça hareket ettirsin. Durmak için freni kilitleyin.

#### **Adım 4: Katlama ve Depolama**

Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın (katlanır genişlik 33 cm). Katlanmış sandalyeyi (16.6 kg) taşıyın veya kuru bir alanda depolayın.

## 7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; alüminyum şaseyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin, frenleri kontrol edin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.
- **Ayak Koyma Yerleri:** Nemli bezle silin; sabit olduklarından emin olun.

## 8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönmüyor	Fren kilitli	Freni serbest bırakın.
Sandalye katlanmıyor	Çerçeve kilitlenmiş	Kilidi kontrol edin ve tekrar deneyin.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Vidaları sıkılaştırın.
Tekerlekler gıcırdıyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servise danışın.

## 9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama:** Katlanır tasarımıyla (33 cm) küçük alanlara sığar. Kuru bir alanda saklayın.
- **Güvenli Kullanım:** Frenler her zaman kullanılabilir olmalı; dar alanlarda yavaş hareket edin.

## 10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (sandalye gövdesi için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım, yetkisiz tamir.

### İletişim Bilgileri:

#### Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com) | [export@karadenizmed.com](mailto:export@karadenizmed.com)

#### Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com)