



CE

# G490

Engelli Çocuk Puseti

## Kullanım Kılavuzu

### **OFİS**

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5  
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

### **FABRİKA**

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB  
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



**Karadeniz Medikal** olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G490 Engelli Çocuk Puseti ile özel gereksinimli çocukların rahat ve güvenli bir şekilde taşınmasını hedefliyoruz. Alüminyum şasesi, tilt özelliği ve ergonomik tasarımı ile bu puset, hem çocuklar hem de refakatçiler için konforlu bir deneyim sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce kontrol edin.

---

## 1. Ürün Tanıtımı

### Ürün Açıklaması

G490 Engelli Çocuk Puseti, hareket kabiliyeti sınırlı çocuklar için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir pusettir. 19 kg ağırlığındaki alüminyum şase, 60 kg taşıma kapasitesi ile güvenli kullanım sağlar. 12" PU arka tekerlekler ve 8" PU ön tekerlekler, iç ve dış mekanlarda kolay hareket kabiliyeti sunar. Ayarlanabilir oturma açısı (tilt, 80°-120°), sabit kolçaklar (22 cm yükseklik), ayarlanabilir ayak koyma yerleri ve 50 cm sırtlık yüksekliği, çocuğun doğru pozisyonda oturmasını destekler. Önünde yer alan yemek masası (tepsi), kullanım kolaylığı sağlarken, emniyet kemeri güvenliği artırır. Refakatçi freni bulunmaz; puset, refakatçi tarafından sürekli kontrol edilmelidir. G490, çocukların günlük yaşamda konforlu bir şekilde taşınması için ideal bir seçenektir.

### Kullanım Amacı

G490, özel gereksinimli çocukların refakatçi yardımıyla taşınmasını ve doğru oturma pozisyonunda desteklenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Tilt özelliği ve yemek masası ile uzun süreli kullanımda konfor sunar.

## 2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	26-32 cm (ayarlanabilir)
Oturma Yeri Derinliği	32 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	53 cm
Oturma Yeri Açısı	80°-120° (tilt)
Sırtlık Yüksekliği	50 cm
Kolçak Yüksekliği	22 cm (sabit)
Toplam Genişlik	64 cm
Toplam Yükseklik	100-116 cm (tilt'e bağlı)
Toplam Uzunluk	83 cm
Katlanır Genişlik	- (katlanabilir değil)
Arka Tekerlekler	12" PU
Ön Tekerlekler	8" PU
Materyal	Alüminyum
Ürün Ağırlığı	19 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	60 kg
Koli Ölçüleri	82 x 50 x 66 cm
Konteyner Yük Adedi	20' DC: 121 / 40' DC: 290

### 3. Kutunun İindekiler

- G490 Engelli ocuk Puseti
  - Yemek masası (tepsi)
  - Emniyet kemeri
  - Kullanım kılavuzu
  - Garanti belgesi
  - Kurulum iin alyan anahtar veya tornavida (varsa)
- 

### 4. Gvenlik Uyarıları

- Maksimum tařıma kapasitesini (60 kg) ařmayın.
  - Puseti dz zeminlerde kullanın; eđimli alanlarda devrilme riski vardır.
  - Refakati freni bulunmadıđından, refakati puseti hareket halindeyken srekli kontrol etmelidir.
  - Emniyet kemerini her zaman dođru řekilde bađlayın; gevřek veya yanlış bađlanmış kemer dřme riski yaratır.
  - Yemek masasını takarken veya ıkarırken parmaklarınızı sıkıřtırmaktan kaının.
  - Kullanıcıların puseti kendi bařlarına kullanmasına izin vermeyin; refakati denetimi gereklidir.
  - Hasta transferi sırasında bir refakati bulunmalıdır.
- 

### 5. Kurulum Talimatları

#### Adım 1: Kutudan ıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu dz bir zeminde aın. Puseti dikkatle ıkarın ve tm paraları kontrol edin. ereve, tekerlekler, yemek masası ve emniyet kemerinin kutuda olduđundan emin olun. Hasar varsa yetkili servise bařvurun.

## **Adım 2: Oturma Genişliğini Ayarlama**

Oturma yeri genişliğini (26-32 cm) çocuğa uygun şekilde ayarlayın. Ayar mekanizmasını kullanarak genişliği sabitleyin ve vidaları sıkılaştırın.

## **Adım 3: Yemek Masasını Takma**

Yemek masasını (tepsiyi) pusetin ön kısmındaki yuvalara yerleştirin ve sabitlendiğinden emin olun.

## **Adım 4: Emniyet Kemerini Takma**

Emniyet kemerini pusetin bağlantı noktalarına sabitleyin ve kontrol edin.

## **Adım 5: Tilt ve Ayak Koyma Yerlerini Ayarlama**

Oturma açısını (80°-120°) tilt mekanizması ile çocuğun konforuna göre ayarlayın. Ayak koyma yerlerini çocuğun bacak uzunluğuna uygun şekilde konumlandırın.

## **Adım 6: Tekerlekleri Kontrol Etme**

Arka (12" PU) ve ön (8" PU) tekerleklerin 360° döndüğünü doğrulayın. Refakatçi freni olmadığından, tekerleklerin serbest hareket ettiğinden emin olun.

## **Adım 7: Son Kontrol**

Tüm vidaları sıkılaştırın. Puseti sallayarak sabitliği test edin. Tekerlekler, yemek masası, emniyet kemeri ve tilt mekanizmasının düzgün çalıştığını doğrulayın.

## 6. Kullanım Talimatları

### Adım 1: Hazırlık

Puseti düz bir zemine yerleştirin. Oturma genişliğini (26–32 cm) ve tilt açısını (80°–120°) çocuğa uygun şekilde ayarlayın. Yemek masasını takın ve sabit olduğundan emin olun.

### Adım 2: Hasta Transferi

Refakatçi, çocuğu pusete yerleştirsın. Sabit kolçaklar arasında çocuğun rahatça oturduğunu kontrol edin. Emniyet kemerini bağlayın ve sıkılığını ayarlayın. Ayakların ayarlanabilir ayak koyma yerlerine düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

### Adım 3: Refakatçi ile Taşıma

Refakatçi, arka tutma kollarıyla puseti yavaşça hareket ettirsin. Fren olmadığından, puset sürekli kontrol edilmelidir. Yemek masasını yemek veya oyun için kullanabilirsiniz.

### Adım 4: Depolama

Puset katlanabilir değildir. Kullanım sonrası kuru bir alanda saklayın. 19 kg ağırlığı ile taşınabilir ancak geniş bir depolama alanı gerekebilir.

---

## 7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; alüminyum şaseyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.
- **Yemek Masası:** Nemli bezle silin; yiyecek kalıntılarını temizleyin.
- **Ayak Koyma Yerleri:** Nemli bezle silin; ayar mekanizmasını kontrol edin.
- **Emniyet Kemer:** Nemli bezle silin; aşınma varsa değiştirin.

## 8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servise danışın.
Tilt çalışmıyor	Mekanizma sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; arızalıysa servise başvurun.
Puset sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Vidaları sıkılaştırın.
Yemek masası sabit değil	Bağlantı gevşek	Bağlantıları kontrol edin ve sıkın.

## 9. Ek Bilgiler

- **Depolama İpuçları:** Katlanabilir olmadığı için geniş bir alanda saklayın. Kuru bir ortamda muhafaza edin.
- **Güvenli Kullanım:** Refakatçi freni olmadığından, refakatçi her zaman dikkatli olmalı; dar alanlarda yavaş hareket edin.

## 10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (puset gövdesi için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım, yetkisiz tamir.

**İletişim Bilgileri:**

**Ofis:**

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com) | [export@karadenizmed.com](mailto:export@karadenizmed.com)

**Fabrika:**

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com)