



JT-099

Katlanır Akülü Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

CE

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahçelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Jetty markamıza ait JT-099 Katlanır Akülü Tekerlekli Sandalye ile engelli bireylerin hareket özgürlüğünü artırmayı ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Sağlam çelik gövdesi, katlanabilir tasarımı ve güçlü motorlarıyla bu sandalye, hem kullanıcılar hem de refakatçiler için pratik ve güvenilir bir çözüm sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

JT-099 Katlanır Akülü Tekerlekli Sandalye, Jetty markamıza ait yenilikçi bir mobilite çözümüdür. 42.18 kg ağırlığındaki çelik gövde, 136 kg taşıma kapasitesi ile dayanıklılık sunar. 16" PNU arka tekerlekler ve 10" PU ön tekerlekler, iç ve dış mekanlarda üstün manevra kabiliyeti sağlar (dönüş yarıçapı 60 cm). 2x250W motorlar ve elektromanyetik fren sistemi ile donatılmış bu sandalye, 6 km/s maksimum hızı ve 15 km erim mesafesine sahiptir. Katlanabilir tasarımı (katlanır genişlik 43 cm), çıkarılabilir yan kolçaklar (23 cm yükseklik) ve tilt özelliği (3° oturma açısı), kullanıcı konforunu artırır. Refakatçi freni bulunmaz; ancak arka tekerleklerdeki kırmızı mandal ile manuel ve otomatik sürüş modları arasında geçiş yapılabilir. Emniyet kemeri ve çıkarılabilir ayak koyma yerleri ile JT-099, bağımsızlık arayan bireyler için ideal bir seçenektir.

Kullanım Amacı

JT-099, hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin akülü veya manuel modda, iç ve dış mekanlarda güvenli ve konforlu bir şekilde hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Katlanabilir yapısı ile seyahat ve depolama kolaylığı sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm
Oturma Yeri Derinlięi	42 cm
Oturma Yeri Yükseklięi	50 cm
Oturma Yeri Açısı	3° (tilt)
Sırtlık Yükseklięi	42 cm
Kolçak Yükseklięi	23 cm (çıkartılabilir)
Toplam Geniřlik	60 cm
Toplam Yükseklik	96 cm
Toplam Uzunluk	104 cm
Katlanır Geniřlik	43 cm
Arka Tekerlekler	16" PNU
Ön Tekerlekler	10" PU
Materyal	Çelik
Ürün Aęırlıęı	42.18 kg
Max. Tařıma Kapasitesi	136 kg
Koli Ölçüleri	82 x 45 x 72 cm
Max. Hız	6.0 km/s
Max. Erim Mesafesi	15 km
Dönüş Yarıçapı	60 cm
Motorlar	2 x DC 250W
Kontrol Aygıtı	Chinese NewVR2 70A
Akü	2 x 12 AH Kurşun Asit
řarj Cihazı	5 Amp Off-Board
Fren	Elektromanyetik
Max. Güvenli Eğim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm

3. Kutunun İindekiler

- JT-099 Katlanır Akülü Tekerlekli Sandalye
 - Emniyet kemeri
 - 2 x 12 AH Kurşun Asit akü
 - 5 Amp Off-Board şarj cihazı
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)
-

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesini (136 kg) aşmayın.
- Eğimlerde (max. 12°) ve engellerde (max. 10 cm) dikkatli olun; aşırı eğimlerde devrilme riski vardır.
- Refakatçi freni bulunmadığından, sandalye hareket halindeyken sürekli kontrol edilmelidir.
- Emniyet kemerini her zaman doğru şekilde bağlayın; gevşek kemer düşme riski yaratır.
- Yan kolçakları çıkarırken veya takarken parmaklarınızı sıkıştırmaktan kaçının.
- Aküyü yalnızca verilen 5 Amp şarj cihazıyla şarj edin; farklı bir cihaz kullanmak arızaya neden olabilir.
- Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; elektromanyetik fren ve motorlar zarar görebilir.
- Manuel moda geçmeden önce sandalyeyi durdurun.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve, aküler, şarj cihazı ve emniyet kemerinin kutuda olduğundan emin olun. Hasar varsa yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye katlanmış halde gelir (katlanır genişlik 43 cm). Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı bastırın. "Klik" sesiyle çerçevenin kilitlendiğini kontrol edin.

Adım 3: Yan Kolçakları Takma

Çıkarılabilir yan kolçakları (23 cm yükseklik) yuvalarına yerleştirin ve sabitlendiklerinden emin olun.

Adım 4: Ayak Koyma Yerlerini Takma

Çıkarılabilir ayak koyma yerlerini çerçeveye takın ve sabitleyin.

Adım 5: Akü ve Şarj Kontrolü

Akülerin (2 x 12 AH) doğru bağlandığını kontrol edin. İlk kullanım öncesi aküyü 5 Amp şarj cihazıyla 8-10 saat şarj edin.

Adım 6: Emniyet Kemerini Takma

Emniyet kemerini bağlantı noktalarına sabitleyin ve kontrol edin.

Adım 7: Tekerlekleri ve Frenleri Kontrol Etme

Arka (16" PNU) ve ön (10" PU) tekerleklerin serbest döndüğünü doğrulayın. Elektromanyetik frenin çalıştığını test edin.

Adım 8: Son Kontrol

Tüm vidaları sıkılaştırın. Tilt mekanizmasını (3°) ve sürüş modlarını (manuel/otomatik) test edin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin. Akünün şarjlı olduğundan emin olun (max. erim 15 km). Yan kolçakları ve ayak koyma yerlerini sabitleyin.

Adım 2: Hasta Transferi

Yan kolçakları çıkarın. Kullanıcıyı sandalyeye yerleştirin, ardından kolçakları geri takın. Emniyet kemerini bağlayın ve sıkılığını ayarlayın. Ayakları ayak koyma yerlerine yerleştirin.

Adım 3: Sürüş Modu Seçimi

- **Akülü Mod:** Joystick (Chinese NewVR2 70A) ile sandalyeyi kontrol edin (max. hız 6 km/s).
- **Manuel Mod:** Arka tekerleklerin ortasındaki kırmızı mandalı çekerek motorları devre dışı bırakın; ardından ellerle veya refakatçi yardımıyla hareket ettirin.

Adım 4: Tilt Kullanımı

Oturma açısını (3°) tilt mekanizması ile ayarlayarak konforu artırın.

Adım 5: Katlama ve Depolama

Yan kolçakları ve ayak koyma yerlerini çıkarın. Oturma kısmını yukarı çekerek sandalyeyi katlayın (43 cm). Kuru bir alanda saklayın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; çelik gövdeyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin.
- **Akü:** Ayda bir tam şarj edin; kullanılmadığında serin ve kuru yerde saklayın.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.
- **Emniyet Kemer:** Nemli bezle silin; aşınma varsa değiştirin.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Sandalye hareket etmiyor	Akü bitmiş	Aküyü şarj edin (8-10 saat).
Frenler çalışmıyor	Elektromanyetik arıza	Servise başvurun.
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin.
Tilt çalışmıyor	Mekanizma sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; arızalıysa servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat:** Katlanır tasarım (43 cm) ile araç bagajına kolayca sığar.
- **Güvenli Kullanım:** 12°'den fazla eğimlerden ve 10 cm'den yüksek engellerden kaçının.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (gövde ve motorlar için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım.

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com