



JT-100

Katlanır Akülü Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahçelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Jetty markamızla sunduğumuz JT-100 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye ile hareket özgürlüğünüzü destekliyoruz. Bu kılavuz, ürünün teknik özelliklerini, kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi veya yetkili kişiyle kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

JT-100 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye, engelli bireyler için konfor, güvenlik ve kolaylık sunan bir mobilite çözümdür. Çelik veya alüminyum alaşımlı şasisi, katlanabilir veya ayrılabilir tasarımıyla taşınabilirliği artırır. 24 voltluk batarya sistemi ile güçlendirilmiş motorları, joystick kontrolü ile kullanıcı dostu bir sürüş sağlar. Yaklaşık 46-50 cm koltuk genişliği ve 120-130 kg taşıma kapasitesi ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. 12" veya 14" arka tekerlekler ve 8" ön tekerleklerle donatılmıştır.

Kullanım Amacı

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için iç mekan ve düz dış mekanlarda bağımsız kullanım için tasarlanmıştır. Akülü yapısı, uzun süreli kullanım ve minimal fiziksel çaba gerektirir.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Marka	Jetty
Model	JT-100
Çerçeve Malzemesi	Çelik veya alüminyum alaşımlı
Yüzey Kaplama	Elektrostatik toz boya
Koltuk Geniřliđi	46-50 cm (model varyasyonuna göre)
Koltuk Derinliđi	40-45 cm
Koltuk Yüksekliđi	50 cm (yerden, yaklaşık)
Toplam Geniřlik	60-65 cm
Toplam Uzunluk	100-110 cm (ayak paletleriyle)
Toplam Yükseklik	90-95 cm
Tařıma Kapasitesi	120-130 kg
Net Ađırlık	50-60 kg (batarya dahil)
Arka Tekerlek	12" veya 14" pneumatik
Ön Tekerlek	8" PVC, 360° döner
Motor Gücü	2 x 250W (yaklaşık)
Batarya	24V, 12Ah-20Ah (kurşun-asit)
Maksimum Hız	6-8 km/sa (ayarlanabilir)
Menzil	20-25 km (tam şarjla)
Fren Sistemi	Elektromanyetik fren
Katlanabilirlik	Evet (bazı modellerde ayrılabilir)
Ayak Paleti	Sabit veya çıkarılabilir (modele göre)
Garanti Süresi	2 yıl (batarya hariç)

3. Kutunun İindekiler

- JT-100 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye (katlanmış veya ayrılabilir, montaj gerektirir)
 - 24V batarya (genellikle kutuda takılı veya ayrı)
 - Şarj cihazı (100-240V giriş, 24V çıkış)
 - Joystick kontrol paneli (kablolu, genellikle yan kola monte edilmiş)
 - Ayak paletleri (ıkarılabilir veya sabit)
 - Yan kollar (genellikle takılı)
 - Arka tekerlekler (bazı modellerde ayrı olabilir)
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)
-

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 120-130 kg yük kapasitesini aşmayın.
- 10°den fazla eğimli zeminlerde kullanmaktan kaçının; refakatçi desteği alın.
- Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; batarya ve motoru korumak için kuru tutun.
- Joystick'i kullanmadan önce bataryanın şarj seviyesini kontrol edin.
- Elektromanyetik frenlerin devreye girdiğinden emin olun; ani hareketlerden kaçının.
- Çocukların veya yetkisiz kişilerin sandalyeyi kullanmasına izin vermeyin.
- Arızalı veya hasarlı bir batarya/şarj cihazı kullanmayın; yetkili servise danışın.
- Bataryayı aşırı şarj etmeyin; şarj cihazını önerilen süre boyunca kullanın.
- Bataryayı yüksek sıcaklıkta veya nemli ortamlarda saklamayın.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin, tekerleklerin, batarya kutusunun, joystick kontrol panelinin, ayak paletlerinin, yan kolların ve şarj cihazının kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından dikkatlice inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik bir parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye genellikle katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için oturma kısmını (koltuk kumaşını) iki elinizle tutun ve aşağı doğru hafifçe bastırın. Aynı anda yan çerçeveleri (sandalyenin iki yanındaki metal kısımlar) dışa doğru çekin. Çerçevenin tamamen açıldığını ve kilitlendiğini duyduğunuzda (genellikle bir "klik" sesi çıkar) sandalye düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğundan emin olmak için hafifçe sallayın; herhangi bir gevşeklik hissederseniz kilit mekanizmasını kontrol edin.

Adım 3: Arka Tekerlekleri Takma

Bazı modellerde arka tekerlekler kutuda ayrı olarak gelir. Arka tekerlekleri takmak için sandalyenin alt kısmında, motorların yakınında bulunan tekerlek akslarını (metal çubuklar) bulun. Her bir arka tekerleği (genellikle 12" veya 14" pneumatik tekerlekler) aksa hizalayın ve tekerleği aksa doğru itin. Tekerleğin yerine oturduğunu ve sabitlendiğini duyduğunuzda (genellikle bir "klik" sesi ile) tekerlek doğru şekilde takılmış demektir. Tekerleğin sağlamlığını kontrol etmek için hafifçe çekin; gevşekse sabitleme pimini veya vidasını (kutuda verilen alyan anahtar ile) sıkılaştırın. Aynı işlemi diğer arka tekerlek için de tekrarlayın.

Adım 4: Ön Tekerlekleri Takma ve Kontrol

Ön tekerlekler (genellikle 8" PVC tekerlekler) çoğu modelde çerçeveye önceden takılı gelir. Ancak ayrı geldiyse, sandalyenin ön kısmında bulunan tekerlek yuvalarını (dikey metal çubuklar) bulun. Her bir ön tekerleği yuvaya yerleştirin ve sabitleme vidasını (kutuda verilen tornavida ile) sıkılaştırın. Tekerleklerin 360° serbestçe döndüğünden emin olun; eğer dönme hareketi kısıtlıysa vidaları gevşetip yeniden ayarlayın.

Adım 5: Ayak Paletlerini Takma ve Ayar Yapma

Ayak paletleri (kullanıcının ayaklarını koyduğu platformlar) genellikle çıkarılabilir veya sabit olarak gelir. Eğer paletler ayrıysa, sandalyenin ön kısmında, çerçevenin alt tarafında bulunan ayak paleti yuvalarını (genellikle iki metal boru) bulun. Her bir paleti yuvaya hizalayın ve yuvaya doğru itin; palet yerine oturduğunda bir "klik" sesi duyulur. Paletlerin sabit olduğundan emin olmak için hafifçe çekin. Kullanıcı boyuna göre yüksekliği ayarlamak için paletlerin alt kısmındaki vidaları gevşetin, paleti yukarı veya aşağı kaydırarak uygun yüksekliğe getirin ve vidaları tekrar sıkın. Paletlerin birbirine paralel ve dengeli olduğundan emin olun.

Adım 6: Yan Kolları Takma veya Kontrol

Yan kollar (kol dayama yerleri) genellikle çerçeveye önceden takılıdır, ancak bazı modellerde ayrı olabilir. Yan kollar ayrı geldiyse, sandalyenin her iki yanındaki kol yuvalarını (genellikle koltuk çerçevesinin yanlarında metal bir yuva) bulun. Yan kolun alt kısmındaki metal pimi yuvaya hizalayın ve yuvaya doğru itin; yerine oturduğunda bir kilit sesi duyulur. Yan kolların sağlamlığını kontrol etmek için hafifçe yukarı çekin; gevşeklik varsa sabitleme vidalarını sıkılaştırın. Yan kolların yüksekliğini kullanıcıya göre ayarlamak için kolların altındaki ayar vidalarını gevşetip uygun yüksekliğe getirin ve vidaları sıkın.

Adım 7: Batarya Kutusunu Takma

Batarya kutusu (24V, 12Ah-20Ah kurşun-asit batarya) sandalyenin alt kısmında, genellikle koltuk altında veya arka tekerleklerin arasında bir yuvaya yerleştirilir. Batarya kutusu ayrı geldiyse, yuvayı bulun ve bataryayı yuvaya doğru kaydırın. Batarya kutusu üzerindeki konektörü (genellikle bir plastik fiş) sandalyenin batarya girişine (kabloların çıktığı bir soket) dikkatlice hizalayın ve sıkıca takın. Konektörün tam oturduğundan emin olun; gevşek bir bağlantı sandalye hareketini engelleyebilir. Batarya kutusunun kapağını kapatın ve sabitleme kilitlerini (varsa) kapatın. Bataryayı ilk kullanımdan önce şarj etmek için şarj cihazını bağlayın (detaylar için Şarj ve Batarya Kullanımı bölümüne bakın).

Adım 8: Joystick Kontrol Panelini Takma

Joystick kontrol paneli genellikle sağ yan kola monte edilmiş şekilde gelir, ancak ayrı olabilir. Joystick ayrı geldiyse, sağ yan kolun üst kısmında bulunan joystick yuvasını (genellikle bir vida deliği veya klips) bulun. Joystick'in altındaki montaj parçasını yuvaya hizalayın ve verilen vidalarla (alyen anahtar kullanarak) sabitleyin. Joystick'in kablosunu takip ederek sandalyenin kontrol ünitesine (genellikle batarya kutusunun yakınında bir soket) bağlayın; kabloyu sokete sıkıca takın. Joystick'in sabit olduğundan ve kablunun gevşek olmadığından emin olun.

Adım 9: Koltuk ve Sırtlık Kontrolü

Koltuk ve sırtlık kısmı genellikle çerçeveye önceden monte edilmiştir. Ancak koltuk kumaşının gergin olduğundan ve sırtlık kısmının dik durduğundan emin olun. Eğer sırtlık kısmı ayarlanabilir ise, kullanıcıya göre eğimi ayarlamak için sırtlık yanlarında bulunan ayar vidalarını gevşetin, sırtlığı uygun açığa getirin ve vidaları sıkın. Koltuk minderi (varsa) koltuk çerçevesine yerleştirin ve kaymaz klipslerle sabitleyin.

Adım 10: Tekerlek ve Fren Kontrolü

Tüm tekerleklerin doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Arka tekerleklerin akslara tam oturduğunu ve ön tekerleklerin 360° serbestçe döndüğünü doğrulayın. Joystick'i açmak için güç düğmesine basın ve küçük bir hareket testi yapın; sandalye hareket ettiğinde joystick'i nötr konuma getirdiğinizde elektromanyetik frenlerin otomatik olarak devreye girip sandalyeyi durdurduğundan emin olun.

Adım 11: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları bir kez daha kontrol edin; alıyan anahtar veya tornavida ile gevşek vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi hafifçe sallayarak çerçevenin, tekerleklerin, yan kolların ve ayak paletlerinin sabit olduğundan emin olun. Batarya şarj seviyesini kontrol edin (joystick üzerindeki gösterge ışığından) ve sandalye kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Oturma ve Hazırlık

Sandalye düz bir zeminde olacak şekilde yerleştirin. Joystick'i açmak için güç düğmesine (genellikle joystick üzerinde bir düğme) basın; bir bip sesi duyulmalı veya gösterge ışığı yanmalıdır. Yan tarafınızdan yaklaşarak yavaşça oturun ve ayaklarınızı paletlere yerleştirin. Rahat bir oturma pozisyonu aldığınızdan emin olun.

Adım 2: Joystick Kontrolü

Joystick'i sağ elinizle tutun (bazı modellerde sol tarafta olabilir). Joystick'i öne doğru ittiğinizde sandalye ileri hareket eder, geriye çektiğinizde ise geri gider. Sola veya sağa hareket ettirdiğinizde sandalye yön değiştirir. Hız kontrolü için joystick'in hareket açısını ayarlayın; tam itme maksimum hıza (6-8 km/sa), hafif itme ise düşük hıza neden olur. Durmak için joystick'i nötr konuma (ortaya) getirin; elektromanyetik frenler otomatik olarak devreye girer ve sandalye durur.

Adım 3: Refakatçi Kullanımı

Refakatçi, sandalyeyi elle itmek için arka tutma kollarını kullanabilir. Öncelikle joystick'i kapatın (güç düğmesine basarak) ve elektromanyetik frenlerin devreye girmesini sağlayın. Ardından tutma kollarını sıkıca tutarak sandalyeyi yavaş ve kontrollü bir şekilde itin. Kullanıcıyı yönlendirmek için ani hareketlerden kaçının. Durmak için sandalyeyi sabitleyin ve joystick kapalı konumda olduğundan emin olun.

Adım 4: Şarj ve Batarya Kullanımı

Bataryayı şarj etmek için şarj cihazını batarya konektörüne bağlayın ve fişi prize takın. Şarj cihazı genellikle bir gösterge ışığı ile donatılmıştır; şarj sırasında kırmızı ışık yanar, tam şarj olduğunda (6-8 saat sonra) yeşil ışığa döner. Tam şarj ile sandalye 20-25 km menzil sağlar. Şarj sırasında sandalyeyi kullanmayın. Şarj tamamlandığında fişi prizden çıkarın ve konektörü nazikçe ayırın. Bataryayı düzenli olarak şarj edin; tamamen bitmeden şarj etmek batarya ömrünü uzatır. Bataryayı haftada en az bir kez tam şarj döngüsüne tabi tutun.

Adım 5: Katlama ve Taşıma

Kullanımı bitirdikten sonra joystick'i kapatın. Ayak paletlerini (eğer çıkarılabilirse) çıkarın. Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın. Ayrılabilir modellerde arka tekerlekleri ve bataryayı çıkarın. Bataryayı çıkarırken önce konektörü ayırın, ardından batarya kutusunu yuvadan nazikçe çekin. Sandalyeyi katlanmış veya ayrılmış halde taşıyın ya da saklayın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bir bez ve nötr sabun kullanarak silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Çerçeveyi kuru tutarak paslanmayı önleyin.
- **Batarya:** Aylık olarak şarj seviyesini kontrol edin; uzun süre kullanılmıyacaksa bataryayı %50–60 şarj seviyesinde saklayın ve her 6 ayda bir tam şarj edin. Bataryayı aşırı sıcaklık (40°C üzeri) veya nemli ortamlardan uzak tutun. Şarj döngülerini optimize etmek için bataryayı tamamen bitmeden şarj edin; bu, batarya ömrünü uzatır. Batarya konektörlerini düzenli olarak kontrol edin; kir veya oksitlenme varsa kuru bir bezle temizleyin.
- **Tekerlekler:** Haftalık olarak tekerleklerde biriken kir ve tozu temizleyin. Pnömatik arka tekerleklerin hava basıncını kontrol edin (ideal basınç 2.5–3 bar). Ön tekerleklerin 360° döndüğünden emin olun.
- **Joystick ve Kontrol Paneli:** Kirlenirse kuru veya hafif nemli bir bezle temizleyin; sıvı temasından kaçının. Joystick'in etrafındaki kabloları düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa servise başvurun.
- **Motor ve Frenler:** Aylık olarak motorlarda anormal ses veya titreşim olup olmadığını kontrol edin. Elektromanyetik frenlerin düzgün çalıştığından emin olun; sandalye durduğunda hareket etmemelidir. Herhangi bir sorun fark ederseniz yetkili servise başvurun.

8. Kullanım Talimatları

Adım 1: Oturma ve Hazırlık

Sandalye düz bir zeminde olacak şekilde yerleştirin. Joystick'i açmak için güç düğmesine (genellikle joystick üzerinde bir düğme) basın; bir bip sesi duyulmalı veya gösterge ışığı yanmalıdır. Yan tarafınızdan yaklaşarak yavaşça oturun ve ayaklarınızı paletlere yerleştirin. Rahat bir oturma pozisyonu aldığınızdan emin olun.

Adım 2: Joystick Kontrolü

Joystick'i sağ elinizle tutun (bazı modellerde sol tarafta olabilir). Joystick'i öne doğru ittiğinizde sandalye ileri hareket eder, geriye çektiğinizde ise geri gider. Sola veya sağa hareket ettirdiğinizde sandalye yön değiştirir. Hız kontrolü için joystick'in hareket açısını ayarlayın; tam itme maksimum hıza (6-8 km/sa), hafif itme ise düşük hıza neden olur. Durmak için joystick'i nötr konuma (ortaya) getirin; elektromanyetik frenler otomatik olarak devreye girer ve sandalye durur.

Adım 3: Refakatçi Kullanımı

Refakatçi, sandalyeyi elle itmek için arka tutma kollarını kullanabilir. Öncelikle joystick'i kapatın (güç düğmesine basarak) ve elektromanyetik frenlerin devreye girmesini sağlayın. Ardından tutma kollarını sıkıca tutarak sandalyeyi yavaş ve kontrollü bir şekilde itin. Kullanıcıyı yönlendirmek için ani hareketlerden kaçının. Durmak için sandalyeyi sabitleyin ve joystick kapalı konumda olduğundan emin olun.

Adım 4: Şarj ve Batarya Kullanımı

Bataryayı şarj etmek için şarj cihazını batarya konektörüne bağlayın ve fişi prize takın. Şarj cihazı genellikle bir gösterge ışığı ile donatılmıştır; şarj sırasında kırmızı ışık yanar, tam şarj olduğunda (6-8 saat sonra) yeşil ışığa döner. Tam şarj ile sandalye 20-25 km menzil sağlar. Şarj sırasında sandalyeyi kullanmayın. Şarj tamamlandığında fişi prizden çıkarın ve konektörü nazikçe ayırın. Bataryayı düzenli olarak şarj edin; tamamen bitmeden şarj etmek batarya ömrünü uzatır. Bataryayı haftada en az bir kez tam şarj döngüsüne tabi tutun.

Adım 5: Katlama ve Taşıma

Kullanımı bitirdikten sonra joystick'i kapatın. Ayak paletlerini (eğer çıkarılabilirse) çıkarın. Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın. Ayrılabilir modellerde arka tekerlekleri ve bataryayı çıkarın. Bataryayı çıkarırken önce konektörü ayırın, ardından batarya kutusunu yuvadan nazikçe çekin. Sandalyeyi katlanmış veya ayrılmış halde taşıyın ya da saklayın.

9. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, JT-100 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik bir arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Sandalye hareket etmiyor	Batarya şarjı bitmiş	Bataryayı şarj cihazına bağlayın ve en az 6-8 saat şarj edin. Şarj göstergesini kontrol edin.
Joystick tepki vermiyor	Güç düğmesi kapalı veya joystick arızalı	Güç düğmesine basın ve bip sesi gelip gelmediğini kontrol edin. Joystick kablosunu kontrol edin; gevşekse yeniden bağlayın. Arıza devam ederse servise başvurun.
Tekerlekler zor dönüyor	Motor arızası, tekerleklerde kir birikimi veya aks sıkışması	Tekerlekleri nemli bir bezle temizleyin. Motor sesi anormale veya dönmüyorsa yetkili servise danışın. Aks vidalarını kontrol edin ve sıkılaştırın.
Frenler tutmuyor	Elektrik kesintisi veya fren mekanizması arızalı	Batarya şarj seviyesini kontrol edin; şarj düşüğe şarj edin. Frenlerin manuel devreye girip girmediğini test edin. Arıza varsa servise başvurun.
Şarj olmuyor	Kablo bağlantısı gevşek, şarj cihazı arızalı veya priz sorunu	Kabloları kontrol edin ve sıkıca takın. Şarj cihazını başka bir prize takarak test edin. Şarj cihazı arızalıysa değiştirin.
Batarya çabuk bitiyor	Batarya ömrü tükenmiş, aşırı yük veya yanlış şarj	Bataryayı tam şarj edip menzili test edin. Eğer menzil 20 km'nin altındaysa batarya değişimi gerekebilir. Aşırı yükten kaçının.
Sandalye aniden duruyor	Batarya aşırı ısınmış veya güvenlik sistemi devreye girmiş	Sandalyeyi 15-20 dakika dinlendirin ve bataryayı kontrol edin. Güvenlik sistemi devreye girdiyse joystick'i kapatıp açmayı deneyin.
Tekerleklerden ses geliyor	Tekerlek aksları gevşemiş veya tekerlek havası azalmış	Aks vidalarını sıkılaştırın. Pnevmatik tekerleklerin hava basıncını kontrol edin (2.5-3 bar olmalı); gerekirse hava ekleyin.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Joystick ışıkları yanıp sönüyor	Düşük batarya veya sistem hatası	Bataryayı şarj edin. Işıklar devam ederse joystick'in kablo bağlantısını kontrol edin; hata kodu varsa servise bildirin.
Sandalye yana kayıyor	Ön tekerlekler hizalı değil veya zemin eğimli	Ön tekerleklerin vidalarını kontrol edin ve hizalayın. Eğimli zeminde kullanmaktan kaçının.
Motor aşırı ısınıyor	Uzun süreli kullanım veya tıkanıklık	Sandalyeyi 20-30 dakika kapatın ve motor çevresini temizleyin. Aşırı kullanımda mola verin.
Şarj süresi çok uzun sürüyor	Şarj cihazı zayıf veya batarya hasarlı	Şarj cihazını kontrol edin; arızalıysa değiştirin. Batarya şişmiş veya sızıyorsa hemen servise başvurun.
Sandalye hızı düşük	Batarya şarjı yetersiz veya hız limiti aktif	Bataryayı tam şarj edin. Joystick'teki hız ayarını kontrol edin; gerekirse maksimum hıza getirin.
Koltuk veya sırtlık gevşek	Montaj vidaları gevşemiş veya kumaş aşınmış	Vidaları sıkılaştırın. Kumaş yırtılmışsa yetkili servisten yedek parça talep edin.

10. Ek Bilgiler

- **Batarya Ömrünü Uzatma İpuçları:** Bataryayı düzenli olarak şarj edin ve tamamen bitmeden şarj etmeye özen gösterin. Aşırı şarjdan kaçının; şarj cihazını tam doludandı sonra prizden çıkarın. Bataryayı serin ve kuru bir yerde saklayın; aşırı sıcaklık batarya ömrünü kısaltabilir. Eğer sandalyeyi uzun süre kullanmayacaksanız, bataryayı her 2-3 ayda bir kontrol ederek %50-60 şarj seviyesinde tutun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Akülü tekerlekli sandalyeler, manuel modellere kıyasla daha az fiziksel çaba gerektirir, ancak dikkatli kullanım önemlidir. Maksimum eğim kapasitesi genellikle %10-12'dir; bu limiti aşmayın. Joystick kullanımında ani hareketlerden kaçının ve hızı zemine göre ayarlayın. Örneğin, iç mekanlarda düşük hız, dış mekanlarda düz zeminlerde orta-yüksek hız tercih edin.
- **Acil Durumlar İçin:** Sandalyenin hareket etmediği veya joystick'in tepki vermediği durumlarda, öncelikle güç düğmesini kapatıp açmayı deneyin. Sorun devam ederse batarya bağlantılarını kontrol edin ve gerekirse yetkili servise başvurun.

11. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, sandalye gövdesi ve motorlar için). Batarya garanti süresi 6 aydır ve bu süre tüm akülü modeller için geçerlidir.
- **Kapsam:** Üretim hatalarını ve motor/batarya arızalarını kapsar (batarya için 6 ay süreyle).
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, suya maruz bırakma, aşırı yükleme).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı, bataryanın yanlış şarj edilmesi).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, koltuk kumaşı, batarya ömrü).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com