



JT-124

Hafif Akülü Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, JT-124 Akülü Tekerlekli Sandalye ile engelli bireylerin hareket özgürlüğünü artırmayı ve konforlu bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Sağlam çelik gövdesi, katlanabilir tasarımı, yatabilen sırtlığı ve güçlü motorlarıyla bu sandalye, hem kullanıcılar hem de refakatçiler için ideal bir çözüm sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

JT-124 Akülü Tekerlekli Sandalye, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, dayanıklı ve çok yönlü bir mobilite çözümdür. 38 kg ağırlığındaki çelik gövde, 150 kg taşıma kapasitesi ile üstün dayanıklılık sunar. 16" PNU arka tekerlekler ve 10" PU ön tekerlekler, iç ve dış mekanlarda kolay manevra kabiliyeti sağlar (dönüş yarıçapı 60 cm). 2x250W motorlar, 6 km/s maksimum hıza ve 15 km erim mesafesine olanak tanır. Katlanabilir tasarımı (katlanır genişlik 35 cm), yatabilen sırtlık (81 cm yüksekliğe kadar), açılabilir yan kolçaklar (23 cm), baldır desteği ve çıkarılabilir ayak koyma yerleri, kullanıcı konforunu ön planda tutar. Elektromanyetik fren sistemi güvenliği artırırken, emniyet kemeri ve tilt özelliği (3° oturma açısı) ek destek sağlar. JT-124, uzun süreli kullanım ve bağımsızlık arayan bireyler için mükemmel bir seçenektir.

Kullanım Amacı

JT-124, hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin akülü modda iç ve dış mekanlarda güvenli ve konforlu bir şekilde hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Yatabilen sırtlık ve baldır desteği ile uzun süreli oturmalarda rahatlık sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	45 cm
Oturma Yeri Derinliği	42 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	50 cm
Oturma Yeri Açısı	3° (tilt)
Sırtlık Yüksekliği	81 cm (yatılabilir)
Kolçak Yüksekliği	23 cm (açılabilir)
Toplam Genişlik	68 cm
Toplam Yükseklik	130 cm
Toplam Uzunluk	108 cm
Katlanır Genişlik	35 cm
Arka Tekerlekler	16" PNU
Ön Tekerlekler	10" PU
Materyal	Çelik
Ürün Ağırlığı	38 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	150 kg
Koli Ölçüleri	78 x 41 x 82 cm
Max. Hız	6.0 km/s
Max. Erim Mesafesi	15 km
Dönüş Yarıçapı	60 cm
Motorlar	2 x DC 250W
Kontrol Aygıtı	Chinese NewVR2 70A
Akü	12 AH Kurşun Asit
Şarj Cihazı	5 Amp Off-Board
Fren	Elektromanyetik
Max. Güvenli Eğim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm

3. Kutunun İindekiler

- JT-124 Akülü Tekerlekli Sandalye
 - Emniyet kemeri
 - 12 AH Kurşun Asit akü
 - 5 Amp Off-Board şarj cihazı
 - Baldır desteęi
 - ıkarılabilir ayak koyma yerleri
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum iin alyan anahtar veya tornavida (varsa)
-

4. Gvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesini (150 kg) aşmayın.
- Eęimlerde (max. 12°) ve engellerde (max. 10 cm) dikkatli olun; aşırı eęimlerde devrilme riski vardır.
- Emniyet kemerini her zaman doęru şekilde baęlayın; gevşek kemer düşme riski yaratır.
- Yan kolakları açarken veya takarken parmaklarınızı sıkıştırmaktan kaçının.
- Aküyü yalnızca verilen 5 Amp şarj cihazıyla şarj edin; farklı bir cihaz arızaya neden olabilir.
- Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; elektromanyetik fren ve motorlar zarar görebilir.
- Sırtlıęı yatırırken veya kaldırırken yavaş hareket edin.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve, akü, şarj cihazı, baldır desteği, ayak koyma yerleri ve emniyet kemerinin kutuda olduğundan emin olun. Hasar varsa yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye katlanmış halde gelir (katlanır genişlik 35 cm). Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı bastırın. "Klik" sesiyle çerçevenin kilitletiğini kontrol edin.

Adım 3: Yan Kolçakları Takma

Açılabilir yan kolçakları (23 cm yükseklik) yuvalarına yerleştirin ve sabitlendiklerinden emin olun.

Adım 4: Ayak Koyma Yerlerini ve Baldır Desteğini Takma

Çıkarılabilir ayak koyma yerlerini çerçeveye takın ve sabitleyin. Baldır desteğini uygun konuma yerleştirin ve vidalarla sabitleyin.

Adım 5: Akü ve Şarj Kontrolü

Akünün (12 AH) doğru bağlandığını kontrol edin. İlk kullanım öncesi aküyü 5 Amp şarj cihazıyla 8-10 saat şarj edin.

Adım 6: Emniyet Kemerini Takma

Emniyet kemerini bağlantı noktalarına sabitleyin ve kontrol edin.

Adım 7: Tekerlekleri ve Frenleri Kontrol Etme

Arka (16" PNU) ve ön (10" PU) tekerleklerin serbest döndüğünü doğrulayın. Elektromanyetik frenin çalıştığını test edin.

Adım 8: Son Kontrol

Tüm vidaları sıkılaştırın. Tilt mekanizmasını (3°) ve sırtlık yatırma özelliğini test edin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin. Akünün şarjli olduğundan emin olun (max. erim 15 km). Yan kolçakları, baldır desteğini ve ayak koyma yerlerini sabitleyin.

Adım 2: Hasta Transferi

Yan kolçakları açın. Kullanıcıyı sandalyeye yerleştirin, ardından kolçakları kapatın. Emniyet kemerini bağlayın ve sıkılığını ayarlayın. Ayakları baldır desteğiyle birlikte ayak koyma yerlerine yerleştirin.

Adım 3: Sürüş

Joystick (Chinese NewVR2 70A) ile sandalyeyi kontrol edin (max. hız 6 km/s). Elektromanyetik fren, durduğunuzda otomatik devreye girer.

Adım 4: Tilt ve Sırtlık Kullanımı

Oturma açısını (3°) tilt mekanizması ile ayarlayın. Sırtlığı (81 cm) istediğiniz pozisyona yatırarak konforu artırın.

Adım 5: Katlama ve Depolama

Yan kolçakları ve ayak koyma yerlerini çıkarın. Oturma kısmını yukarı çekerek sandalyeyi katlayın (35 cm). Kuru bir alanda saklayın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; çelik gövdeyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin.
- **Akü:** Ayda bir tam şarj edin; kullanılmadığında serin ve kuru yerde saklayın.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.
- **Baldır Desteği:** Nemli bezle silin; sabitliğini kontrol edin.
- **Emniyet Kemer:** Nemli bezle silin; aşınma varsa değiştirin.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Sandalye hareket etmiyor	Akü bitmiş	Aküyü şarj edin (8-10 saat).
Frenler çalışmıyor	Elektromanyetik arıza	Servise başvurun.
Sırtlık yatmıyor	Mekanizma sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; arızalıysa servise başvurun.
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat:** Katlanır tasarım (35 cm) ile araç bagajına kolayca sığar.
- **Güvenli Kullanım:** 12°'den fazla eğimlerden ve 10 cm'den yüksek engellerden kaçının.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (gövde ve motorlar için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım.

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com