



JT-200

Fonksiyonel Akülü Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Jetty markamıza ait JT-200 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye ile hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin günlük yaşamlarını konforlu ve güvenli bir şekilde sürdürmelerini hedefliyoruz. Sağlam çelik gövdesi, kaptan koltuk tasarımı ve güçlü motorlarıyla bu sandalye, hem kullanıcılar hem de refakatçiler için pratik bir çözüm sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

JT-200 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye, Jetty markamıza ait bir mobilite çözümüdür. 65 kg ağırlığındaki çelik gövde, 136 kg taşıma kapasitesi ile dayanıklılık sunar. 12" PU arka tekerlekler ve 8" PU ön tekerlekler, iç ve dış mekanlarda üstün manevra kabiliyeti sağlar (dönüş yarıçapı 58 cm). 2x250W DC motorlar ve elektromanyetik fren sistemi ile donatılmış bu sandalye, 6 km/s maksimum hıza ve 25 km erim mesafesine sahiptir. Kaptan koltuk tasarımı, açılabilir yan kolçaklar (20 cm yükseklik), yatabilen sırtlık (49 cm), yukarı-aşağı ayarlanabilir kafa desteği ve kalkabilir ayak koyma yerleri, kullanıcı konforunu artırır. Arka tekerleklerdeki kırmızı mandal ile manuel ve akülü modlar arasında geçiş yapılabilir. Emniyet kemeri ve tilt özelliği ile JT-200, uzun süreli kullanım ve bağımsızlık arayan bireyler için ideal bir seçenektir.

Kullanım Amacı

JT-200, hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin akülü veya manuel modda, iç ve dış mekanlarda güvenli ve konforlu bir şekilde hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Kaptan koltuk ve ayarlanabilir özellikleriyle uzun süreli oturmalarda rahatlık sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	50 cm
Oturma Yeri Derinliği	44 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	48 cm
Oturma Yeri Açısı	- (tilt mevcut)
Sırtlık Yüksekliği	49 cm (yatılabilir)
Kolçak Yüksekliği	20 cm (açılabilir)
Toplam Genişlik	62 cm
Toplam Yükseklik	110 cm
Toplam Uzunluk	102 cm
Katlanır Genişlik	- (katlanabilir değil)
Arka Tekerlekler	12" PU
Ön Tekerlekler	8" PU
Materyal	Çelik
Ürün Ağırlığı	65 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg
Koli Ölçüleri	84 x 62 x 62 cm
Max. Hız	6.0 km/s
Max. Erim Mesafesi	25 km
Dönüş Yarıçapı	58 cm
Motorlar	DC 24V 250W (2 adet)
Kontrol Aygıtı	European Type 50A
Akü	2 x 32 AH Jel
Şarj Cihazı	5 Amp Off-Board
Fren	Elektromanyetik
Max. Güvenli Eğim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm

3. Kutunun İindekiler

- JT-200 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye
 - Emniyet kemeri
 - 2 x 32 AH Jel akü
 - 5 Amp Off-Board şarj cihazı
 - Kaptan koltuk (ayarlanabilir kafa destekli)
 - Kalkabilir ayak koyma yerleri
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)
-

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesini (136 kg) aşmayın.
- Eğimlerde (max. 12°) ve engellerde (max. 10 cm) dikkatli olun; aşırı eğimlerde devrilme riski vardır.
- Emniyet kemerini her zaman doğru şekilde bağlayın; gevşek kemer düşme riski yaratır.
- Yan kolçakları açarken veya takarken parmaklarınızı sıkıştırmaktan kaçının.
- Aküyü yalnızca verilen 5 Amp şarj cihazıyla şarj edin; farklı bir cihaz kullanmak arızaya neden olabilir.
- Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; elektromanyetik fren ve motorlar zarar görebilir.
- Sırtlığı yatırırken veya kafa desteğini ayarlarken yavaş hareket edin.
- Manuel moda geçmeden önce sandalyeyi durdurun.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve, aküler, şarj cihazı ve emniyet kemerinin kutuda olduğundan emin olun. Hasar varsa yetkili servise başvurun.

Adım 2: Yan Kolçakları Takma

Açılabilir yan kolçakları (20 cm yükseklik) yuvalarına yerleştirin ve sabitlendiklerinden emin olun.

Adım 3: Ayak Koyma Yerlerini Takma

Kalkabilir ayak koyma yerlerini çerçeveye takın ve sabitleyin. Gerekirse yüksekliğini ayarlayın.

Adım 4: Akü ve Şarj Kontrolü

Akülerin (2 x 32 AH) doğru bağlandığını kontrol edin. İlk kullanım öncesi aküyü 5 Amp şarj cihazıyla 8-10 saat şarj edin.

Adım 5: Emniyet Kemerini Takma

Emniyet kemerini bağlantı noktalarına sabitleyin ve kontrol edin.

Adım 6: Tekerlekleri ve Frenleri Kontrol Etme

Arka (12" PU) ve ön (8" PU) tekerleklerin serbest döndüğünü doğrulayın. Elektromanyetik frenin çalıştığını test edin.

Adım 7: Son Kontrol

Tüm vidaları sıkılaştırın. Tilt mekanizmasını, sırtlık yatırma özelliğini ve kafa desteğini test edin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin. Akünün şarjlı olduğundan emin olun (max. erim 25 km). Yan kolçakları ve ayak koyma yerlerini sabitleyin.

Adım 2: Hasta Transferi

Yan kolçakları açın. Kullanıcıyı kaptan koltuğa yerleştirin, ardından kolçakları kapatın. Emniyet kemerini bağlayın ve sıkılığını ayarlayın. Ayakları ayak koyma yerlerine yerleştirin ve gerekirse kaldırın.

Adım 3: Sürüş Modu Seçimi

- **Akülü Mod:** Joystick (European Type 50A) ile sandalyeyi kontrol edin (max. hız 6 km/s).
- **Manuel Mod:** Arka tekerleklerin ortasındaki kırmızı mandalı çekerek motorları devre dışı bırakın; ardından ellerle veya refakatçi yardımıyla hareket ettirin.

Adım 4: Tilt ve Sırtlık Kullanımı

Sırtlığı (49 cm) istediğiniz pozisyona yatırarak konforu artırın. Kafa desteğini yukarı-aşağı ayarlayın.

Adım 5: Depolama

Sandalye katlanabilir değildir. Kullanım sonrası kuru bir alanda saklayın. 65 kg ağırlığı ile geniş bir depolama alanı gerekebilir.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; çelik gövdeyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin.
- **Akü:** Ayda bir tam şarj edin; kullanılmadığında serin ve kuru yerde saklayın.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.
- **Emniyet Kemer:** Nemli bezle silin; aşınma varsa değiştirin.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Sandalye hareket etmiyor	Akü bitmiş	Aküyü şarj edin (8-10 saat).
Frenler çalışmıyor	Elektromanyetik arıza	Servise başvurun.
Sırtlık yatmıyor	Mekanizma sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; arızalıysa servise başvurun.
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin.

9. Ek Bilgiler

- **Depolama:** Katlanabilir olmadığı için geniş bir alanda saklayın. Kuru bir ortamda muhafaza edin.
- **Güvenli Kullanım:** 12°'den fazla eğimlerden ve 10 cm'den yüksek engellerden kaçının.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (gövde ve motorlar için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım, yetkisiz tamir.

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com