



JT-309

Hafif Akülü Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Jetty markamıza ait JT-309 Hafif Akülü Tekerlekli Sandalye ile hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve konforlu bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Hafif alüminyum gövdesi, katlanabilir tasarımı ve güçlü motorlarıyla bu sandalye, hem kullanıcılar hem de refakatçiler için ideal bir çözümdür. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

JT-309 Hafif Akülü Tekerlekli Sandalye, Jetty markamıza ait yenilikçi bir mobilitte çözümdür. 25 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, 150 kg taşıma kapasitesi ile hem hafiflik hem de dayanıklılık sunar. 12" PNU arka tekerlekler ve 8" PU ön tekerlekler, iç ve dış mekanlarda kolay manevra kabiliyeti sağlar (dönüş yarıçapı 58 cm). 2x250W motorlar, 6 km/s maksimum hıza ve 20 km erim mesafesine olanak tanır. Katlanabilir tasarımı (katlanır genişlik 37 cm), açılabilir yan kolçaklar (23 cm yükseklik) ve tilt özelliği (3° oturma açısı), kullanıcı konforunu ön planda tutar. Elektromanyetik fren sistemi güvenliği artırırken, emniyet kemeri ve hafif yapısı ile JT-309, seyahat ve günlük kullanım için mükemmel bir seçenektir.

Kullanım Amacı

JT-309, hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin akülü modda iç ve dış mekanlarda güvenli ve konforlu bir şekilde hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif ve katlanabilir yapısıyla taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	47 cm
Oturma Yeri Derinliği	44 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	51 cm
Oturma Yeri Açısı	3° (tilt)
Sırtlık Yüksekliği	42 cm
Kolçak Yüksekliği	23 cm (açılabilir)
Toplam Genişlik	63 cm
Toplam Yükseklik	99 cm
Toplam Uzunluk	110 cm
Katlanır Genişlik	37 cm
Arka Tekerlekler	12" PNU
Ön Tekerlekler	8" PU
Materyal	Alüminyum
Ürün Ağırlığı	25 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	150 kg
Koli Ölçüleri	82 x 43 x 65 cm
Max. Hız	6.0 km/s
Max. Erim Mesafesi	20 km
Dönüş Yarıçapı	58 cm
Motorlar	2 x DC 250W
Kontrol Aygıtı	Chinese NewVR2 70A
Akü	12 AH Lityum
Şarj Cihazı	5 Amp Off-Board
Fren	Elektromanyetik
Max. Güvenli Eğim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm

3. Kutunun İindekiler

- JT-309 Hafif Akülü Tekerlekli Sandalye
 - Emniyet kemeri
 - 12 AH Lityum akü
 - 5 Amp Off-Board şarj cihazı
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum için alyan anahtar (varsa)
-

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesini (150 kg) aşmayın.
- Eğimlerde (max. 12°) ve engellerde (max. 10 cm) dikkatli olun; aşırı eğimlerde devrilme riski vardır.
- Emniyet kemerini her zaman doğru şekilde bağlayın; gevşek kemer düşme riski yaratır.
- Yan kolçakları açarken veya takarken parmaklarınızı sıkıştırmaktan kaçınin.
- Aküyü yalnızca verilen 5 Amp şarj cihazıyla şarj edin; farklı bir cihaz arızaya neden olabilir.
- Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; elektromanyetik fren ve motorlar zarar görebilir.
- Katlama veya açma işleminde sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatle çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve, akü, şarj cihazı ve emniyet kemerinin kutuda olduğundan emin olun. Hasar varsa yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye katlanmış halde gelir (katlanır genişlik 37 cm). Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı bastırın. "Klik" sesiyle çerçevenin kilitletiğini kontrol edin.

Adım 3: Yan Kolçakları Takma

Açılabilir yan kolçakları (23 cm yükseklik) yuvalarına yerleştirin ve sabitlendiklerinden emin olun.

Adım 4: Akü ve Şarj Kontrolü

Akünün (12 AH Lityum) doğru bağlandığını kontrol edin. İlk kullanım öncesi aküyü 5 Amp şarj cihazıyla 8-10 saat şarj edin.

Adım 5: Emniyet Kemerini Takma

Emniyet kemerini bağlantı noktalarına sabitleyin ve kontrol edin.

Adım 6: Tekerlekleri ve Frenleri Kontrol Etme

Arka (12" PNU) ve ön (8" PU) tekerleklerin serbest döndüğünü doğrulayın. Elektromanyetik frenin çalıştığını test edin.

Adım 7: Son Kontrol

Tüm vidaları sıkılaştırın. Tilt mekanizmasını (3°) test edin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalyeyi düz bir zemine yerleştirin. Akünün şarjlı olduğundan emin olun (max. erim 20 km). Yan kolçakları sabitleyin.

Adım 2: Hasta Transferi

Yan kolçakları açın. Kullanıcıyı sandalyeye yerleştirin, ardından kolçakları kapatın. Emniyet kemerini bağlayın ve sıkılığını ayarlayın.

Adım 3: Sürüş

Joystick (Chinese NewVR2 70A) ile sandalyeyi kontrol edin (max. hız 6 km/s). Elektromanyetik fren, durduğunuzda otomatik devreye girer.

Adım 4: Tilt Kullanımı

Oturma açısını (3°) tilt mekanizması ile ayarlayarak konforu artırın.

Adım 5: Katlama ve Depolama

Yan kolçakları açın. Oturma kısmını yukarı çekerek sandalyeyi katlayın (37 cm). Kuru bir alanda saklayın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; alüminyum gövdeyi kuru tutun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; kirleri nemli bezle silin.
- **Akü:** Ayda bir tam şarj edin; kullanılmadığında serin ve kuru yerde saklayın.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; elde yıkayın ve kurutun.
- **Emniyet Kemer:** Nemli bezle silin; aşınma varsa değiştirin.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Sandalye hareket etmiyor	Akü bitmiş	Aküyü şarj edin (8-10 saat).
Frenler çalışmıyor	Elektromanyetik arıza	Servise başvurun.
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi	Tekerlekleri temizleyin.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat:** Katlanır tasarım (37 cm) ile araç bagajına kolayca sığar.
- **Güvenli Kullanım:** 12°'den fazla eğimlerden ve 10 cm'den yüksek engellerden kaçının.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (gövde ve motorlar için).
- **Kapsam:** Üretim hataları.
- **Kapsam Dışı:** Kullanıcı hatası, uygunsuz bakım.

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com