

S150 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE



KULLANIM KILAVUZU



*Refakatçi tarafından kullanılan ve elle dengelenen,
Döner merdivenlerde kullanılmayan akülü tekerlekli sandalyedir (Tip C).
TS ISO 7176-28: 2014*




Ölçüler:

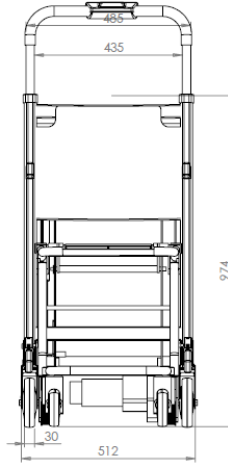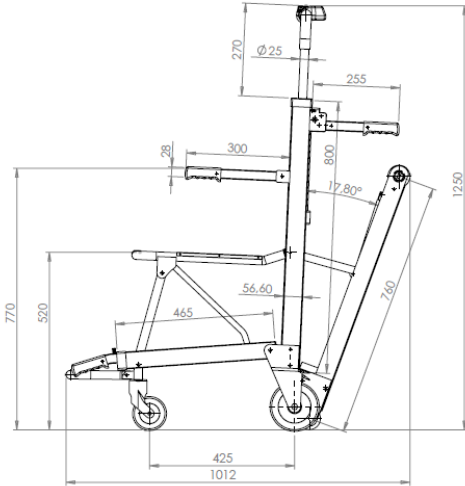


DETAY A
ÖLÇEK 1:5



DETAY B
ÖLÇEK 1:5

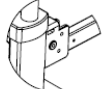

DETAY C
ÖLÇEK 1:5

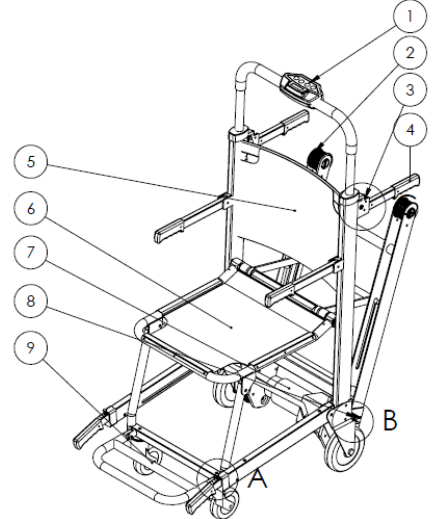


Teknik Özellikler:

Paket Ölçüleri	: 1.100x310x545mm.
Ürün ağırlığı	: 43kg
Taşıma Kapasitesi	: 90kg
Batarya	: Kuru Tip 24v 12ah
Motor	: 120W - 3.000rpm
Şasi	: 6063 Alüminyum

Kullanım Şekli:

1. Kolisinden çıkarılan katlanmış ürün açılarak; sandalye haline getirilir.

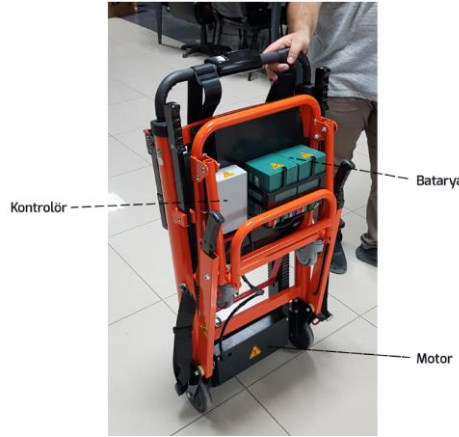

- ✓ Ürünün gövdesi yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı malzemeden imal edilmiştir.
- ✓ Ürünün hafifliği sayesinde acil durumlarda merdivenden aşağı ve yukarı olacak şekilde hasta transferinde kolaylık sağlar.
- ✓ Bir refakatçinin cihazı hazır hale getirmesi ve operatörlüğü ile merdivenden transfer imkânı sağlar.




- ✓ Aküyle çalışan bu akülü tekerlekli sandalye paletli sisteme sahiptir.
- ✓ Kullanıcı kişi önce cihazın üzerine oturur ve refakatçi yardımıyla merdivenlerden çıkıp-iner
- ✓ Hafif yapısı sayesinde depolanması ve kullanılması oldukça kolaydır.
- ✓ Kullanımı oldukça basit ve güvenlidir.
- ✓ Sürüş esnasında refakatçi cihazı bıraksa dahi cihaz güvenli şekilde durmaya devam eder.
- ✓ Kumandasında yer alan tuşlarla hareket eder.

- ✓ Refakatçi tutma kolu yüksekliği istenildiği gibi ayarlanabilir.
Olası bir arıza durumunda iki kişi tarafından manuel olarak transferi sağlayacak yardımcı kollara sahiptir.
- ✓ Cihaz altındaki tekerlekler sayesinde düz zeminde kolayca hareket ettirilebilir (Arka tekerleklerde bağımsız fren mekanizması vardır).

2. Sandalye pozisyonuna gelen cihazın sırt kısmındaki paletlerin arasındaki “Çekiniz” yazan siyah boru aşağıya doğru çekilmek suretiyle paletler açılır.
3. Batarya üzerinde bulunan anahtar “Açık/ I” durumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
4. Hasta oturtulduktan sonra belden emniyet kemeri bağlanır, ayak desteği açılır, tutma kolu yukarı kaldırılır ve “Güç (1)” butonuna 3sn boyunca basılır.




5. Kumanda üzerindeki gösterge (2) ile batarya doluluk oranı kontrol edilir.
6. Merdiven çıkartmak için paletler merdivene yanaştırılır ve palet kısmı merdiven üzerine yatırılır, yukarı çıkma veya aşağı inme butonu ile palet üzerinde cihaz hareket ettirilir, palet merdivene yatırılarak harekete devam edilir.

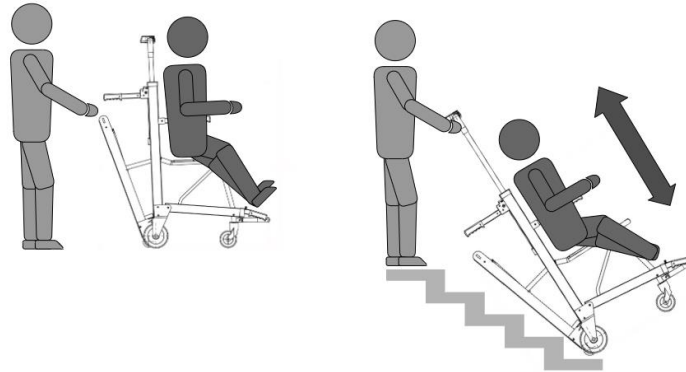

7. Bataryanın tükenmesi, elektriksel bir arıza gibi durumlarda önde ve arkada bulunan taşıma kulpları ile iki refakatçinin cihazı kaldırarak taşınması sayesinde transfer işlemi gerçekleştirilir.
8. Transfer işlemi tamamlanınca yine bir refakatçi ile açılan mekanizmalar ve anahtarlar kapatılarak cihaz katlanmış vaziyette kaldırılabilir.
9. Acil durumlarda cihaza müdahale etmek ve cihazı durdurmak için, kumanda panelinin üzerindeki “acil durum butonuna” basılır.

Cihazın Hareketli Parçalarının Kullanımı

1. Refakatçi manuel üst kollarının kaldırma kilidinin açılması.

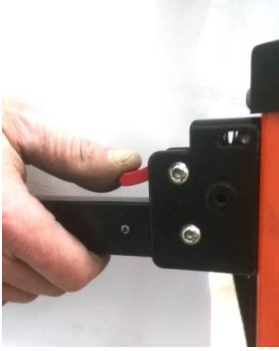

2. Kullanıcı destek kollarının kaldırma kilidinin açılması.



3. Refakatçi manuel alt kollarının kaldırma kilidinin açılması.



4. Emniyet Kemerinin takılması.



5. Ayak basma pedalının açılması.



6. Refakatçinin cihazı çekme kolunun kilidin açılması.



7. Teker freninin ayakla basılarak aktif hale getirilmesi.



8. Taşıyıcı palet kayışın gerginlik ayarının yapılması.



Cihazı Şarj Etme:

BATARYA AÇMA KAPAMA TUŞU

ŞARJ GİRİŞİ



1. Şarj adaptörünün ucunu, şarj soketine takınız.
2. Acil durum butonunun açık konumda (basılı konumda) olmamasına dikkat ediniz.
3. Cihazı ilk aldığınızda 12 saat şarjda kalması gerekmektedir.
4. Cihaz şarj olurken; şarj kablosu, birisinin takılıp düşmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.
5. Cihaz şarj olurken kullanılmamalıdır.
6. Cihazın aküleri hava alan bir yerde şarj edilmelidir.

Uygulama Alanları:

Eğitim ve sağlık birimleri, kamu binaları, toplu konut yapılarında ve evlerde yaşlı/yaralı ve engelli transferinde kolaylıkla kullanılabilir

Dikkat:

1. Merdivenler, hasta, yaşlı ve engelli transferinde riskli bir konu olduğundan; özellikle eğitim almış, araç hâkimiyeti olan ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır. Bu sorumluluğun verildiği kişiler özenle seçilmelidir.
2. Hasta transferi sırasında emniyet kemerlerinin takılı olduğundan emin olunuz.
3. Transfer öncesi palet, kemer, kablolar, batarya ve genel mekanizmada herhangi bir deformasyon olmadığından emin olunuz.
4. Ürünü, güneş görmeyen, nemsiz ve kuru ortam koşullarında muhafaza ediniz.
5. Sevkiyat aşamasında ambalajıyla taşınması tavsiye edilir.
6. Cihazın sökülecek herhangi bir parçası yoktur.
7. Düz olmayan temiz zeminlerde kullanılmalıdır.
8. Zeminde ıslaklık ve kayganlaştırıcı bir madde bulunmamasına dikkat edilmelidir.
9. Bol, sarkan, sallanan giysi ve aksesuarlarla cihazın kullanılmaması.
10. Cihaz uzun süreli çalıştırıldığında motorunun ısınacaktır; çalıştırdığınız süreni %15'i kadar boşta dinlendirilmelidir.

İletişim:



Karadeniz Medikal Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

info@karadenizmed.com www.karadenizmed.com