



Golfi

CE

G100Y

Standart Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G100Y Standart Tekerlekli Sandalye ile hareket özgürlüğünüzü destekliyoruz. Bu kılavuz, ürünün teknik özelliklerini, kurulumunu ve güvenli kullanımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

G100Y Standart Tekerlekli Sandalye, engelli bireyler için konfor, güvenlik ve dayanıklılık sunan ekonomik bir çözümdür. Çelik şasisi ve katlanabilir tasarımıyla pratiklik sağlar. 46 cm koltuk genişliği ve 120 kg taşıma kapasitesi ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. 24" silikon dolgu arka tekerlekler ve 8" PVC ön tekerleklerle donatılmıştır.

Kullanım Amacı

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için iç mekân ve düz dış mekânlarda bireysel veya refakatçi kontrollü kullanım için tasarlanmıştır.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Model	G100Y
Çerçeve Malzemesi	Çelik (1.2 mm kalınlık)
Yüzey Kaplama	Elektrostatik toz boya
Koltuk Geniřlięi	46 cm
Koltuk Derinlięi	40 cm
Koltuk Yükseklięi	50 cm (yerden)
Toplam Geniřlik	65 cm
Toplam Uzunluk	105 cm (ayak paletleriyle)
Toplam Yükseklik	90 cm
Tařıma Kapasitesi	120 kg
Net Aęırlık	18 kg
Arka Tekerlek	24" silikon dolgu, 5 cm geniřlik
Ön Tekerlek	8" PVC, 360° döner
Fren Sistemi	Manuel el freni (çift taraflı)
Katlanabilirlik	Evet, yan çerçeve menteřeli
Ayak Paleti	Çıkarılabilir, yükseklik ayarlı
Koltuk ve Sirt Döřemesi	Ekose kumař
Garanti Süresi	2 yıl

3. Kutunun İindekiler

- G100 Standart Tekerlekli Sandalye (katlanmış, ayak paletleri takılı)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 120 kg yük kapasitesini aşmayın.
 - 10°'den fazla eğimli zeminlerde refakatçi desteği alın.
 - Sandalyeyi suya maruz bırakmayın; kuru tutun.
 - Frenler kilitlenmeden oturmayın veya kalkmayın.
-

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

- Kutuyu düz bir zeminde açın ve sandalyeyi çıkarın.
- Çerçeveyi, tekerlekleri ve takılı ayak paletlerini hasar açısından kontrol edin.

Adım 2: Sandalyeyi Açma

- Katlanmış sandalyeyi oturma kısmından tutarak aşağı bastırın. Yan çerçeveleri tam açılana kadar iki yana çekin; "klik" sesini duyduğunuzda sandalye hazırdır.



Adım 3: Ayak Paleti Ayarı

- Ayak paletleri kutuda takılı gelir. Kullanıcı boyuna göre yüksekliğini ayarlayın.
- Paletlerin alt kısmındaki vidaları gevşetin, istenen yüksekliğe getirin ve vidaları sıkın.
- Gerekirse paletleri çıkarmak için çerçevenin ön borularındaki kilitleme pimlerini çekin.

Adım 4: Tekerlek ve Fren Kontrolü

- Arka tekerleklerin akslarının çerçeveye tam oturduğunu kontrol edin.
- Ön tekerleklerin 360° döndüğünden emin olun.
- Fren kollarını sıkarak tekerleklerin kilitlendiğini test edin.

Adım 5: Son Kontrol

- Tüm vidaları sıkılaştırın (gerekirse alıyan anahtar kullanın).
- Sandalyeyi hafifçe sallayarak gevşeklik olup olmadığını kontrol edin.

6. Kullanım Talimatları

Kullanıcı Tarafından Kullanım

1. Frenleri kilitleyin (kollar aşağıda).
2. Yan tarafınızdan yaklaşarak yavaşça oturun.
3. Ayaklarınızı paletlere yerleştirin.
4. Frenleri serbest bırakın (kollar yukarı).
5. Arka tekerlek çemberlerini kullanarak hareket edin.

Refakatçi Tarafından Kullanım

1. Kullanıcı oturmadan frenleri kilitleyin.
2. Kullanıcı oturduktan sonra frenleri serbest bırakın.
3. Arka tutma kollarından sandalyeyi itin.
4. Durmak için frenleri kilitleyin.

Katlama

1. Frenleri kilitleyin.
2. Ayak paletlerini çıkarın (isteğe bağlı).
3. Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi kapatın.
4. Katlanmış halde saklayın veya taşıyın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin.
- **Tekerlekler:** Haftalık kir kontrolü yapın; silikon yağ ile aksları yağlayın.
- **Frenler:** Aylık mekanizma kontrolü yapın.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler zor dönüyor	Akslarda kir birikimi	Tekerlekleri temizleyin, yağlayın
Frenler tutmuyor	Fren teli gevşemiş	Servise başvurun
Sandalye açılmıyor	Menteşe sıkışması	Zorlamayın, teknik destek alın

9. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, çarpma, aşırı yükleme).
 - Uygunsuz bakım (suya maruz bırakma, aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlek yüzeyi, koltuk kumaşı vb.).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com

