



S550

Atto Mini Scooter

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal Scuba markasıyla sunduğumuz S550 ATTO Mini Scooter, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için kompakt, taşınabilir ve konforlu bir mobilite çözümü sunmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, 28.2 kg ağırlığında hafif gövdesi ile kolay taşınabilir bir yapı sunar. Siyah renkli modern bir tasarıma sahiptir. Toplam boyutları 57x123x87 cm'dir ve katlandığında genişliği 39 cm'ye kadar küçülür, böylece bir valizden daha az yer kaplar. Maksimum hız 6.0 km/h, dönüş yarıçapı 1.35 m'dir. 48V lityum akü ile donatılmıştır ve 20 km erim mesafesi sunar. Ayarlanabilir direksiyon, ergonomik koltuk (oturma yeri genişliği 37 cm, derinliği 35 cm, yüksekliği 61 cm), kaymaz 10" PU tekerlekler ve elektromanyetik fren sistemi ile kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Katlanabilir yapısı, otobüs, uçak veya binek araçla seyahatlerde kolay saklama imkanı sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Scuba S550 ATTO Mini Scooter, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, kompakt ve taşınabilir bir mobilite cihazıdır. 28.2 kg ağırlığında hafif gövdesi, katlanabilir yapısıyla dikkat çeker; siyah renk şemasıyla modern bir görünüm sağlar. Toplam boyutları 57x123x87 cm'dir ve katlandığında genişliği 39 cm'ye kadar küçülerek bir valizden daha az yer kaplar. Maksimum hız 6.0 km/h, dönüş yarıçapı 1.35 m'dir. 48V lityum akü ile donatılmıştır; motorlar DC fırçasız tipindedir (tahmini 250W, Movinglife ATTO serisine dayanarak). Maksimum taşıma kapasitesi 120 kg'dır. Kaymaz 10" PU tekerlekler, elektromanyetik fren sistemi, ayarlanabilir direksiyon ve ergonomik koltuk (oturma yeri genişliği 37 cm, derinliği 35 cm, yüksekliği 61 cm, sırtlık yüksekliği 31 cm, kolçak yüksekliği 85 cm) ile kullanıcı konforunu artırır. Katlanabilir yapısı, otobüs, uçak veya binek araçla seyahatlerde kolay saklama imkanı sunar.

Kullanım Amacı

S550 ATTO Mini Scooter, kullanıcıların bağımsız bir şekilde hareket etmelerini ve günlük aktivitelerine katılmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Kompakt boyutları ve katlanabilir yapısı, hem iç mekan hem de dış mekan kullanımına uygundur. Ayarlanabilir direksiyon, kullanıcının boyuna göre özelleştirilebilir; ergonomik koltuk, uzun süreli kullanımda konfor sağlar. Dar alanlarda manevra kabiliyeti (1.35 m dönüş yarıçapı) ile kullanıcıların her alanda yardıma ihtiyaç duymadan hareket etmesine olanak tanır.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	37 cm
Oturma Yeri Derinliği	35 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	61 cm
Oturma Yeri Açısı	–
Sırtlık Yüksekliği	31 cm
Kolçak Yüksekliği	85 cm
Toplam Genişlik	57 cm
Toplam Yükseklik	87 cm
Toplam Uzunluk	123 cm
Katlanır Genişlik	39 cm
Arka Tekerler	10" PU
Ön Tekerler	10" PU
Materyal	Avilion Aluminium
Ürün Ağırlığı	28.2 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	120 kg

Özellik	Detay
Koli Ölçüleri	80x42x50 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 167 – 40'DC / 387
Max. Hız	6.0 km/h
Max. Erim Mesafesi	20 km
Dönüş Yarıçapı	1.35 m (53")
Motorlar	DC Motor
Kontrol Aygıtı	LED Ekranlı
Akü	48V Lityum / Lithium
Şarj Cihazı	110-240V AC
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic
Max. Güvenli Eğim	6°
Tilt	–

3. Kutunun İçindekiler

- Scuba S550 ATTO Mini Scooter (montaj gerektirebilir)
- Akü (48V Lityum)
- Şarj cihazı (110-240V AC)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

4. Güvenlik Uyarıları

- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda (6°'den fazla eğim) kayma veya devrilme riski vardır.
- Maksimum taşıma kapasitesine (120 kg) uygun; aşımı cihazın zarar görmesine yol açabilir.

- Tekerleklerin (10" PU) düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değiştirin.
- Aküyü (48V Lityum) yalnızca orijinal şarj cihazı ile şarj edin (110-240V AC); yanlış şarj cihazı aküye zarar verebilir.
- Fren sistemini (elektromanyetik) düzenli kontrol edin; arıza durumunda yetkili servise başvurun.
- Katlama ve açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun; sıkışma riski vardır (Pinch Point).
- İlk kullanımda bir refakatçi gözetiminde kullanın; özellikle katlama ve direksiyon ayarlama işlemlerini öğrenmek için.
- Freewheel modunda (manuel serbest tekerlek) dikkatli olun; bu modda fren sistemi devre dışıdır ve scooter kolayca hareket edebilir.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Scooter gövdesi, tekerlekler (10" PU), direksiyon, koltuk, akü (48V Lityum), kontrol aygıtı ve şarj cihazı (110-240V AC) gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Scooterı Açma

Scooter katlanmış halde kutudan çıkacaktır. Katlama mekanizmasını kullanarak scooterı açın:

1. Scooterı düz bir zemine yerleştirin.
2. Koltuğu yukarı çekerek açın ve kilitletiğinden emin olun.
3. Direksiyonu yukarı kaldırın ve sabitleyin. Açma işlemi sırasında hareketli parçalara dikkat edin ve ellerinizi sıkıştırmaktan kaçının (Pinch Point).

Adım 3: Tekerlek ve Fren Kontrolü

Tekerlekleri (10" PU) kontrol edin; düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve döndüğünden emin olun. Fren sistemini (elektromanyetik) test edin; kontrol aygıtı üzerinden frenin kilitlendiğini doğrulayın.

Adım 4: Ayarlanabilir Parçaların Ayarı

- **Direksiyon:** Direksiyonu kullanıcının boyuna göre ayarlayın; düzgün kilitlendiğinden emin olun.
- **Koltuk:** Koltuk yüksekliği (61 cm) sabittir, ancak oturma pozisyonunu kontrol ederek rahat bir pozisyon sağlayın.

Adım 5: Akü ve Şarj

Aküyü (48V Lityum) kontrol edin; bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun. İlk kullanım öncesi aküyü 110-240V AC şarj cihazı ile tam şarj edin (genellikle 4-6 saat, Movinglife ATTO serisine dayanarak).

Adım 6: Kontrol Aygıtı Kontrolü

Kontrol aygıtını test edin; hız ayarı (6.0 km/h), yönlendirme ve fren fonksiyonlarının çalıştığını doğrulayın. LED ekranın çalıştığından emin olun.

Adım 7: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşeklik varsa sıkılaştırın. Scooterı hafifçe test ederek stabiliteyi doğrulayın. Tekerlekler, kontrol aygıtı ve direksiyonun düzgün çalıştığını bir kez daha kontrol edin. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Akünün tam şarj olduğundan (20 km erim mesafesi için) emin olun. Tekerleklerin (10" PU) zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Scooterı Kullanma

Scooterı açın ve koltuğa oturun. Direksiyonu uygun yüksekliğe ayarlayın. Kontrol aygıtını kullanarak scooterı çalıştırın. Hız ayarı (maks. 6.0 km/h) ve yönlendirme için kontrol aygıtını kullanın. Yavaş ve dengeli hareket edin; dönüş yarıçapı 1.35 m'dir, dar alanlarda dikkatli olun.

Adım 3: Katlama ve Trolley Modu

Scooterı katlamak için:

1. Scooterı düz bir zemine yerleştirin.
2. Direksiyonu indirin ve koltuğu katlayın.
3. Katlama mekanizmasını kullanarak scooterı katlayın; katlandığında genişlik 39 cm'ye küçülür. Trolley moduna geçmek için:
4. Direksiyon çubuğunu çekin ve 180 derece döndürün.
5. Scooterı trolley gibi çekerek taşıyın.

Adım 4: Şasi Ayırma ve Birleştirme

Scooterın ön ve arka şasisi ayrılabilir:

- **Ayırma:** Direksiyonu sabitleyin, ayırma kollarını açın ve merkezi serbest bırakma düğmesine basarak şasiyi ayırın.
- **Birleştirme:** Şasileri hizalayın, birleştirin ve ayırma kollarını kilitleyin.

Adım 5: Şarj

Akü seviyesi düşükse, 110-240V AC şarj cihazı ile şarj edin (4-6 saat). Şarj sırasında aküyü scooterda bırakabilir veya çıkararak şarj edebilirsiniz.

7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; 10" PU tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Aşınma veya hasar varsa değiştirin.
- **Koltuk:** Koltuğu nemli bezle silin; aşındırıcı temizleyicilerden kaçın.
- **Akü ve Elektronik Aksam:** Akü bağlantılarını düzenli kontrol edin; nemden koruyun. Kontrol aygıtını tozdan arındırın.
- **Yağlama:** Katlama mekanizmalarını ve tekerlek millerini her 6 ayda bir hafif bir yağlayıcı ile yağlayın (Movinglife ATTO serisine dayanarak).

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Scooter hareket etmiyor	Akü bitmiş veya bağlantı gevşek	Aküyü şarj edin (110-240V AC); bağlantıları kontrol edin.
Tekerlekler dönmüyor	Tekerlek mekanizması sıkışmış	Tekerlekleri temizleyin; kir veya hasar varsa değiştirin.
Katlama mekanizması çalışmıyor	Mekanizma sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; kir varsa temizleyin veya servise başvurun.
Direksiyon rahatsız	Yanlış ayarlanmış	Direksiyonu yeniden ayarlayın ve sabitleyin.
Gövde paslandı	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulayın ve pas önleyici spreย์ uygulayın; servise danışın.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Scooterı katlayarak (genişlik 39 cm) kolayca taşıyın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek gövdeyi paslanmaya karşı koruyun. Aküyü %60 şarj seviyesinde saklayın.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Tekerlekleri, kontrol aygıtını ve katlama mekanizmasını düzenli aralıklarla denetleyin. Kaymaz zeminlerde kullanın.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi nemden koruyarak paslanmayı önleyin. Akü ve tekerleklerin düzenli bakımını yapın.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, çerçeve için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, koltuk).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com