



PR-844

Quadripod Baston

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Loco markamızla sunduğumuz PR-844 Quadripod Baston ile engelli bireylerin, yaşlıların veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin denge ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, hafif alüminyum gövdesi, ayarlanabilir yükseklik, quadripod taban tasarımı ve kaymaz kauçuk uçları ile maksimum stabilite sunar. Gri renkli parçalarıyla sade bir görünüm sunarken, ergonomik tutma kolu ile kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-844 Quadripod Baston, engelli bireyler, yaşlılar veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir dört ayaklı bastondur. 0.84 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, gri renkli parçalarıyla sade bir görünüm sunar. 74-98 cm ayarlanabilir yükseklik aralığı ile farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Dört ayaklı quadripod taban tasarımı, tripod bastonlara göre daha fazla denge ve destek sağlarken, ergonomik tutma kolu rahat bir kavrama sunar. Kaymaz kauçuk uçlar, zeminde iz bırakmadan güvenli bir tutuş sağlar. PR-844, hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için idealdir ve taşınabilirliği ile öne çıkar.

Kullanım Amacı

PR-844, kullanıcıların günlük yaşamda denge desteği olarak güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Quadripod taban, standart ve tripod bastonlara göre daha fazla stabilite sunar ve özellikle ciddi denge sorunları yaşayan bireyler için uygundur. Ayarlanabilir yükseklik özelliği, farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Hafif yapısı, kullanıcıların bastonu kolayca yanlarında taşımasına olanak tanır.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	-
Toplam Yükseklik	74-98 cm
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	0.84 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	-
Koli Ölçüleri	80-26-45 cm
Parçaların Rengi	Gri / Grey
Karton Adedi	10 Adet / Piece

3. Kutunun İçindekiler

- PR-844 Quadripod Baston (montaj gerektirebilir)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

4. Güvenlik Uyarıları

- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda kayma riski vardır.
- Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum gövdeyi kurulaşın.
- Yükseklik ayarı yaparken dikkatli olun; yanlış ayar dengesizliğe neden olabilir.
- Quadripod tabanın tüm dört ayağının zemine tam oturduğundan emin olun; eksik temas düşme riski yaratabilir.
- Kaymaz kauçuk uçları düzenli olarak kontrol edin; aşınma varsa değiştirin.
- Bastonu yalnızca denge desteği olarak kullanın; üzerine aşırı yük bindirmeyin.

- Kullanıcıyı desteklerken refakatçi dikkatli olmalıdır; ilk kullanımda profesyonel rehberlik alın.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Bastonun gövdesi, quadripod tabanı ve kauçuk uçların kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Yükseklik Ayarı Yapma

Toplam yükseklik 74–98 cm arasında ayarlanabilir. Kullanıcının boyuna uygun şekilde ayar mekanizmasını (genellikle bir düğme veya klips sistemi) kullanarak istenen yüksekliği seçin ve sabitleyin. Kullanıcının dirseği yaklaşık 20–30 derece bükülü olmalıdır; bu, doğru yükseklik ayarı için genel bir kriterdir.

Adım 3: Quadripod Tabanı Kontrol Etme

Quadripod tabanın dört ayağının da düzgün bir şekilde yerleştirildiğini ve sabit olduğunu kontrol edin. Ayakların zemine tam temas ettiğinden emin olun; dengesizlik varsa tabanı kontrol edin.

Adım 4: Kauçuk Uçları Kontrol Etme

Kaymaz kauçuk uçların (quadripod tabanın her ayağında) düzgün bir şekilde yerleştirildiğini ve aşınma olmadığını kontrol edin. Uçların zeminde iz bırakmadığından ve kaymadığından emin olun.

Adım 5: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşeklik varsa sıkılaştırın. Bastonu hafifçe yere koyarak sabitliği test edin. Yükseklik ayarı, quadripod taban ve kauçuk uçların düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Yükseklik ayarını (74–98 cm) kullanıcının boyuna göre yapın. Quadripod tabanın dört ayağının da zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Denge Desteği Kullanımı

Kullanıcı, bastonu sağlıklı tarafındaki eliyle tutsun (örneğin, sağ bacakta sorun varsa baston sol elle tutulmalıdır). Ergonomik tutma kolunu sıkıca kavrayarak quadripod tabanı yere koyun ve adım atarken denge desteği alın. Quadripod taban, maksimum stabilite sağlar; ancak kullanıcı yavaş ve dengeli adımlar atmalıdır. Baston, adım atılan ayağın tersi yönde hareket ettirilmelidir (örneğin, sağ adım atarken baston sola doğru hareket eder).

Adım 3: Taşıma

Baston (0.84 kg) taşınabilir bir ağırlıktadır ve kolayca bir çantaya veya torbaya yerleştirilebilir.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum gövdeyi kurulayın.
- **Tutma Kolu:** Tutma kolunu nemli bezle nazikçe silin; aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- **Kauçuk Uçlar:** Haftalık temizlik yapın; quadripod tabanın her ayağındaki kauçuk uçlarda biriken kirleri nemli bezle silin. Aşınma varsa değiştirin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-844 Quadripod Baston ile karşılaşılabilen yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Baston kayıyor	Kauçuk uçlar aşınmış	Kauçuk uçları kontrol edin; aşınma varsa yenisiyle değiştirin.
Yükseklik ayarı değişmiyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazikçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Quadripod taban sallanıyor	Vidalar veya bağlantılar gevşemiş	Tüm bağlantıları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Quadripod taban dengesiz	Bir ayak zemine tam temas etmiyor	Tabanı kontrol edin; tüm ayakların zemine oturduğundan emin olun.
Tutma kolu rahatsız	Tutma kolu aşınmış	Tutma kolunu kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Alüminyum gövdede korozyon	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulayın ve etkilenen bölgeleri temizleyin; servise danışın.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Hafif yapısı sayesinde bastonu kolayca taşıyın ve çanta veya torbada saklayın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi korozyona karşı koruyun.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Yükseklik ayarını kullanıcıya uygun şekilde yapın. Quadripod tabanın tüm ayaklarının zemine tam temas ettiğinden emin olun. Kauçuk uçları düzenli kontrol edin ve kaymaz zeminlerde kullanın.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum gövdeyi nemden koruyarak korozyonu önleyin. Kauçuk uçların ve quadripod tabanın düzenli bakımını yapın.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk uçlar, tutma kolu).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com