



PR-440

Alüminyum Walker

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / ISTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Loco markamızla sunduğumuz PR-440 Alüminyum Walker (Yürüteç) ile engelli bireylerin, yaşlıların veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin mobilite ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, hafif alüminyum gövdesi, 8 kademeli yükseklik ayarı, kaymaz kauçuk pabuçları ve tek butonla katlanma özelliği ile pratik bir çözüm sunar. Ergonomik köpük el tutamaçları ve dayanıklı yapısı ile kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-440 Alüminyum Walker, engelli bireyler, yaşlılar veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir yürüteçtir. 2.24 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, gri renkli parçalarıyla sade ve işlevsel bir görünüm sunar. 75-94 cm ayarlanabilir yükseklik aralığı, 8 kademeli yükseklik ayarı ve ergonomik köpük el tutamaçları ile kullanıcıya özel konfor sağlar. Kaymaz kauçuk pabuçlar, zeminde iz bırakmadan güvenli bir tutuş sunar. Tek butonla katlanma özelliği sayesinde kolayca taşınabilir ve depolanabilir. PR-440, iç mekan kullanımı için idealdir.

Kullanım Amacı

PR-440, kullanıcıların günlük yaşamda bağımsız hareket etmelerini kolaylaştırmak ve yürüme sırasında destek sağlamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir yükseklik özelliği ile farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Katlanabilir tasarımı, taşıma ve depolama kolaylığı sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	67 cm
Toplam Yükseklik	75-94 cm
Toplam Uzunluk	49 cm
Katlanır Genişlik	-
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	2.24 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	-
Koli Ölçüleri	55-29-80 cm
Parçaların Rengi	Gri / Grey
Karton Adedi	4 Adet / Piece

3. Kutunun İçindekiler

- PR-440 Alüminyum Walker (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda kayma riski vardır.
 - Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum gövdeyi kurulaşın.
 - Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
 - Yükseklik ayarı yaparken dikkatli olun; yanlış ayar dengesizliğe neden olabilir.
 - Kaymaz kauçuk pabuçları düzenli olarak kontrol edin; aşınma varsa değiştirin.
 - Kullanıcıyı desteklerken refakatçi dikkatli olmalıdır.
-

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin ve kauçuk pabuçların kutu da olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Ürün katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için tek buton mekanizmasını kullanarak yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilitletiğini duyduğunuzda (genellikle bir “klik” sesi çıkar) ürün düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

Adım 3: Yükseklik Ayarı Yapma

Toplam yükseklik 75–94 cm arasında 8 kademedeyi ayarlanabilir. Kullanıcının boyuna uygun şekilde ayar mekanizmasını kullanarak istenen yüksekliği seçin ve sabitleyin. Ayar sırasında tüm bacakların aynı kademedeyi olduğundan emin olun.

Adım 4: Kauçuk Pabuçları Kontrol Etme

Kaymaz kauçuk pabuçların düzgün bir şekilde yerleştirildiğini ve aşınma olmadığını kontrol edin. Pabuçlar zeminde iz bırakmamalı ve kaymamalıdır.

Adım 5: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Ürünü sallayarak sabitliği test edin. Yükseklik ayarı ve kauçuk pabuçların düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Yükseklik ayarını (75–94 cm) kullanıcının boyuna göre yapın. Kauçuk pabuçların zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Yürüme Desteği Kullanımı

Kullanıcı, ergonomik köpük el tutamaçlarına tutunarak ürünü yürüteç olarak kullanarak destek alsın. Yürürken yavaş ve dengeli adımlar atın. Ürünü hafifçe ileri doğru hareket ettirerek adım adım ilerleyin.

Adım 3: Katlama ve Taşıma

Ürünü katlamak için tek buton mekanizmasını kullanın ve yan çerçeveleri içe doğru kapatın. Katlanmış ürünü (2.24 kg) kolayca taşıyın veya depolama alanına yerleştirin.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum gövdeyi kurulayın.
- **El Tutamaçları:** Köpük el tutamaçlarını nemli bezle nazıkçe silin; aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- **Kauçuk Pabuçlar:** Haftalık temizlik yapın; pabuçlarda biriken kirleri nemli bezle silin. Aşınma varsa değiştirin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-440 Alüminyum Walker ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Ürün kayıyor	Kauçuk pabuçlar aşınmış	Pabuçları kontrol edin; aşınma varsa yenisiyle değiştirin.
Yükseklik ayarı değişmiyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazıkçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Ürün sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Ürün katlanmıyor	Katlama mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; kir varsa temizleyin ve tekrar deneyin.
El tutamaçları rahatsız	Köpük aşınmış	El tutamaçlarını kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Alüminyum gövdede korozyon	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulayın ve etkilenen bölgeleri temizleyin; servise danışın.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Tek butonla katlama özelliği sayesinde ürünü kolayca taşıyın ve depolayın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi korozyona karşı koruyun.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Yükseklik ayarını kullanıcıya uygun şekilde yapın. Kauçuk pabuçları düzenli olarak kontrol edin ve kaymaz zeminlerde kullanın.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum gövdeyi nemden koruyarak korozyonu önleyin. Kauçuk pabuçların ve ayar mekanizmalarının düzenli bakımını yapın.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk pabuçlar, el tutamaçları).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com