



# PR-441

Alüminyum Tekerlekli Walker

## Kullanım Kılavuzu

### **OFİS**

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5  
D:28 Town Ofis Bahçelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

### **FABRİKA**

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB  
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Loco markamızla sunduğumuz PR-441 Alüminyum Tekerlekli Walker ile engelli bireylerin, yaşlıların veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin mobilite ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, hafif alüminyum gövdesi, 8 kademeli yükseklik ayarı, küçük kaymaz tekerlekleri ve tek butonla katlanma özelliği ile pratik bir çözüm sunar. Ergonomik köpük el tutamaçları ve dayanıklı yapısı ile kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

---

## 1. Ürün Tanıtımı

### Ürün Açıklaması

Loco PR-441 Alüminyum Tekerlekli Walker, engelli bireyler, yaşlılar veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir tekerlekli yürüteçtir. 2.62 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, gri renkli parçalarıyla sade ve işlevsel bir görünüm sunar. 82-94 cm ayarlanabilir yükseklik aralığı, 8 kademeli yükseklik ayarı ve küçük kaymaz tekerlekleri ile kullanıcıya özel konfor ve hareket kolaylığı sağlar. Ergonomik köpük el tutamaçları, rahat tutuş sunarken tek butonla katlanma özelliği sayesinde kolayca taşınabilir ve depolanabilir. PR-441, iç mekan kullanımı için idealdir.

### Kullanım Amacı

PR-441, kullanıcıların günlük yaşamda bağımsız hareket etmelerini kolaylaştırmak ve yürüme sırasında destek sağlamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir yükseklik özelliği ile farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Tekerlekli tasarımı, kaymaz tekerleklerle zeminde stabilite sunar ve katlanabilir yapısı, taşıma ve depolama kolaylığı sağlar.

## 2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	67 cm
Toplam Yükseklik	82-94 cm
Toplam Uzunluk	53 cm
Katlanır Genişlik	-
Materyal	Alüminyum / Alüminyum
Ürün Ağırlığı	2.62 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	-
Koli Ölçüleri	55-32-85 cm
Parçaların Rengi	Gri / Grey
Karton Adedi	4 Adet / Piece

## 3. Kutunun İçindekiler

- PR-441 Alüminyum Tekerlekli Walker (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

#### 4. Güvenlik Uyarıları

- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda kayma riski vardır.
  - Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum gövdeyi kurulaşın.
  - Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
  - Yükseklik ayarı yaparken dikkatli olun; yanlış ayar dengesizliğe neden olabilir.
  - Tekerleklerin kaymaz özelliklerini düzenli olarak kontrol edin; aşınma varsa değiştirin.
  - Kullanıcıyı desteklerken refakatçi dikkatli olmalıdır.
- 

#### 5. Kurulum Talimatları

##### Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin, tekerleklerin ve kauçuk pabuçların kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

##### Adım 2: Çerçeveyi Açma

Ürün katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için tek buton mekanizmasını kullanarak yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilitlendiğini duyduğunuzda (genellikle bir "klik" sesi çıkar) ürün düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

### **Adım 3: Yükseklik Ayarı Yapma**

Toplam yükseklik 82–94 cm arasında 8 kademede ayarlanabilir. Kullanıcının boyuna uygun şekilde ayar mekanizmasını kullanarak istenen yüksekliği seçin ve sabitleyin. Ayar sırasında tüm bacakların aynı kademede olduğundan emin olun.

### **Adım 4: Tekerlekleri Kontrol Etme**

Küçük kaymaz tekerleklerin düzgün bir şekilde yerleştirildiğini ve aşınma olmadığını kontrol edin. Tekerleklerin zeminde kolayca hareket ettiğini ve kaymadığını test edin.

### **Adım 5: Son Kontrol**

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Ürünü sallayarak sabitliği test edin. Yükseklik ayarı ve tekerleklerin düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

---

## **6. Kullanım Talimatları**

### **Adım 1: Hazırlık**

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Yükseklik ayarını (82–94 cm) kullanıcının boyuna göre yapın. Tekerleklerin zemine tam oturduğundan emin olun.

### **Adım 2: Yürüme Desteği Kullanımı**

Kullanıcı, ergonomik köpük el tutamaçlarına tutunarak ürünü tekerlekli yürüteç olarak kullanarak destek alsın. Yürürken yavaş ve dengeli adımlar atın. Tekerlekleri hafifçe ileri doğru hareket ettirerek adım adım ilerleyin.

### Adım 3: Katlama ve Taşıma

Ürünü katlamak için tek buton mekanizmasını kullanın ve yan çerçeveleri içe doğru kapatın. Katlanmış ürünü (2.62 kg) kolayca taşıyın veya depolama alanına yerleştirin.

### 7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum gövdeyi kurulaştırın.
- **El Tutamaçları:** Köpük el tutamaçlarını nemli bezle nazikçe silin; aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Aşınma varsa değiştirin.

### 8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-441 Alüminyum Tekerlekli Walker ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler kayıyor	Tekerlekler aşınmış	Tekerlekleri kontrol edin; aşınma varsa yenisiyle değiştirin.
Yükseklik ayarı değişmiyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazikçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Ürün sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Ürün katlanmıyor	Katlama mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; kir varsa temizleyin ve tekrar deneyin.
El tutamaçları rahatsız	Köpük aşınmış	El tutamaçlarını kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Alüminyum gövdede korozyon	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulaştırın ve etkilenen bölgeleri temizleyin; servise danışın.

## 9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Tek butonla katlama özelliği sayesinde ürünü kolayca taşıyın ve depolayın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi korozyona karşı koruyun.
  - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Yükseklik ayarını kullanıcıya uygun şekilde yapın. Tekerleklerin kaymaz özelliklerini düzenli olarak kontrol edin ve kaymaz zeminlerde kullanın.
  - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum gövdeyi nemden koruyarak korozyonu önleyin. Tekerleklerin ve ayar mekanizmalarının düzenli bakımını yapın.
- 

## 10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
  - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
  - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
  - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
  - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, el tutamaçları).

**İletişim Bilgileri:**

**Ofis:**

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com) | [export@karadenizmed.com](mailto:export@karadenizmed.com)

**Fabrika:**

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com)