



PR-771

Tekerlekli Katlanır Komot

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahçelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Loco markamızla sunduğumuz PR-771 Tekerlekli Katlanır Komot/Walker ile engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin hem yürüme desteği hem de banyo/tuvalet ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, paslanmaya dayanıklı çelik gövdesi, katlanabilir tasarımı ve yükseklik ayarı ile pratik bir çözüm sunar. Kompakt yapısı ve tekerlekli yürüteç özelliği, kullanıcıların hem destek almasını hem de tuvalet ihtiyacını karşılamasını sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-771 Tekerlekli Katlanır Komot/Walker, engelli bireyler veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için özel olarak tasarlanmış, hafif ve çok fonksiyonlu bir yürüteç ve tuvalet kombinasyonudur. 7.28 kg ağırlığındaki çelik gövde, 100 kg taşıma kapasitesi ile kullanıcıların güvenle oturmasını veya yürüme desteği almasını sağlar. Katlanabilir tasarımı ve 3" PVC ön ve arka tekerlekleri, dar alanlarda kolay manevra imkanı sunar. 45.5 cm oturma yeri genişliği, 43.5 cm derinliği, 32 cm sırtlık yüksekliği ve 76-87 cm ayarlanabilir toplam yükseklik ile ergonomik bir kullanım sunar. PR-771, yürüme desteği ve tuvalet ihtiyacı için idealdir.

Kullanım Amacı

PR-771, engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin hem yürüme stabil itesi kazanmalarını hem de banyo/tuvalet ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Yükseklik ayarı sayesinde kullanıcıların boyuna uyum sağlar ve çıkarılabilir klozet haznesi ile bağımsız tuvalet kullanımı sunar. Katlanabilir yapısı, taşınabilirlik ve depolama kolaylığı sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	45.5 cm
Oturma Yeri Derinliği	43.5 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	45 cm
Oturma Yeri Açısı	-
Sırtlık Yüksekliği	32 cm
Kolçak Yüksekliği	20 cm
Toplam Genişlik	52 cm
Toplam Yükseklik	76-87 cm
Toplam Uzunluk	49 cm
Katlanır Genişlik	-
Arka Tekerler	3" PVC
Ön Tekerler	3" PVC
Materyal	Çelik / Steel
Ürün Ağırlığı	7.28 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	100 kg
Koli Ölçüleri	53-18-79 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 380 – 40'DC / 900
Tilt	-

3. Kutunun İindekiler

- PR-771 Tekerlekli Katlanır Komot/Walker (katlanmış, montaj gerektirebilir)
 - ıkarılabilir klozet haznesi (kapaklı)
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum iin alıyan anahtar veya tornavida (varsa)
-

4. Gvenlik Uyarıları

- Maksimum 100 kg yk kapasitesini ařmayın.
 - rn yalnızca dz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eęimli alanlarda devrilme riski vardır.
 - rn suya uzun sre maruz bırakmayın; elik gvdeyi kurulayın.
 - Katlama veya ama iřlemleri sırasında ellerinizi hareketli paralardan uzak tutun.
 - Ykseklik ayarı yaparken dikkatli olun; yanlış ayar dřme riski yaratabilir.
 - Emniyet kemeri bulunmadığından, kullanıcıyı otururken veya yrrken sabit tutmak iin refakati dikkatli olmalıdır.
 - Tekerleklerin kilit mekanizmasını kullanarak sabitleyin; kaymayı nleyici yapıya raęmen dikkatli olun.
-

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan ıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu dz ve geniř bir zeminde aın. rn dikkatli bir řekilde kutudan ıkarın ve tm paraları kontrol edin. erevenin, tekerleklerin ve klozet haznesinin kutuda olduęundan emin olun. Tm paraları hasar aısından inceleyin; herhangi bir atlak, kırık veya eksik para varsa kullanmadan nce yetkili servise bařvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Ürün katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı doğru hafifçe bastırın. Yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilitlendiğini duyduğunuzda (genellikle bir "klik" sesi çıkar) ürün düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme

Ön ve arka tekerlekler (3" PVC) çerçeveye takılıdır. Her bir tekerleğin 360° serbestçe döndüğünü ve kilit mekanizmasının çalıştığını kontrol edin. Tekerlekleri kilitleyip serbest bırakarak sabitleme özelliğini test edin.

Adım 4: Yükseklik Ayarı Yapma

PR-771, yükseklik ayarı yapılabilen bir yapıya sahiptir (76-87 cm). Kullanıcının boyuna ve kullanım amacına (yürüme veya oturma) uygun şekilde yükseklik ayarı yapın. Ayar mekanizmasını kullanarak istenen yüksekliği seçin ve sabitleyin.

Adım 5: Klozet Haznesini Yerleştirme

Çıkarılabilir klozet haznesini (kapaklı) oturma yerinin altına yerleştirin. Haznenin sabit olduğundan emin olun. Tuvalet kullanımı için hazneyi çıkararak klozetle hizalama yapabilirsiniz.

Adım 6: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Ürünü sallayarak sabitliği test edin. Tekerleklerin, yükseklik ayarı mekanizmasının ve klozet haznesinin düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Tekerleklerin kilit mekanizmasını kontrol edin. Yükseklik ayarını (76-87 cm) kullanıcının boyuna ve kullanım amacına (yürüme veya oturma) göre yapın. Klozet haznesini yerleştirin veya hazneyi çıkararak klozetle hizalayın.

Adım 2: Yürüme Desteği Kullanımı

Tekerleklerin kilit mekanizmasını serbest bırakın. Kullanıcı, kolçaklara tutunarak ürünü yürüteç olarak kullanarak destek alsın. Refakatçi, kullanıcının dengesini kontrol etsin.

Adım 3: Oturma/Tuvalet Kullanımı

Tekerleklerin kilit mekanizmasını kullanarak ürünü sabitleyin. Refakatçi, kullanıcıyı oturma pozisyonuna yerleştirsın. Emniyet kemeri bulunmadığından, kullanıcıyı sabit tutmak için refakatçi dikkatli olmalıdır. Kullanım bittikten sonra klozet haznesini çıkararak temizleyin.

Adım 4: Katlama ve Taşıma

Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın. Katlanmış ürünü (7.28 kg) kolayca taşıyın veya depolama alanına yerleştirin. Katlanabilir yapısı sayesinde yer kaplamaz.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Çelik gövdeyi kurulayın.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Kilit mekanizmasını kontrol edin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; gerekirse elde yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.

- **Klozet Haznesi:** Her kullanımdan sonra ılık su ve sabunla yıkayın; tamamen kurummasını bekleyin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-771 Tekerlekli Katlanır Komot/Walker ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönmüyor	Kilit mekanizması kapalı	Tekerlek kilidini serbest bırakın.
Tekerlekler kayıyor	Zemin ıslak veya kirlî	Zemini temizleyin ve kurulaayın; tekerlekleri kontrol edin.
Ürün katlanmıyor	Çerçeve kilitlenmîş	Kilidi kontrol edin; mekanizmayı serbest bırakarak katlamayı tekrar deneyin.
Yükseklik ayarı deęişmiyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazikçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Ürün sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Klozet haznesi sızdırıyor	Hazne düzgün yerleştirilmemiş	Hazneyi çıkarıp tekrar doğru şekilde yerleştirin; contayı kontrol edin.
Çelik gövdede pas	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulaayın ve paslanan bölgeleri temizleyin; servise danışın.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Katlanabilir tasarım sayesinde ürünü araç bagajına kolayca yerleştirin. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek çelik gövdeyi paslanmaya karşı koruyun. 3" PVC tekerlekler, dar alanlarda manevra kolaylığı sağlar.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Tekerleklerin kilit mekanizmasını her kullanımda kontrol edin. Yürüme desteği ve oturma pozisyonu için yükseklik ayarını doğru yapın. Emniyet kemeri bulunmadığından, kullanıcıyı sabit tutmak için refakatçi dikkatli olmalıdır.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Çelik gövdeyi nemden koruyarak paslanmayı önleyin. Tekerleklerin ve yükseklik ayarı mekanizmasının düzenli bakımını yapın.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com

