



PR-772

Tekerlekli Katlanır Komot

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Loco markamızla sunduğumuz PR-772 Tekerlekli Komot ile engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, paslanmaya dayanıklı alüminyum gövdesi, ayarlanabilir yükseklik özelliği ve hafif tasarımı ile pratik bir çözüm sunar. Kompakt yapısı ve tekerlekli hareket kabiliyeti, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun kullanım sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-772 Tekerlekli Komot, engelli bireyler veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için özel olarak tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir tuvalet yardımcıdır. 6.9 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, 100 kg taşıma kapasitesi ile kullanıcıların güvenle oturmasını sağlar. 45 cm oturma yeri genişliği, 47 cm derinliği, 15 cm sırtlık yüksekliği ve 36.5-46.5 cm ayarlanabilir oturma yeri yüksekliği ile ergonomik bir kullanım sunar. 3" kilitlenebilir tekerlekleri, dar alanlarda kolay manevra imkanı ve sabitleme özelliği sağlar. PR-772, banyo ve tuvalet kullanımı için idealdir.

Kullanım Amacı

PR-772, engelli bireylerin veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir yükseklik özelliği sayesinde standart klozetle uyumlu kullanım imkanı sunar ve çıkarılabilir klozet haznesi ile bağımsız tuvalet kullanımı sağlar. Hafif ve katlanabilir yapısı, taşınabilirlik ve depolama kolaylığı sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	45 cm
Oturma Yeri Derinliği	47 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	36.5 - 46.5 cm
Oturma Yeri Açısı	-
Sırtlık Yüksekliği	15 cm
Kolçak Yüksekliği	-
Toplam Genişlik	56 cm
Toplam Yükseklik	56.6 - 66.5 cm
Toplam Uzunluk	49 cm
Katlanır Genişlik	-
Materyal	Alüminyum / Alüminyum
Ürün Ağırlığı	6.9 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	100 kg
Koli Ölçüleri	55 x 55 x 38 cm
Konteyner Yük Adedi	20' DC 295 / 40' DC 609

3. Kutunun İçindekiler

- PR-772 Tekerlekli Komot (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Çıkarılabilir klozet haznesi (kapaklı)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 100 kg yük kapasitesini aşmayın.
- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum gövdeyi kurulaştırın.
- Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
- Yükseklik ayarı yaparken dikkatli olun; yanlış ayar düşme riski yaratabilir.
- Emniyet kemeri bulunmadığından, kullanıcıyı otururken sabit tutmak için refakatçi dikkatli olmalıdır.
- Tekerleklerin kilit mekanizmasını kullanarak sabitleyin; kaymayı önleyici yapıya rağmen dikkatli olun.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin, tekerleklerin ve klozet haznesinin kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Ürün katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı doğru hafifçe bastırın. Yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilitlendiğini duyduğunuzda (genellikle bir "klik" sesi çıkar) ürün düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme

3" kilitlenebilir tekerlekler çerçeveye takılıdır. Her bir tekerleğin 360° serbestçe döndüğünü ve kilit mekanizmasının çalıştığını kontrol edin. Tekerlekleri kilitleyip serbest bırakarak sabitleme özelliğini test edin.

Adım 4: Yükseklik Ayarı Yapma

PR-772, oturma yeri yüksekliği ayarlanabilen bir yapıya sahiptir (36.5-46.5 cm). Kullanıcının boyuna ve klozet yüksekliğine uygun şekilde yükseklik ayarı yapın. Ayar mekanizmasını kullanarak istenen yüksekliği seçin ve sabitleyin.

Adım 5: Klozet Haznesini Yerleştirme

Çıkarılabilir klozet haznesini (kapaklı) oturma yerinin altına yerleştirin. Haznenin sabit olduğundan emin olun. Tuvalet kullanımı için hazneyi çıkararak klozetle hizalama yapabilirsiniz.

Adım 6: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Ürünü sallayarak sabitliği test edin. Tekerleklerin, yükseklik ayarı mekanizmasının ve klozet haznesinin düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Tekerleklerin kilit mekanizmasını kontrol edin. Yükseklik ayarını (36.5-46.5 cm) kullanıcının boyuna ve klozet yüksekliğine göre yapın. Klozet haznesini yerleştirin veya hazneyi çıkararak klozetle hizalayın.

Adım 2: Kullanıcıyı Ürüne Yerleştirme

Refakatçi, kullanıcıyı banyodan veya başka bir yüzeyden ürüne yerleştirsin. Kullanıcının oturma pozisyonuna geçmesi için ürünü yaklaştırsın. Emniyet kemeri bulunmadığından, kullanıcıyı sabit tutmak için refakatçi dikkatli olmalıdır.

Adım 3: Kullanım

Tekerleklerin kilit mekanizmasını kullanarak ürünü sabitleyin. Kullanım bittikten sonra klozet haznesini çıkararak temizleyin. Tekerlek kilidini serbest bırakarak ürünü hareket ettirin.

Adım 4: Taşıma

Ürünü katlamak için oturma kısmını yukarı çekin. Katlanmış ürünü (6.9 kg) kolayca taşıyın veya depolama alanına yerleştirin.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum gövdeyi kurulayın.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Kilit mekanizmasını kontrol edin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; gerekirse elde yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.
- **Klozet Haznesi:** Her kullanımdan sonra ılık su ve sabunla yıkayın; tamamen kurumasını bekleyin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-772 Tekerlekli Komot ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönmüyor	Kilit mekanizması kapalı	Tekerlek kilidini serbest bırakın.
Tekerlekler kayıyor	Zemin ıslak veya kirlidir	Zemini temizleyin ve kurulaştırın; tekerlekleri kontrol edin.
Yükseklik ayarı değişmiyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazıkçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Ürün sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Klozet haznesi sızdırıyor	Hazne düzgün yerleştirilmemiş	Hazneyi çıkarıp tekrar doğru şekilde yerleştirin; contayı kontrol edin.
Alüminyum gövdede korozyon	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulaştırın ve etkilenen bölgeleri temizleyin; servise danışın.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Hafif alüminyum yapısı sayesinde ürünü kolayca taşıyın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi korozyona karşı koruyun. 3" tekerlekler, dar alanlarda manevra kolaylığı sağlar.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Tekerleklerin kilit mekanizmasını her kullanımda kontrol edin. Klozetle uyum için yükseklik ayarını doğru yapın. Emniyet kemeri bulunmadığından, kullanıcıyı sabit tutmak için refakatçi dikkatli olmalıdır.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum gövdeyi nemden koruyarak korozyonu önleyin. Tekerleklerin ve yükseklik ayarı mekanizmasının düzenli bakımını yapın.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com