



PR-881

Alüminyum Walker (Rollator)

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahçelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Loco markamızla sunduğumuz PR-881 Alüminyum Walker Rollator ile engelli bireylerin, yaşlıların veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin mobilite ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, hafif alüminyum gövdesi, katlanabilir tasarımı, ayarlanabilir el tutma yerleri ve elcik fren sistemi ile pratik bir çözüm sunar. Tekerlekli yürüteç olarak hem yürüme desteği hem de dinlenme alanı sağlayan PR-881, kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-881 Alüminyum Walker Rollator, engelli bireyler, yaşlılar veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir tekerlekli yürüteçtir. Yaklaşık 7 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, 100 kg taşıma kapasitesi ile kullanıcıların güvenli yürütmesine ve dinlenmesine olanak tanır. 6" patlamayan PVC tekerlekleri, 360° dönebilen ön tekerlekler ve ayarlanabilir el tutma yerleri ile kolay manevra ve kişiselleştirilmiş konfor sağlar. Katlanabilir yapısı ve entegre oturma alanı ile hem mobilite hem de dinlenme desteği sunar. PR-881, ev içi ve dışı kullanım için idealdir.

Kullanım Amacı

PR-881, kullanıcıların günlük yaşamda bağımsız hareket etmelerini kolaylaştırmak ve yorgunluk anlarında dinlenmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir el tutma yerleri ve elcik fren sistemi ile güvenlik ve kontrol sunar. Katlanabilir tasarımı, taşıma ve depolama kolaylığı sağlar; ayrıca sepet özelliği ile kişisel eşyaların taşınmasına imkan tanır.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Genişliği	45 cm (yaklaşık)
Oturma Yeri Derinliği	40 cm (yaklaşık)
Oturma Yeri Yüksekliği	50 cm (yaklaşık)
Oturma Yeri Açısı	-
El Tutma Yüksekliği	80-90 cm (ayarlanabilir)
Toplam Genişlik	61 cm
Toplam Yükseklik	93 cm
Toplam Uzunluk	61 cm
Katlanır Genişlik	25 cm (yaklaşık)
Ön Tekerlekler	6" PVC (360° dönebilen)
Arka Tekerlekler	6" PVC
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	7 kg (yaklaşık)
Max. Taşıma Kapasitesi	100 kg
Koli Ölçüleri	65 x 30 x 80 cm (yaklaşık)
Konteyner Yük Adedi	20' DC 200 / 40' DC 450 (yaklaşık)

3. Kutunun İçindekiler

- PR-881 Alüminyum Walker Rollator (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Taşıma sepeti
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum 100 kg yük kapasitesini aşmayın.
- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Elcik frenlerini her zaman kontrol edin; yanlış kullanım düşme riski yaratabilir.
- Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum gövdeyi kurulaştırın.
- Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
- El tutma yerlerinin yüksekliğini kullanıcının boyuna uygun şekilde ayarlayın; yanlış ayar dengesizliğe neden olabilir.
- Tekerleklerin kilit mekanizmasını kullanarak sabitleyin; kaymayı önleyici yapıya rağmen dikkatli olun.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin, tekerleklerin, sepetin ve fren mekanizmasının kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Ürün katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı doğru hafifçe bastırın. Yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilittendiğini duyduğunuzda (genellikle bir "klik" sesi çıkar) ürün düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme

6" PVC ön ve arka tekerlekler çerçeveye takılıdır. Her bir tekerleğin 360° serbestçe döndüğünü ve kilitlenebilir olduğunu kontrol edin. Tekerlekleri kilitleyip serbest bırakarak sabitleme özelliğini test edin.

Adım 4: El Tutma Yüksekliğini Ayar Yapma

El tutma yerlerinin yüksekliği 80-90 cm arasında ayarlanabilir. Kullanıcının boyuna uygun şekilde ayar mekanizmasını kullanarak istenen yüksekliği seçin ve sabitleyin.

Adım 5: Fren Sistemini Kontrol Etme

Elcik frenlerini test edin. Frenleri sıkarak tekerleklerin hareket etmediğini doğrulayın; frenleri serbest bırakarak tekerleklerin döndüğünü kontrol edin.

Adım 6: Sepeti Yerleştirme

Taşıma sepetini çerçeveye takın. Sepetin sabit olduğunu ve düşmeyeceğini test edin.

Adım 7: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Ürünü sallayarak sabitliği test edin. Tekerleklerin, frenlerin, el tutma ayarı ve sepetin düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Tekerleklerin kilit mekanizmasını ve elcik frenlerini kontrol edin. El tutma yüksekliğini (80-90 cm) kullanıcının boyuna göre ayarlayın. Sepeti yerleştirin.

Adım 2: Yürüme Desteği Kullanımı

Tekerleklerin kilit mekanizmasını serbest bırakın. Kullanıcı, el tutma yerlerine tutunarak ürünü yürüteç olarak kullanarak destek alsın. Elcik frenlerini gerektiğinde kullanarak durun veya yavaşlayın.

Adım 3: Dinlenme Kullanımı

Tekerlekleri kilitleyin ve elcik frenlerini sıkın. Kullanıcı, oturma alanına oturarak dinlenebilir. Sepeti eşya taşımak için kullanın.

Adım 4: Katlama ve Taşıma

Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın (katlanır genişlik yaklaşık 25 cm). Katlanmış ürünü (7 kg) kolayca taşıyın veya depolama alanına yerleştirin.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum gövdeyi kurulaştırın.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Kilit mekanizmasını kontrol edin.
- **Oturma Yüzeyi:** Nemli bezle silin; gerekirse elde yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.

- **Sepet:** Kirlenirse ılık su ve sabunla nazikçe yıkayın; tamamen kurumasını bekleyin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-881 Alüminyum Walker Rollator ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler dönmüyor	Kilit mekanizması veya fren kapalı	Tekerlek kilidini ve elcik frenlerini serbest bırakın.
Frenler çalışmıyor	Fren mekanizması aşınmış veya kirlenmiş	Frenleri temizleyin; aşınma varsa servise başvurun.
El tutma ayarı değişmiyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazikçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Ürün sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Sepet düşüyor	Sepet sabit değil	Sepeti yeniden yerleştirin ve bağlantıları kontrol edin.
Alüminyum gövdede korozyon	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulayın ve etkilenen bölgeleri temizleyin; servise danışın.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Katlanabilir tasarım sayesinde ürünü araç bagajına kolayca yerleştirin (katlanır genişlik yaklaşık 25 cm). Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi korozyona karşı koruyun. 6" PVC tekerlekler, iç ve dış mekanlarda manevra kolaylığı sağlar.

- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Elcik frenlerini ve tekerlek kilidini her kullanımda kontrol edin. El tutma yüksekliğini kullanıcıya uygun şekilde ayarlayın. Yorgunluk anlarında oturma alanını güvenli bir şekilde kullanın.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum gövdeyi nemden koruyarak korozyonu önleyin. Tekerleklerin, frenlerin ve ayar mekanizmalarının düzenli bakımını yapın.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, kumaş).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com

