



CE

G459

Pediatric Serebral Palsi Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



GOLFİ markası olarak sunduğumuz **GOLFİ G459 Pediatrik Serebral Palsi Tekerlekli Sandalye**, özellikle serebral palsi hastası çocuklar için tasarlanmış, katlanabilir, hafif ve işlevsel bir tekerlekli sandalyedir. Bu ürün, 3-12 yaş arası çocuklar için uygundur ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan engelli, hasta, yaşlı ve güçsüz bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlar. 15 kg (6-12 yaş modeli) ve 14 kg (3-7 yaş modeli) net ağırlığı ile oldukça hafif bir yapı sunar; 55 kg (6-12 yaş) ve 40 kg (3-7 yaş) taşıma kapasitesi ile güvenli bir kullanım sağlar. Katlanabilir alüminyum alaşımlı çerçeve, kolay montaj ve demontaj imkanı sunar. Ayarlanabilir sırt açısı, koltuk açısı, koltuk derinliği ve kolçaklar, çocuğunuzun konforunu artırır. Ayak freni, devrilme önleyici tekerlekler ve emniyet kemeri gibi özellikler, güvenli bir kullanım sağlar. Opsiyonel yemek masası, çocuğunuzun yemek yemesini kolaylaştırır. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

GOLFİ G459 Pediatrik Serebral Palsi Tekerlekli Sandalye, özellikle serebral palsi hastası çocuklar için tasarlanmış, katlanabilir, hafif ve işlevsel bir tekerlekli sandalyedir. 3-12 yaş arası çocuklar için uygundur ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan engelli, hasta, yaşlı ve güçsüz bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlar. 15 kg (6-12 yaş modeli) ve 14 kg (3-7 yaş modeli) net ağırlığı ile oldukça hafif bir yapı sunar; 55 kg (6-12 yaş) ve 40 kg (3-7 yaş) taşıma kapasitesi ile güvenli bir kullanım sağlar. Katlanabilir alüminyum alaşımlı çerçeve, kolay montaj ve demontaj imkanı sunar. Ayarlanabilir sırt açısı, koltuk açısı, koltuk derinliği ve kolçaklar, çocuğunuzun konforunu artırır. Ayak freni, devrilme önleyici tekerlekler ve emniyet kemeri gibi özellikler, güvenli bir kullanım sağlar. Opsiyonel yemek masası, çocuğunuzun yemek yemesini kolaylaştırır. Başlık, ayak koruyucu ve ön koruyucu, çocuğunuzun güvenliğini ve rahatlığını destekler. GOLFİ G459, evde veya dış mekanlarda kullanım için ideal bir çözümdür.

Kullanım Amacı

GOLFİ G459 Pediatrik Serebral Palsi Tekerlekli Sandalye, hareket kabiliyeti kısıtlı olan çocuklar (3-12 yaş arası), özellikle serebral palsi hastaları için tasarlanmıştır. Engelli, hasta, yaşlı ve güçsüz bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlar. Katlanabilir yapısı, ayarlanabilir özellikleri ve güvenlik donanımları ile hem evde hem de dış mekanlarda güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay (6-12 Yaş Modeli)	Detay (3-7 Yaş Modeli)
Açık Boyutlar (U x G x Y)	87 x 61 x (118-124) cm	87 x 57 x (111-117) cm
Katlanmış Boyutlar (U x G x Y)	86 x 61 x 46 cm	86 x 57 x 46 cm
Koltuk Geniliği	32 cm	28 cm
Koltuk Derinliği	23-30.5 cm	20-27.5 cm
Koltuk Yüksekliği	53 cm	53 cm
Ön/Arka Tekerlek Çapı	6 inç / 8 inç	6 inç / 8 inç
Net Ağırlık	15 kg	14 kg
Taşıma Kapasitesi	55 kg	40 kg
Uygun Yaş Aralığı	6-12 yaş	3-7 yaş
Uygun Boy Aralığı	110-140 cm	85-110 cm
Çerçeve	Katlanabilir alüminyum alaşım	Katlanabilir alüminyum alaşım
Fren Sistemi	Ayak freni	Ayak freni

Özellik	Detay (6-12 Yaş Modeli)	Detay (3-7 Yaş Modeli)
Ayarlanabilir Özellikler	Sırt açısı, koltuk açısı, koltuk derinliği, kolçaklar, tutma kolu açısı	Aynı
Ek Özellikler	Devrilme önleyici tekerlekler, emniyet kemeri, opsiyonel yemek masası	Aynı
Ortam Sıcaklığı Aralığı	-25°C ~ +55°C	-25°C ~ +55°C
Bağıl Nem Aralığı	%25 ~ %95	%25 ~ %95
Atmosferik Basınç Aralığı	86 kPa ~ 106 kPa	86 kPa ~ 106 kPa


3. Kutunun İçindekiler

- GOLFİ G459 Pediatrik Serebral Palsi Tekerlekli Sandalye (1 adet)
- Devrilme Önleyici Tekerlekler (2 adet)
- Yemek Masası (1 adet)
- Başlık (1 adet)
- Ön Koruyucu (1 adet)
- Üçgen Yastık (4 adet)
- Alet Seti (1 adet)
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

4. Güvenlik Uyarıları

- **Uyarı!** Tekerlekli sandalyeyi kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve talimatları tam olarak anlayın. Anlamadığınız bir nokta varsa, yetkili distribütörle iletişime geçin.
- **Uyarı!** Tekerlekli sandalye ile herhangi bir taşıt içinde kullanıcıyı taşımak kesinlikle yasaktır; bu, ciddi yaralanmalara yol açabilir.

- **Uyarı!** Kullanıcının ayaklık üzerinde ayakta durması kesinlikle yasaktır; bu, tekerlekli sandalyenin öne devrilmesine neden olabilir.
- **Uyarı!** Tekerlekli sandalyeyi yanıcı maddelerin yakınına yerleştirmeyin; sırt yastığı ısı nedeniyle yanabilir ve kullanıcıya zarar verebilir.
- **Uyarı!** Teknik personelin izni olmadan tekerlekli sandalyeyi modifiye etmek kesinlikle yasaktır; bu durumda oluşabilecek kazalardan şirket sorumlu değildir.
- **Uyarı!** Kullanıcı, otururken vücudunu dışarı doğru uzatmamalıdır; bu, tekerlekli sandalyenin dengesini bozabilir ve devrilmesine neden olabilir.
- **Dikkat!** Merdiven çıkarken, refakatçi tutma kolunu aşağı bastırarak ön tekerlekleri merdivene çıkarmalı, ardından tutma kolunu yukarı çekerek arka tekerlekleri yükseltmelidir. Merdivenlerde tekerlekli sandalyeyi zorlamayın.
- **Dikkat!** Yokuş aşağı inerken, tekerlekli sandalye geriye doğru hareket ettirilmeli ve refakatçi tarafından yavaşça kontrol edilmelidir (Şekil 1).

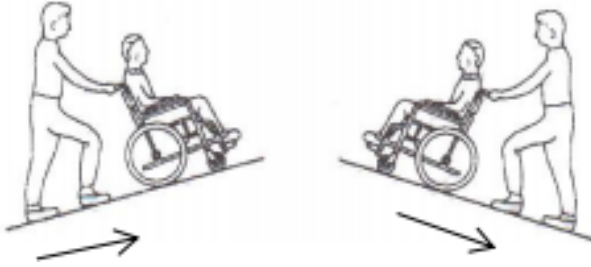

- **Dikkat!** Tekerlekli sandalyeyi her durdurduğunuzda, kısa bir süre için bile olsa freni kullanma alışkanlığı edinin.
- **Dikkat!** Tekerlekli sandalyeyi düz bir zeminde park edin; eğimli zeminlerde devrilme riski vardır.
- **Dikkat!** Keskin virajlarla karşılaştığınızda hızınızı azaltın; bu, tekerlekli sandalyenin devrilmesini önler.
- **Dikkat!** Tekerlekli sandalyeyi hareket ettirirken, kullanıcının ayaklarının ayaklıklar üzerinde olduğundan emin olun.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Ambalaj kutusunu düz ve geniş bir zeminde açın. Tekerlekli sandalyeyi, devrilme önleyici tekerlekleri, başlığı ve diğer parçaları kutudan çıkarın. Kutu içeriğini kontrol ederek eksik parça veya hasar olup olmadığını kontrol edin.

Adım 2: Tekerlekli Sandalyeyi Açma

1. Tekerlekli sandalyeyi kutudan çıkarın ve düz bir zemine yerleştirin.
2. Tekerlekli sandalye üzerindeki tüm emniyet kemerlerini serbest bırakın.
3. Sol elinizle çerçeve borusunu tutun ve geriye doğru kaldırın; sağ elinizle katlama bağlantısını tutarak öne doğru bastırın, böylece tekerlekli sandalye tamamen açılacaktır.
4. Katlama bağlantısını ayaklarınızla bastırarak sabitleyin; sabitleme pimi yerine oturana kadar (klik sesi duyulana kadar) bastırın veya katlama bağlantısını elinizle bastırarak sabitleyin.
5. Sol ve sağ kolçakları öne doğru çevirerek yerine oturtun.
6. Yastık ve üçgen blok üzerindeki koruyucu kumaşı (cırt cırtlı) çıkarın ve bu parçaları tekerlekli sandalyeye takın (Şekil 3).



Adım 3: Devrilme Önleyici Tekerleklerin Montajı

1. Çerçeveye monte edilmiş olan kilit pimini çıkarın.
2. Devrilme önleyici tekerlek setinin montaj borusunu çerçevenin ilgili montaj borusuna yerleştirin.
3. Devrilme önleyici tekerlek borusunun deliğini ve montaj borusunun deliğini hizalayın, ardından kilit pimini tekrar takarak montajı tamamlayın.
4. Sol ve sağ devrilme önleyici tekerleklerin montaj yöntemi aynıdır (Şekil 4).



Adım 4: Ön Koruyucunun Montajı

1. Koltuğun altındaki büyük beş yıldızlı düğmeyi gevşetin.
2. Ön koruyucuyu çerçevenin ilgili montaj borusuna yerleştirin.
3. Ön koruyucunun pozisyonunu ileri-geri hareket ettirerek ayarlayın, ardından büyük beş yıldızlı düğmeyi sıkarak sabitleyin (Şekil 5).



Adım 5: Tutma Kolu Açısının Ayar Yapılması

1. Tutma kolunu sabitleyen yıldız başlı vidayı gevşetin.
2. Tutma kolunu saat yönünde veya saat yönünün tersine hareket ettirerek uygun açığı ayarlayın.
3. Uygun açığa ulaştıktan sonra yıldız başlı vidayı sıkarak sabitleyin. Sol ve sağ tutma kollarının ayar yöntemi aynıdır (Şekil 6).



Adım 6: Sirt Açısının Ayar Yapılması

1. Sol elinizle sol tutma kolunu tutun, sağ elinizle sağ tutma kolunu tutun.
2. Sırtlığı ileri-geri hareket ettirerek açiyı ayarlayın.
3. Uygun pozisyona ulaştıktan sonra sol tutma kolunu bırakın (Şekil 7).



Adım 7: Sırt Yüksekliğinin Ayar Yapılması

1. Sırt yastığının sırtlık üzerindeki kemerini çözün.
2. Sabitleme pimini çıkarın, sırtlık borusunu yukarı-aşağı hareket ettirerek uygun delik pozisyonunu seçin.
3. Sabitleme pimini tekrar takın ve kemeri yeniden sabitleyin (Şekil 8).



Adım 8: Koltuk Açısının Ayar Yapılması

1. Sağ elinizle sağ tutma kolunu, sol elinizle sol tutma kolunu tutun.
2. Koltuğu ileri veya geri hareket ettirerek açığı ayarlayın.
3. Uygun pozisyona ulaştıktan sonra sağ tutma kolunu bırakın (Şekil 9).



Adım 9: Koltuk Derinliğinin Ayar Yapılması

1. Koltuğun her iki yanındaki sabitleme pimlerini çıkarın ve kemerleri gevşetin.
2. Koltuğu ileri-geri hareket ettirerek derinliği ayarlayın, uygun delik pozisyonunu seçin.
3. Sabitleme pimlerini tekrar takarak sabitleyin (Şekil 10).



6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Tekerlekli sandalyeyi düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Frenlerin çalıştığından, emniyet kemerinin sabit olduğundan ve çocuğun ayaklarının ayaklıklar üzerinde olduğundan emin olun.

Adım 2: Tekerlekli Sandalyenin Kullanımı

1. Çocuğu tekerlekli sandalyeye yerleştirin; emniyet kemerini bağlayarak sabitleyin.
2. Sırt açısını (Şekil 7), koltuk açısını (Şekil 9) ve koltuk derinliğini (Şekil 10) çocuğun konforuna göre ayarlayın.
3. Tutma kolu açısını (Şekil 6) refakatçinin rahatlığına göre ayarlayın.
4. Freni kullanarak tekerlekli sandalyeyi sabitleyin: Fren çerçevesini ayakla aşağı bastırarak veya elle iterek tekerlekli sandalyeyi durdurun. Freni serbest bırakmak için ayak tabanınızla fren çerçevesini yukarı kaldırın veya elle yukarı çekin (Şekil 11).



5. Tekerlekli sandalyeyi hareket ettirirken, çocuğun ayaklarının ayaklıklar üzerinde olduğundan emin olun.
6. Opsiyonel yemek masasını kullanarak çocuğun yemek yemesini kolaylaştırabilirsiniz.

Adım 3: Katlama ve Saklama

- **Katlama:** Tekerlekli sandalyeyi katlamak için emniyet kemerlerini gevşetin, kolçakları indirin, katlama bağlantısını serbest bırakın ve yatma yüzeyini ortadan ikiye katlayın.
- **Saklama:** Tekerlekli sandalyeyi kuru ve havalandırılmış bir yerde saklayın; yüksek sıcaklık, hızlı sıcaklık değişimleri veya kimyasal olarak aşındırıcı maddelerden (asit, alkali vb.) uzak tutun.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Çerçevenin yüzey kaplamasını yumuşak bir bezle silerek temiz tutun; yağlayıcı kullanmak yasaktır. Çerçevede çatlak fark ederseniz, yetkili distribütörle iletişime geçin.
- **Bağlantı Parçaları:** Sandalyenin gövdesindeki vidaları ve somunları düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik varsa sıkılaştırarak sürüş güvenliğini sağlayın.
- **Yastıklar:** Koltuk ve sırt yastıklarını ılık su ve seyreltilmiş sabunlu suyla yıkayın; nemli ortamlarda saklamaktan kaçının.
- **Genel Kontrol:** Tekerlekleri, frenleri ve bağlantı parçalarını düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa yetkili servise başvurun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekli sandalye hareket etmiyor	Fren kilitli	Freni serbest bırakın (Şekil 11).
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi veya hasar	Tekerlekleri temizleyin; hasar varsa değiştirin.
Çerçeve hasar görmüş	Sert darbe veya aşırı yük	Tekerlekli sandalyeyi kullanmayı bırakın ve servise başvurun.
Ayar mekanizmaları çalışmıyor	Sabitleme pimleri veya vidalar gevşek	Pimleri ve vidaları kontrol edin; gerekirse sıkılaştırın.

9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Tekerlekli sandalyeyi taşırken dikkatli olun; fırlatmak, yuvarlamak veya ağır baskı uygulamak yasaktır. Depolama sırasında kuru ve havalandırılmış bir alan tercih ederek ürünü nemden, yüksek sıcaklıktan ve kimyasal maddelerden koruyun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Tekerlekli sandalyeyi düzenli aralıklarla kontrol edin. Düz zeminlerde kullanın, frenlerin kilitlendiğinden emin olun. Keskin virajlarda hızınızı azaltın.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Çerçeveyi sert darbelere karşı koruyun. Tekerlekleri ve bağlantı parçalarını düzenli olarak kontrol ederek güvenli kullanımı sürdürün.
- **Semboller ve Anlamları:**
 - **Yağmurdan Koruyun:** Ürünü yağmura maruz bırakmayın.
 - **Kırılabilir, Dikkatli Taşıyın:** Ürünü taşırken dikkatli olun.
 - **Dikkat!:** Önemli bilgilere dikkat edin.
 - **Kılavuzu Okuyun:** Kullanmadan önce kılavuzu okuyun.
 - **İstifleme Katmanı Sınırı:** Ürünlerin üst üste istiflenmesinde belirtilen sınırı aşmayın.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, tahmini).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlek aşınması).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com