

# KULLANIM TALİMATI

## Test Öncesi Hazırlık

Testin doğru sonuç vermesi için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

Testten en az 10 dakika önce :

Yemek yemeyiniz , Sigara içmeyiniz, Sakız çiğnemeyiniz , İçecek tüketmeyiniz

Test oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Test cihazı ambalajı açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır

## Test Uygulama Adımları

### Adım 1 : Numune Toplama

Test çubuğunu ağız içine yerleştiriniz.

Sünger kısmı dil altı ve yanak içlerinde gezdiriniz.

Sünger kısmı tamamen ıslanana kadar ağızda gezdirin ve tükürük emdirin.

### Adım 2 : Testin Aktifleştirilmesi

Numune yeterince toplandıktan sonra ağızdan dışarı çıkarınız

Ürünün kapağını kapatınız ( varsa kilitleme mekanizmasını kullanınız )

Testi düz bir zemine bırakınız

### Adım 3 : Bekleme Süresi

Testi hareket ettirmeden 30 saniye ile 3 dakika bekleyiniz. Bazen 5 dakika sürebilir.

### Adım 4 : Sonuçların Yorumlanması

#### Her panelde genellikle iki çizgi alanı bulunur :

C ( Kontrol çizgisi ) Testin çalışıp çalışmadığını ve doğru yapıp yapılmadığını gösterir.

T ( Test çizgisi ) Gösterir.

#### ✓ NEGATİF SONUÇ

Hem C Çizgisi hem T Çizgisi görünüyorsa ( T çizgisi silik bile olsa ) Negatif sonuç

→ İlgili madde tespit edilmemiştir

#### ✗ POZİTİF SONUÇ

Sadece C Çizgisi var, T Çizgisi yoksa ( Pozitif ) İlgili madde tespit edilmiştir

⚠ GEÇERSİZ SONUÇ ( C çizgisi hiç oluşmamışsa )

→ Test geçersizdir, yeni test ile tekrar edilmelidir

✓ Aşağıdaki uygulama videosunu mutlaka uygulamadan önce izleyiniz.

<https://www.youtube.com/watch?v=ckYbgEa9t90>