

toda Drugdiag® Saliva 5+ inovasyon

Tükürükte bağımlılık yapan maddeler için hızlı tarama testi



Endikasyonları

Toda Drugdiag® Saliva 5+ yeniliği, tükürükteki 5 ilacın ve bunların ana metabolitlerinin kalitatif tespiti için immünokromatografik bir testtir. Kullanım kolaylığı ve ergonomi açısından büyük bir yeniliği temsil ediyor.

Testin Faydaları

Yenilikçi : Yeni, daha ergonomik, daha yüksek performanslı model.

Hızlı: Tükürük örneği 15 saniye içinde alınır ve ilk dakika içinde sonuçlanır.

Kullanımı Kolay: Tükürük doygunluğunun renk değişimi göstergesi ile basit tükürük örnekleme.

Güvenilir: Seyreltici gerektirmez, işlem gerektirmez, numuneyi denatüre etmez.

Çoklu test : 5 eşzamanlı madde.

Gizli : Sonuçları gizlemek için bir gizlilik etiketi ile donatılmıştır.

Kullanıma Hazır : İnceltici veya ek özel işlem gerekmez.

Şirketlerde tarama prosedürlerini açıklayan 16 Aralık 2016 tarihli Emir AFSP1636875A ile uyumludur.

Yerel : Fransa'da üretilmiştir

Algılama eşikleri

İlaç analiz edildi	Kalibratör	Eşik (ng/mL)
Kokain (COC)	Benzolektagonin	10*
Amfetamin (AMP)	d-Amfetamin	50*
Morfin / Opiatlar (OPI)	Morfin	10*
Metamfetamin (MET)	d-Metamfetamin	50*
Esrar (THC)	Δ 9-THC	15*

* Bu eşikler, 13 Aralık 2016 tarihli ve narkotik kullanımını gösteren maddelerin test prosedürlerini belirleyen karamamen gerektirdiği eşiklere karşılık gelmektedir.

Detaylı görünüm



Drugdiag® Saliva 5+ inovasyon

Bu nasıl kullanılır ?

1. Adım

aktivasyontükürük salgısı

Denekten dilini soldan sağa alt ve üst diş etlerine doğru gezdirmesini isteyin.

Örneklem: - Numune alma cihazını çıkarın ve kapağı çıkarın. - Süngeri ağız alt sağ ve sol diş etlerine ve dilin üst kısmına nazikçe ileri geri ovalayın. - Ardından süngeri dilin altına (sünger tarafi aşağı bakacak şekilde) 20 saniye boyunca ağız kapalı olarak yerleştirin.

Uyarı


Doygunluk göstergesi pembeye dönmelidir.

Durum böyle değilse, tükürük salgısını yeniden etkinleştirilme örnekleyciyi 20 saniye boyunca dilin altına yerleştirin.

2. Adım

Tetik: - Numune alıcı sünger tarafına, ayrılmış yuvaya yerleştirin. - Tetiği ok yönünde gidebildiği kadar kaydırın ve mavi halkaya 3 saniye boyunca baskı uygulayın. - Taşınma sırasında cihazı düz bir yüzeye yerleştirin. - Sonuçları 5 dakika sonra okuyun. - Test edilen ilaçları ortaya çıkarmak için gizlilik etiketini çıkarın.

Sonuç örneği

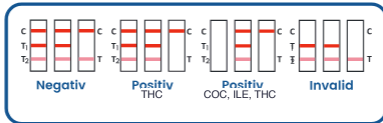

IntegraMed
Healthcare Innovations

Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. Sağlık sigortası kuruluşları tarafından geri ödenmeyen ekipman. Bu belge sadece sağlık profesyonelleri içindir. Telif hakkı © TodaPharma. 09 Mart 2023 Versiyonu - Ref : 1003001

Namık Kemal Mah. Tek
Selvi Sok. No:14
Ümraniye - İSTANBUL

www.integratedikal.com
info@integratedikal.com
Tel : +90 (216) 355 72 37
Mobil : +90 (532) 547 44 74



French
Hea thcare
Association